

# INSTRUKCJA UŻYWANIA

## PODKŁAD HIGIENICZNY WIELORAZOWY



### PRZEZNACZENIE

Podkład higieniczny wielorazowy jest wyrobem medycznym przeznaczonym do zabezpieczenia powierzchni (np. materaca, tółka) przed zabrudzeniem wydzielinami fizjologicznymi (np. mocz, krew). Chroni przed wystąpieniem zakażeń/infekcji w wyniku długotrwałej styczności pacjenta z wydzielinami fizjologicznymi.

### CHARAKTERYSTYKA

Wykonany z nieprzemakalnego materiału: dzianina: 81% bawełna; 19% poliester; powłoka ochronna: 100% PVC. W opakowaniu znajduje się jedna sztuka produktu. Podkłady dostępne są w rozmiarach: 70x100 cm, 70x140 cm, 100x140 cm, 140x200 cm, Dostępne kolory: niebieski, zielony.

### CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Myc przy użyciu gąbki zmoczonej w kąpeli wodnej z dodatkiem delikatnego środka piorącego. Materiał można poddawać dezynfekcji parowej w temp. 121°C w czasie 20 minut, min. 50 cykli. Podkład można prać w temperaturze do 95°C.

### PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować wilgotnego wyrobu bezpośrednio w kontakcie ze skórą. Nie stosować w przypadku wystąpienia reakcji alergicznych skóry. Nie stosować, jeśli nastąpiło uszkodzenie mechaniczne wyrobu (np. pęknięcie, rozerwanie).

### ⚠️ OSTRZEŻENIA

Przed użyciem skonsultować celowość zastosowania, dobór wyrobu i sposób używania z lekarzem lub specjalistą rehabilitantem. Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania. Przed pierwszym zastosowaniem należy uprać podkład. Nie chlorować (nie stosować do bielenia związków wydzielających wolny chlor). Nie czyścić chemicznie. Nie prasować (nie dopuszczać do kontaktu z nagrzanymi powierzchniami np. kaloryfer). Podkład można stosować dwustronnie (powierzchnią dzianinową frotte lub PVC do pacjenta). Pogorszenie właściwości wizualno-estetycznych (typu zmarszczenie powierzchni) nie wpływa na zmianę parametrów użytkowych materiału (właściwości fizykomechanicznych).

### GWARANCJA

Wyrób objęty jest 24-miesięcznym okresem gwarancji. Wyrób powinien być wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami w instrukcji używania. Gwarancja nie obejmuje usterek powstałych wskutek używania wyrobu niezgodnie z instrukcją używania, zaniedbań, dokonywania samodzielnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych. Do serwisu produkt należy dostarczyć czysty. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia, nabywca będzie obciążony kosztami realizacji i reklamacji. Gwarancja jest realizowana na podstawie dowodu zakupu. Zasięg terytorialny ochrony gwarancji obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień nabywcy wynikających z niezgodności towaru z umową.

#### Wyjaśnienie symboli

|                                |                |                                                 |                               |                               |
|--------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Producent                      | Kod partii     | Dbaj o czystość                                 | Użyć do daty                  | Suszyć w suszarkach bębnowych |
| Numer katalogowy               | Wyrób medyczny | Przechowywać z dala od światła słonecznego      | Ostrzeżenie                   | Nie czyścić chemicznie        |
| Zajrzyj do instrukcji używania | Oznakowanie CE | Nie używać, jeśli opakowanie zostało uszkodzone | Prać w temperaturze max 95 °C | Nie wybielać                  |
| Data produkcji                 | Numer modelu   | Chronić przed wilgocią                          | Nie prasować                  |                               |

Data wydania instrukcji używania: 03.2024 v. 4



**REHA FUND Sp. z o.o.**  
ul. Staniewicka 14  
03-310 Warszawa, Polska  
[www.rehafund.pl](http://www.rehafund.pl)