

INSTRUKCJA UŻYWANIA ORTEZA STOPOWO GOLENIOWA DŁUGA „AIR WALKER LONG” O-1180



I. WPROWADZENIE

Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy REHA FUND Sp. z o.o., czołowego dostawcy materiałów zaopatrzenia medycznego i artykułów rehabilitacyjnych na rynku polskim. Instrukcja używania zawiera wskazówki i sugestie, których znajomość jest niezbędna do prawidłowego korzystania z wyrobu.



UWAGA! Przed użyciem wyrobu należy zapoznać się z instrukcją używania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z wyrobu, nieprzestrzeganie zasad bezpiecznego używania oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.

II. CHARAKTERYSTYKA

TABELA ROZMIARÓW

Rozmiar	Rozmiar buta
S	35–40
M	40–44
L	44–47

SKŁAD

45% Polipropylen
20% Poliester,
20% Poliuretan,
15% Termoplastyczny poliuretan

Orteza stopowo-goleniowa długa „AIR WALKER LONG” dzięki lekkiej konstrukcji nie obciąża kontuzjowanej kończyny. Wyposażona w jednokomorowy układ powietrza, zintegrowaną pompkę oraz zawór odpowietrzający dla lepszej ochrony i możliwości dostosowania kompresji do stanu chorobowego. Zdejmowany przedni panel umożliwia pełne otwarcie buta, przez co ułatwia jego zakładanie. Zaokrąglona, antypoślizgowa podeszwa zapewnia bezpieczny i fizjologiczny chód. Orteza wyposażona jest również w regulowany i demontowany ochraniacz palców.

III. PRZEZNACZENIE I ZASTOSOWANIE

Orteza AIRWALKER LONG stanowi doskonałą alternatywę do tradycyjnego unieruchomienia gipsowego, zdecydowanie poprawiając komfort użytkowania. Możliwość regulacji siły ucisku przez układ powietrzny redukuje możliwość wystąpienia krwiaków oraz obrzęków. Dzięki całkowicie otwartej konstrukcji, mamy możliwość kontroli wizualnej kontuzji oraz utrzymanie kończyny w należytym stanie higienicznym.

Produkt może być używany w przypadku:

- Leczenia pooperacyjnego (zerwanie ścięgna Achillesa, uraz więzadła (tkanek miękkich i ścięgien),
- Leczenia nieoperacyjnego (złamania śródstopia, urazy ścięgna Achillesa, poważne zniekształcenia),
- Stabilnego złamania stopy i stawów,
- Opieki pooperacyjnej po złamaniach (kości skokowej, zwichnięcie stawu skokowego górnego),
- doleczenia i rehabilitacji trwałych lub czasowych dysfunkcji obejmowanego ortezą odcinka.

IV. PRZECIWSKAZANIA

Złamania niestabilne lub złamania bliższej części piszczeli lub strzałki,

Defekty tkanki miękkiej i problemy z gojeniem się rany,

Istniejące problemy z drenażem limfy,

Zbyt ciasne założenie ortozy może prowadzić do nasilenia dolegliwości bólowych, zbyt luźne powoduje brak założonego działania

W przypadku wystąpienia zmian na skórze w miejscach przylegania ortozy, jej stosowanie jest ograniczone i możliwe tylko pod nadzorem lekarza

Konieczna jest ocena przez lekarza prowadzącego zastosowania ortozy w przypadku osób z zaburzeniami pamięci różnego pochodzenia, osób z zaburzeniami psychicznymi i dzieci.

V. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYWANIA

Ten produkt może być używany tylko zgodnie z zaleceniem lekarza,

Sposób zakładania ortozy powinien być zademonstrowany przez wykwalifikowany personel medyczny, w obecności osoby, która sprawuje opiekę nad użytkownikiem (jeśli dotyczy),

Produkt i jego elementy należy wykorzystywać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem,

Jeśli podczas użytkowania produktu wystąpi ból, obrzęk, zmiany czucia lub jakiegokolwiek nietypowe reakcje, natychmiast skonsultuj się z lekarzem,

Stosowanie produktu w nocy jest dopuszczalne jedynie w przypadku zalecenia lekarza prowadzącego;


Stosowanie ortozy przez długi okres czasu może skutkować ograniczeniem ruchów czynnych i biernych w stawach oraz zanikiem mięśni, dlatego zaleca się systematyczne wykonywanie ćwiczeń dobranych przez wykwalifikowany personel medyczny na polecenie lekarza prowadzącego,

Produkt należy utrzymywać w czystości zgodnie z zaleceniami podanymi w niniejszej instrukcji oraz na metce umieszczonej na wyrobie. Niewłaściwe czyszczenie i konserwacja wyrobu może prowadzić do powstawania zmian skórnych, Produkt nie może być używany w przypadku braku jakiegokolwiek części. Nie można stosować dwóch tych samych lub różnych produktów jednocześnie.

Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

VI. SPOSÓB UŻYCIA

1. Upewnij się, że rozmiar produktu jest odpowiednio dobrany,
2. Przed założeniem ortozy odepnij wszystkie paski, zdejmij przedni panel i rozepnij tkaninową wyściółkę wewnętrzną,
3. Umieścić nogę wewnątrz buta, owiń wyściółkę wokół stopy i łydki i zapnij,
4. Upewnij się że pompka powietrzna znajduje się dokładnie pośrodku nogi,
5. Załóż panel przedni, tak aby pompka powietrzna znajdowała się w jego otworze,
6. Zapnij wszystkie 4 taśmy buta, mocując go do nogi,
7. Aby napompować układ powietrza, obróć zawór znajdujący się poniżej pompki w prawo i pompuj gruszką, aż do uzyskania dokładnego dopasowania. Pamiętaj, aby nie nadmuchać nadmiernie. Spuść powietrze po każdym użyciu, obracając zawór przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

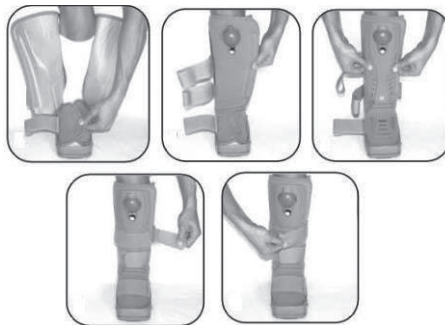

VII. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Zaleca się pranie wyrobu regularnie. Przed praniem należy (w razie możliwości) wyjąć metalowe elementy produktu i zapiąć wszystkie połączenia rzepowe ortozy.

- a. Prać ręcznie w temperaturze do 40°C w wodzie z neutralnym, antyalergicznym detergentem,
- b. Płukać w letniej wodzie, nie stosować środków zmiękczających,
- c. Nie wykręcać,
- d. Nie wybielać,
- e. Nie prasować,
- f. Nie czyścić chemicznie,
- g. Nie suszyć w suszarce bębnowej,
- h. Suszyć na płasko w zacienionym oraz przewiewnym miejscu – nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Produkt nie jest odporny na ciepło i traci swoje właściwości w wysokiej temperaturze powyżej 120°C.

VIII. KONIEC UŻYWANIA

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas kontroli ortozy, zgodnie z zaleceniami producenta. Po zakończeniu używania należy poddać wyrób utylizacji zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.

IX. PRZEWIDZANY OKRES UŻYWANIA

Przewidzany okres używania ortozy to 3 lata. Ten czas może być dłuższy lub krótszy, zależnie od częstotliwości korzystania i konserwacji wyrobu.

X. GWARANCJA

Producent zapewnia klienta, że przedmiot sprzedaży jest fabrycznie nowy oraz wysokiej jakości.
Wyrób objęty jest gwarancją (szczegółowe warunki gwarancji znajdują się na stronie internetowej Producenta).
Wyrób powinien być wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami w instrukcji używania.

XI. GLOSARIUSZ SYMBOLI

	Producent		Góra, nie przewracać
	Oznakowanie CE		Chronić przed wilgocią
	Numer katalogowy		Kruchy, obchodzić się ostrożnie
	Numer modelu		Nie przecinać
	Data produkcji		Recykling
	Zajrzyj do instrukcji używania		Prać ręcznie
	Wyrób medyczny		Nie wybielać
	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu		Nie prasować
	Ostrzeżenie		Nie czyścić chemicznie
	Kod partii		Nie suszyć bębnowo
	Ilość		



REHA FUND Sp. z o.o.
ul. Staniewicka 14,
03 – 310 Warszawa, Polska
e-mail: info@rehafund.pl
www.rehafund.pl



I/PL/O-1180/2/12.12.2024
Data wydania instrukcji używania: 12.2024 v.2

