

INSTRUKCJA UŻYWANIA ORTEZA STOPOWO GOLENIOWA DŁUGA „AIR WALKER BASIC LONG” O-1182

I. WPROWADZENIE

Szanowni Państwo,
Serdecznie dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy REHA FUND Sp. z o.o., czołowego dostawcy materiałów zaopatrzenia medycznego i artykułów rehabilitacyjnych na rynku polskim. Instrukcja używania zawiera wskazówki i sugestie, których znajomość jest niezbędna do prawidłowego korzystania z wyrobu.



UWAGA! Przed użyciem wyrobu należy zapoznać się z instrukcją używania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z wyrobu, nieprzestrzeganie zasad bezpiecznego używania oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.

II. CHARAKTERYSTYKA

TABELA ROZMIARÓW

Rozmiar	Rozmiar buta
S	35–38
M	38–40
L	40–43
XL	43–46

SKŁAD

Policlorek winylu (PCW) 45%,
Poliester 35%,
Poliuretan 20%

Orteza stopowo-goleniowa długa „AIR WALKER BASIC LONG” dzięki lekkiej konstrukcji nie obciąża kontuzjowanej kończyny. Wyposażona w jednokomorowy układ powietrza, zintegrowaną pompkę oraz zawór odpowietrzający dla lepszej ochrony i możliwości dostosowania kompresji do stanu chorobowego. Otwarta konstrukcja ułatwia zakładanie i zdejmowanie. Zaokrąglona, antypoślizgowa podeszwa zapewnia bezpieczny i fizjologiczny chód.

III. PRZEZNACZENIE I ZASTOSOWANIE

Orteza AIR WALKER BASIC LONG stanowi doskonałą alternatywę do tradycyjnego unieruchomienia gipsowego, zdecydowanie poprawiając komfort używania. Możliwość regulacji siły ucisku przez układ powietrzny redukuje możliwość wystąpienia krwiaków oraz obrzęków. Dzięki całkowicie otwartej konstrukcji, mamy możliwość kontroli wizualnej kontuzji oraz utrzymanie kończyny w należytych stanie higienicznym.

Produkt może być używany w przypadku:

- Leczenia pooperacyjnego (uraz więzadła i tkanek miękkich i ścięgien),
- Leczenia nieoperacyjnego (złamania śródstopia, poważne zniekształcenia),
- Stabilnego złamania stopy i stawów,
- Opieki pooperacyjnej po złamaniach (kości skokowej, zwichnięcie stawu skokowego górnego), doleczenia i rehabilitacji trwałych lub czasowych dysfunkcji obejmowanego ortezą odcinka.

IV. PRZECIWSKAZANIA

- Złamania niestabilne lub złamania bliższej części piszczeli lub strzałki,
- Defekty tkanki miękkiej i problemy z gojeniem się rany,
- Istniejące problemy z drenażem limfy,

- Zbyt ciasne założenie ortozy może prowadzić do nasilenia dolegliwości bólowych, zbyt luźne powoduje brak założonego działania
- W przypadku wystąpienia zmian na skórze w miejscach przylegania ortozy, jej stosowanie jest ograniczone i możliwe tylko pod nadzorem lekarza
- Konieczna jest ocena przez lekarza prowadzącego zastosowania ortozy w przypadku osób z zaburzeniami pamięci różnego pochodzenia, osób z zaburzeniami psychicznymi i dzieci.

V. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYWANIA

- Przed użyciem należy skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia celowość zastosowania, dobór wyrobu i sposób używania,
- Sposób zakładania ortozy powinien być zademonstrowany przez wykwalifikowany personel medyczny, w obecności osoby, która sprawuje opiekę nad użytkownikiem (jeśli dotyczy),
- Produkt i jego elementy należy wykorzystywać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem,
- Jeśli podczas używania produktu wystąpi ból, obrzęk, zmiany czucia lub jakiegokolwiek nietypowe reakcje, natychmiast skonsultuj się z lekarzem,
- Stosowanie produktu w nocy jest dopuszczalne jedynie w przypadku zalecenia lekarza prowadzącego;
- Stosowanie ortozy przez długi okres czasu może skutkować ograniczeniem ruchów czynnych i biernych w stawach oraz zanikiem mięśni, dlatego zaleca się systematyczne wykonywanie ćwiczeń dobranych przez wykwalifikowany personel medyczny na polecenie lekarza prowadzącego,
- Produkt należy utrzymywać w czystości zgodnie z zaleceniami podanymi w niniejszej instrukcji oraz na metce umieszczonej na wyrobie. Niewłaściwe czyszczenie i konserwacja wyrobu może prowadzić do powstawania zmian skórnych,
- Produkt nie może być używany w przypadku braku jakiegokolwiek części. Nie można stosować dwóch tych samych lub różnych produktów jednocześnie.
- Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania

VI. SPOSÓB UŻYCIA

1. Przed użyciem upewnij się, że rozmiar produktu jest odpowiednio dobrany.
2. Przed założeniem ortozy odepnij wszystkie paski i rozepnij tkaninową wyściółkę wewnętrzną, umieść nogę wewnątrz buta, owiń wyściółkę wokół stopy i łydki i zapnij, upewnij się że pompka powietrzna znajduje się dokładnie pośrodku nogi, zapnij wszystkie taśmy buta, mocując go do nogi, aby napompować układ powietrza, obróć zawór znajdujący się poniżej pompki w prawo i pompuj gruszkę, aż do uzyskania dokładnego dopasowania.
3. Pamiętaj, aby nie nadmuchać nadmiernie. Spuść powietrze po każdym użyciu, obracając zawór przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

VII. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Zaleca się pranie wyrobu regularnie. Przed praniem należy (w razie możliwości) wyjąć metalowe elementy produktu i zapiąć wszystkie połączenia rzepowe ortozy.

- Prać ręcznie w temperaturze do 40°C w wodzie z neutralnym, antyalergicznym detergentem,
- Płukać w letniej wodzie, nie stosować środków zmiękczających,
- Nie wykრęcać,
- Nie wybielać,
- Nie prasować,
- Nie czyścić chemicznie,
- Nie suszyć w suszarce bębnowej,
- Suszyć na płasko w zacienionym oraz przewiewnym miejscu – nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Produkt nie jest odporny na ciepło i traci swoje właściwości w wysokiej temperaturze powyżej 120°C.
- Dla własnego bezpieczeństwa kontroluj na bieżąco stan wyrobu.

VIII. KONIEC UŻYWANIA

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas kontroli wyrobu zgodnie z zaleceniami producenta. Patrz punkt instrukcji: Czyszczenie i Konserwacja – należy niezwłocznie zaprzestać korzystania z wyrobu.

IX. PRZEWIDZANY OKRES UŻYWANIA

Przewidzany okres używania ortozy to 3 lata. Ten czas może być dłuższy lub krótszy, zależnie od częstotliwości korzystania i konserwacji wyrobu.

X. GWARANCJA

Producent zapewnia klienta, że przedmiot sprzedaży jest fabrycznie nowy oraz wysokiej jakości.
Wyrób objęty jest gwarancją (szczegółowe warunki gwarancji znajdują się na stronie internetowej Producenta).
Wyrób powinien być wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami w instrukcji używania.

XI. GLOSARIUSZ SYMBOLI

	Producent		Data ważności
	Oznakowanie CE		Góra, nie przewracać
	Numer katalogowy		Chronić przed wilgocią
	Numer modelu		Kruchy, obchodzić się ostrożnie
	Data produkcji		Nie przecinać
	Zajrzyj do instrukcji używania		Recykling
	Wyrób medyczny		Pracę ręcznie
	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu		Nie wybielać
	Ostrzeżenie		Nie prasować
	Kod partii		Nie czyścić chemicznie
	Ilość		Nie suszyć bębnowo



REHA FUND Sp. z o.o.
ul. Staniewicka 14,
03–310 Warszawa, Polska (Poland)
e-mail: info@rehafund.pl
www.rehafund.pl



I/O-1182/3/14.01.2025
Data wydania instrukcji używania: 01.2025 v.2