

INSTRUKCJA UŻYWANIA

Temblak kończyny górnej O-1500



UWAGA! Przed przystąpieniem do pierwszego użycia wyrobu należy zapoznać się z niniejszym dokumentem.

Przy zakupie należy sprawdzić kompletność oraz stan jakościowy wyrobu.

I. OPIS WYROBU

Temblak kończyny górnej wykonany jest z wytrzymałej tkaniny poliestrowej. Dzięki otwartej konstrukcji oraz podziałowi rozmiarowemu umożliwia idealne dopasowanie do ciała.

II. WŁAŚCIWOŚCI

Stabilizator może być stosowany zarówno na prawe jak i lewe ramię. Kończyna podtrzymywana jest za pomocą regulowanej taśmy naramiennej, która umożliwia precyzyjne ustawienie kończyny na odpowiedniej wysokości. Szeroki pas podtrzymujący zapewnia równomierne rozłożenie ciężaru ciała na całej długości pleców.

III. SPOSÓB UŻYCIA

- Upewnij się, że rozmiar produktu jest odpowiednio dobrany,
- Załóż ortezę na rękę, w razie potrzeby umieść kciuk w specjalnej pętelce
- Przełóż pasek przez ramię i zapnij temblak na klamerkę,
- Za pomocą regulatora dopasuj długość taśmy.

IV. TABELA ROZMIARÓW

Rozmiar	Długość przedramienia mierzona w zgięciu (od łokcia do nadgarstka)
S	18–24 cm
M	21–27 cm
L	28–33 cm
XL	34–40 cm

V. SKŁAD:

Poliester 100%

VI. ZASADY UŻYTKOWANIA

- Ten produkt może być używany tylko zgodnie z zaleceniem lekarza,
- Sposób zakładania ortozy powinien być zademonstrowany przez wykwalifikowany personel medyczny, w obecności osoby, która sprawuje opiekę nad użytkownikiem (jeśli dotyczy),
- Produkt i jego elementy należy wykorzystywać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem,
- Produkt należy zakładać bezpośrednio na ciało lub odzież,
- Produkt należy utrzymywać w czystości zgodnie z zaleceniami podanymi w niniejszej instrukcji oraz na metce umieszczonej na wyrobie. Niewłaściwe czyszczenie i konserwacja wyrobu może prowadzić do powstawania zmian skórnych,

Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

VII. ZASTOSOWANIE

Produkt może być używany:

- Do podtrzymania opatrunku gipsowego, jako zabezpieczenie i odciążenie po zdjęciu gipsu,
- W przypadku częściowego uszkodzenia więzadeł stawu ramennego, stawu barkowo-obończykowego, stawu łokciowego,
- W niedowładach kończyny górnej,

VIII. PRZECIWSKAZANIA

- W przypadku wystąpienia zmian na skórze w miejscach przylegania ortozy, jej stosowanie jest ograniczone i możliwe tylko pod nadzorem lekarza,
- Konieczna jest ocena przez lekarza prowadzącego zastosowania ortozy w przypadku osób z zaburzeniami pamięci różnego pochodzenia, osób z zaburzeniami psychicznymi i dzieci.

IX. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Zaleca się pranie wyrobu regularnie. Przed praniem należy zapiąć wszystkie połączenia rzepowe ortozy.

- Prać ręcznie w temperaturze do 30°C w wodzie z neutralnym, antyalergicznym detergentem,
- Płukać w letniej wodzie, nie stosować środków zmiękczających,
- Nie wybielać,
- Nie prasować,
- Nie czyścić chemicznie,
- Nie suszyć w suszarce bębnowej,
- Suszyć na płasko w zacienionym oraz przewiewnym miejscu – nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

X. GWARANCJA

Producent zapewnia klienta, że przedmiot sprzedaży jest fabrycznie nowy oraz wysokiej jakości.

Wyrób objęty jest gwarancją (szczegółowe warunki gwarancji znajdują się na stronie internetowej Producenta).

Wyrób powinien być wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami w instrukcji używania.

XI. WYJAŚNIENIE SYMBOLI

	Producent		Góra, nie przewracać
	Oznakowanie CE		Chronić przed wilgocią
	Numer katalogowy		Kruchy, obchodzić się ostrożnie
	Data produkcji		Nie przecinać
	Zajrzyj do instrukcji używania		Nie używać gdy opakowanie jest uszkodzone
	Ostrzeżenie		Recykling
	Kod partii		Przechowywać z dala od światła słonecznego
	Wyrób medyczny		Prać ręcznie
	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu		Nie suszyć w pozycji pionowej
	Ilość		Nie prasować
	Numer modelu		Nie czyścić chemicznie
	Data ważności		Nie suszyć bębnowo