

INSTRUKCJA UŻYWANIA TEMBLAK KOŃCZYNY GÓRNEJ SIATKOWY O–1501

I. WPROWADZENIE

Szanowni Państwo,
Serdecznie dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy REHA FUND Sp. z o.o., czołowego dostawcy materiałów zaopatrzenia medycznego i artykułów rehabilitacyjnych na rynku polskim. Instrukcja używania zawiera wskazówki i sugestie, których znajomość jest niezbędna do prawidłowego korzystania z wyrobu. Przed użyciem wyrobu należy zapoznać się z instrukcją używania.



Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z wyrobu, nieprzestrzeganie zasad bezpiecznego używania oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.



II. CHARAKTERYSTYKA TABELA ROZMIARÓW

Rozmiar	Długość przedramienia mierzona w zgięciu (od łokcia do nadgarstka)
S	18–24 cm
M	21–27 cm
L	28–33 cm
XL	34–40 cm

SKŁAD

Poliester 100%

Templak kończyny dolnej siatkowy wykonany jest z wytrzymałej i przewiewnej tkaniny siatkowej. Dzięki otwartej konstrukcji oraz podziałowi rozmiarowemu umożliwia idealne dopasowanie do ciała.

III. PRZEZNACZENIE I ZASTOSOWANIE WYROBU

Templak kończyny górnej siatkowej przeznaczony jest dla pacjentów, którzy potrzebują wsparcia:

Do podtrzymania opatrunku gipsowego, jako zabezpieczenie i odciążenie po zdjęciu gipsu, W przypadku częściowego uszkodzenia więzadeł stawu ramennego, stawu barkowo-obojczykowego, stawu łokciowego, w niedowładach kończyny górnej.

Stabilizator może być stosowany zarówno na prawe jak i lewe ramię. Kończyna podtrzymywana jest za pomocą regulowanej taśmy naramiennej, która umożliwia precyzyjne ustawienie kończyny na odpowiedniej wysokości. Szeroki pas podtrzymujący zapewnia równomierne rozłożenie ciężaru ciała na całej długości pleców.

IV. PRZECIWWSKAZANIA

W przypadku wystąpienia zmian na skórze w miejscach przylegania temblaka, jej stosowanie jest ograniczone i możliwe tylko pod nadzorem lekarza.

Konieczna jest ocena przez lekarza prowadzącego zastosowania temblaka w przypadku osób z zaburzeniami pamięci różnego pochodzenia, osób z zaburzeniami psychicznymi i dzieci.

V. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYWANIA

Ten produkt może być używany tylko zgodnie z zaleceniem lekarza.

Sposób zakładania temblaka powinien być zademonstrowany przez wykwalifikowany personel medyczny, w obecności osoby, która sprawuje opiekę nad użytkownikiem (jeśli dotyczy).

Produkt i jego elementy należy wykorzystywać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

Produkt należy zakładać bezpośrednio na ciało lub odzież

Produkt należy utrzymywać w czystości zgodnie z zaleceniami podanymi w niniejszej instrukcji oraz na metce umieszczonej na wyrobie. Niewłaściwe czyszczenie i konserwacja wyrobu może prowadzić do powstawania zmian skórnych.

Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

VI. SPOSÓB UŻYCIA

Upewnij się, że rozmiar produktu jest odpowiednio dobrany,
Załóż ortezę na rękę, w razie potrzeby umieść kciuk w specjalnej pęteli
Przełóż pasek przez ramię i zapnij temblak na klamerkę,
Za pomocą regulatora dopasuj długość taśmy.

VII. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Zaleca się pranie wyrobu regularnie. Przed praniem należy zapiąć wszystkie połączenia rzepowe ortozy.

- Prać ręcznie w temperaturze do 30°C w wodzie z neutralnym, antyalergicznym detergentem,
- Płukać w letniej wodzie, nie stosować środków zmiękczających,
- Nie wybielać,
- Nie prasować,
- Nie czyścić chemicznie,
- Nie suszyć w suszarce bębnowej,
- Suszyć na płasko w zacienionym oraz przewiewnym miejscu – nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

VIII. KONIEC UŻYWANIA

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas kontroli temblaka, zgodnie z zaleceniami producenta. Po zakończeniu używania należy poddać wyrób utylizacji zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.

IX. PRZEWIDZIANY OKRES UŻYWANIA

Przewidziany okres używania temblaka to 5 lata. Ten czas może być dłuższy lub krótszy, zależnie od częstotliwości korzystania i konserwacji wyrobu.

X. GWARANCJA:

Producent zapewnia klienta, że przedmiot sprzedaży jest fabrycznie nowy oraz wysokiej jakości.
Wyrób objęty jest gwarancją (szczegółowe warunki gwarancji znajdują się na stronie internetowej Producenta).
Wyrób powinien być wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami w instrukcji używania.

XI. GLOSARIUSZ SYMBOLI

	Producent		Góra, nie przewracać
	Oznakowanie CE		Chronić przed wilgocią
	Numer katalogowy		Kruchy, obchodzić się ostrożnie
	Data produkcji		Nie przecinać
	Zajrzyj do instrukcji używania		Recykling
	Ostrzeżenie		Prać ręcznie
	Kod partii		Nie wybielać
	Wyrób medyczny		Nie prasować
	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu		Nie czyścić chemicznie
	Ilość		Nie suszyć bębnowo
	Numer modelu		

