

INTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Rozpórka nóg długa



PRZEZNACZENIE

Rozpórka przeznaczona jest dla osób wymagających unieruchomienia i stabilizacji nóg względem siebie i utrzymania ich w pozycji rozchylonej. Zabezpiecza przed ruchami odwodzenia, przywodzenia, rotacji w stawach biodrowych, w okresie pooperacyjnym po urazach kończyn dolnych oraz podtrzymuje nogi na całej ich długości w odpowiedniej pozycji, nie powodując ucisku.

CHARAKTERYSTYKA

Wykonana z nietoksycznej i antyalergicznego pianki poliuretanowej. Wymiary: rozm. S (31 x 46 cm), rozm. M (36 x 56 cm), rozm. L (41 x 64 cm). Rozpórka posiada pasy stabilizujące.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Czyścić delikatną szmatką zamoczoną w ciepłej wodzie z dodatkiem łagodnych środków do prania. Po wyczyszczeniu dobrze wysuszyć.

UWAGA! Nie zamaczać całej pianki w wodzie

PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować wilgotnego wyrobu bezpośrednio w kontakcie ze skórą.

Nie stosować w przypadku reakcji alergicznych skóry.

Nie stosować jeśli nastąpiło mechaniczne uszkodzenie (np. rozerwanie, pęknięcie).

Nie stosować inaczej niż zgodnie z przeznaczeniem.

OSTRZEŻENIA

Przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem lub specjalistą rehabilitantem odnośnie braku przeciwwskazań użytkowania produktu.

Wyrób należy dobrać odpowiednio do rozmiaru ciała.

Nie wystawiać produktu na działanie otwartego płomienia lub innych źródeł ognia, mogących wywołać zapłon.

Pianka wystawiona na działanie otwartego ognia gwałtownie się zapala.

Nie wystawiać produktu na długotrwałe działanie niskich temperatur (poniżej 5°C).

Opakowanie produktu nie jest zabawką.

UWAGA!

Piankę należy chronić przed światłem słonecznym, ponieważ pod wpływem nastonecznienia może ulec przebarwieniu. Przebarwienie pianki nie wpływa na jej właściwości fizyczne i mechaniczne.

GWARANCJA

Produkt objęty jest 12-miesięcznym okresem gwarancji. Powinien być wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami w instrukcji użytkowania. Gwarancja nie obejmuje usterek powstałych wskutek używania produktu niezgodnie z instrukcją obsługi, zaniedbań, dokonywania samodzielnych przeróbek lub zmian konstrukcyjnych. Do serwisu produkt należy dostarczyć czysty. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia, nabywca będzie obciążony kosztami realizacji reklamacji. Gwarancja jest realizowana na podstawie dowodu zakupu. Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień nabywcy wynikających z niezgodności towaru z umową.



Producent:

Reha Fund Sp. z o.o.
ul. Staniewicka 14,
03-310 Warszawa, Polska

e-mail: info@rehafund.pl
www.rehafund.pl