

INSTRUKCJA UŻYWANIA

Rozpórka nóg krótka



PRZEZNACZENIE

Rozpórka przeznaczona jest dla osób wymagających unieruchomienia i stabilizacji nóg względem siebie i utrzymania ich w pozycji rozchylonej. Zapobiega ruchom odwodzenia, przywodzenia i rotacji w stawach biodrowych po operacji. Przeznaczona również dla kobiet w ciąży lub w okresie poporodowym.

CHARAKTERYSTYKA

Wykonana z nietoksycznej i antyalergicznego pianki poliuretanowej. Wymiary: rozm. M (17,5 x 14 x 24 cm) oraz rozm. L (20 x 16,5 x 26 cm). Poszewka wykonana jest z dzianiny frotte.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Czyścić delikatną szmatką zamoczoną w ciepłej wodzie z dodatkiem łagodnych środków do prania.

Po wyczyszczeniu dobrze wysuszyć.

Nie zamaczać całej pianki w wodzie.

PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować wilgotnego wyrobu bezpośrednio w kontakcie ze skórą.

Nie stosować w przypadku reakcji alergicznych skóry.

Nie stosować jeśli nastąpiło mechaniczne uszkodzenie (np. rozerwanie, pęknięcie).

Nie stosować inaczej niż zgodnie z przeznaczeniem.

⚠️ OSTRZEŻENIA

Przed użyciem należy skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia odnośnie braku przeciwwskazań do używania wyrobu.

Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

Wyrób należy dobrać odpowiednio do rozmiaru ciała.

Nie wystawiać produktu na działanie otwartego płomienia lub innych źródeł ognia, mogących wywołać zapłon.

Pianka wystawiona na działanie otwartego ognia gwałtownie się zapala.

Nie wystawiać produktu na długotrwałe działanie niskich temperatur (poniżej 5°C).

Opakowanie wyrobu nie jest zabawką.

Piankę należy chronić przed światłem słonecznym, ponieważ pod wpływem nasłonecznienia może ulec przebarwieniu.

Przebarwienie pianki nie wpływa na jej właściwości fizyczne i mechaniczne.

GWARANCJA

Producent zapewnia klienta, że przedmiot sprzedaży jest fabrycznie nowy oraz wysokiej jakości.

Wyrób objęty jest gwarancją (szczegółowe warunki gwarancji znajdują się na stronie internetowej Producenta).

Wyrób powinien być wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami w instrukcji używania.

Glosariusz symboli

Producent	Ilość	Chronić przed wilgocią	Nie prać na mokro
Numer katalogowy	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu	Przechowywać z dala od światła słonecznego	Nie chlorować
Zajrzyj do instrukcji używania	Data produkcji	Dbaj o czystość	Nie prasować
Kod partii	Oznakowanie CE	Nie używać, jeśli opakowanie zostało uszkodzone	Nie czyścić chemicznie
Wyrób medyczny	Ostrzeżenie	Najniższa dopuszczalna temperatura	Suszyć w pozycji poziomej

Data wydania instrukcji używania: 10.2024 v.3



REHA FUND Sp. z o.o.
ul. Staniewicka 14
03-310 Warszawa, Polska
www.rehafund.pl

I/PP-12/3/16.10.2024