

INSTRUKCJA UŻYWANIA

Klin 60°



PRZEZNACZENIE

Klin 60° przeciwdroźnyw piankowy, przeznaczony dla osób wymagających wyższego ułożenia tułowia względem reszty ciała lub stabilizacji określonej pozycji np. ugięcia kolan, czy też pozycji bocznej.

CHARAKTERYSTYKA

Klin 60° wykonany z nietoksycznej i antyalergicznego pianki poliuretanowej. Wymiary 22,5 x 60 x 58 cm. Klin dostępny jest w opcji bez pokrowca i z pokrowcem bawełniano-poliestrowym.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Czyścić delikatną szmatką zamoczoną w ciepłej wodzie z dodatkiem łagodnych środków do prania. Po wyczyszczeniu dobrze wysuszyć. Nie namaczać całej pianki w wodzie.

PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować wilgotnego wyrobu bezpośrednio w kontakcie ze skórą. Nie stosować w przypadku reakcji alergicznych skóry. Nie stosować, jeżeli nastąpiło mechaniczne uszkodzenie (np. rozerwanie, pęknięcie). Nie stosować inaczej niż zgodnie z przeznaczeniem.

⚠️ OSTRZEŻENIA

Przed użyciem należy skonsultować celowość zastosowania, dobór wyrobu i sposób używania z lekarzem lub specjalistą rehabilitantem.

Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

Wyrób należy dobrać odpowiednio do rozmiaru ciała.

Nie wystawiać produktu na działanie otwartego płomienia lub innych źródeł ognia mogących wywołać zapłon. Pianka wystawiona na działanie otwartego ognia gwałtownie się zapala.

Nie wystawiać produktu na długotrwałe działanie niskich temperatur (poniżej 5°C).

Opakowanie wyrobu nie jest zabawką.

Nie wystawiać produktu na długotrwałe, bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ponieważ pod wpływem nasłonecznienia może ulec przebarwieniu. Przebarwienie pianki nie wpływa na jej właściwości..

GWARANCJA

Wyrób objęty jest 24-miesięcznym okresem gwarancji. Wyrób powinien być wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami w instrukcji używania. Gwarancja nie obejmuje usterek powstałych w skutek używania wyrobu niezgodnie z instrukcją używania, zaniedbań, dokonywania samodzielnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych. Do serwisu produkt należy dostarczyć czysty. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia, nabywca będzie obciążony kosztami realizacji i reklamacji. Gwarancja jest realizowana na podstawie dowodu zakupu. Zasięg terytorialny ochrony gwarancji obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień nabywcy wynikających z niezgodności towaru z umową.

Wyjaśnienie symboli

Producent	Data produkcji	Przechowywać z dala od światła słonecznego	Prasować w temperaturze maksymalnie 150°C
Numer katalogowy	Oznakowanie CE	Chronić przed wilgocią	Nie wybielać
Zajrzyj do instrukcji używania	Ostrzeżenie	Nie używać, jeśli opakowanie zostało uszkodzone	Prać w temperaturze max 60°C
Kod partii	Dbaj o czystość	Czyścić w chloroetylenie lub benzynie z wyższą ostrożnością	Dopuszczalne suszenie w suszarce bębnowej w normalnej temperaturze
Wyrób medyczny	Najniższa dopuszczalna temperatura		

Data wydania instrukcji używania: 05.2024 v.2



REHA FUND Sp. z o.o.
ul. Staniewicka 14
03-310 Warszawa, Polska
www.rehafund.pl

I/PL/PP-9/2/07.05.2024