

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA BALKONIK RF-100

Nr katalogowy:	RF-100
Max. bezpieczne obciążenie:	127 kg
Regulacja wysokości:	78,7 – 86,3 cm
Maksymalna szerokość:	64 cm
Waga:	1,94 kg
Głębokość:	51 cm



Model	RF-100/S	RF-100/BR	RF-100/N	RF-100/CZA
Kolor	szary	brązowy	niebieski	czarny

UWAGA!

Przed rozpoczęciem korzystania z balkonika należy uważnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami.

PRZEZNACZENIE

Balkonik przeznaczony jest dla osób starszych i niepełnosprawnych ze schorzeniami narządów ruchu lub z problemem pionizacji. Może być użytkowany wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Pomaga w codziennych czynnościach, np. wstawaniu z łóżka, chodzeniu, korzystaniu z toalety, spacerze.

ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Dla zachowania bezpieczeństwa należy przestrzegać poniższych zaleceń:

1. Przed użyciem balkonika każdorazowo sprawdź, czy:
 - balkonik ustawiony jest na prawidłową wysokość;
 - mechanizm blokujący i przyciski do regulacji wysokości są prawidłowo zabezpieczone;
 - wszystkie stopki balkonika są ustawione na taką samą wysokość;
 - nasadki na stopkach nie są zużyte – jeżeli tak to wymień je.
2. Nie przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia balkonika.
3. Podczas korzystania z balkonika zawsze zachowywać wyjątkową ostrożność. Należy unikać wszelkich potencjalnych zagrożeń takich jak: nierówne lub miękkie powierzchnie, przeszkody na drodze, mokra podłoga itp.
4. Korzystać wyłącznie z oryginalnych akcesoriów. Używanie nieoryginalnych części może spowodować nieodpowiednie przystosowanie balkonika w wyniku czego powstaje ryzyko upadku.
5. Nie przechować balkonika w temperaturze poniżej 0°C.
6. Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.



UWAGA! Nieprzestrzeganie powyższych zasad bezpiecznego użytkowania może doprowadzić do poważnych wypadków.



UWAGA! Skonsultuj się ze swoim lekarzem lub rehabilitantem w celu wyboru odpowiedniego balkonika i akcesoriów oraz sposobu korzystania, zgodnie z Twoimi możliwościami funkcjonalnymi i czynnościami dnia codziennego.



UWAGA! Poniższe zalecenie to zalecenie producenta, jednak powinno być ono skonsultowane z twoim lekarzem lub rehabilitantem.



UWAGA! Jeżeli balkonik jest prawidłowo wyregulowany, użytkownik powinien być w stanie zachować wyprostowaną postawę z lekko zgiętymi stawami łokciowymi. Wówczas podczas chodzenia ciężar ciała przejmuje rama balkonika.

SKŁADANIE I ROZKŁADANIE BALKONIKA


Aby rozłożyć:

1. Zdejmij zacisk bezpieczeństwa (rys. 4).

2. Trzymając górną ramę balkonika jedną ręką i przednią ruchomą poręcz drugą ręką, odciągaj je od siebie.
3. Upewnij się, że balkonik jest w pełni rozłożony.
4. Załóż zacisk bezpieczeństwa.

Aby złożyć:

1. Zdejmij zacisk bezpieczeństwa.
2. Chwyć górną ramę balkonika jedną ręką i pociągnij za drewnianą kulkę drugą ręką (rys.2).
3. Kiedy balkonik złoży się (rys. 3) załóż zacisk bezpieczeństwa.

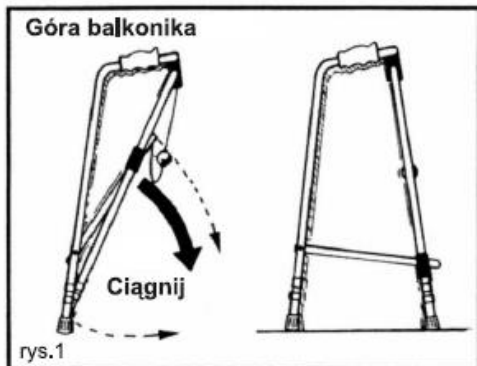

UWAGA! Dla zachowania bezpieczeństwa, aby zapobiec złożeniu się balkonika podczas użytkowania, zacisk bezpieczeństwa musi być założony na swoim miejscu.

REGULACJA WYSOKOŚCI BALKONIKA


Należy upewnić się, że balkonik jest ustawiony na odpowiednią wysokość dla użytkownika. Do regulacji balkonika może służyć obejmą blokującą lub przycisk blokujący.

Obejma blokująca:

1. Zdejmij obejmę - chwyć ją pomiędzy kciuk i palec wskazujący, następnie pociągnij na zewnątrz.
2. Przesuń stopkę w dół lub do góry, aby uzyskać żądaną wysokość.
3. Wetknij obejmę z powrotem w odpowiedni otwór.
4. Upewnij się, że obejmą prawidłowo zablokowała daną pozycję stopki.

Przycisk blokujący:

1. Weiśnij przycisk po obu stronach stopki.
2. Obróć lekko stopkę tak aby przycisk nie wyskoczył z powrotem na swoje miejsce.
3. Przesuń stopkę na żądaną wysokość, obróć ją lekko i zwolnij przycisk tak aby wszedł w odpowiednie otwory.
4. Upewnij się, że przycisk prawidłowo zablokował daną pozycję stopki.

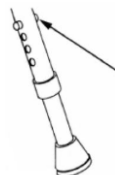

CZĘŚCI BALKONIKA



CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- 1. Zaleca się regularną kontrolę balkonika pod kątem wszelkich uszkodzeń czy widocznych oznak zużycia. Regularnie sprawdzaj czy:
 - na ramie nie pojawiły się pęknięcia lub złamania;
 - przycisk blokujący prawidłowo zabezpiecza ustawioną wysokość;
 - otwory w rurkach nie są powiększone lub wydłużone,
 - dolne nasadki nie uległy zużyciu – jeżeli tak, należy je wymienić;
 - żadne inne części balkonika nie są poluzowane lub uszkodzone.
- 2. Zaleca się regularne czyszczenie balkonika miękką szmatką i wodą z mydłem. Balkonik po wyczyszczeniu należy osuszyć miękką szmatką.

 **UWAGA!** Do czyszczenia balkonika nie wolno używać rozpuszczalników, wybielaczy czy środków ściągających.

 **UWAGA!** W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zdatności sprzętu do użycia skontaktuj się z serwisem producenta.

LISTA UŻYTYCH MATERIAŁÓW

Rama	aluminium
Uchwyt	PP (polipropylen)
Koła	EVA (polietylen-co-octan winylu) + PP (polipropylen)
Nasadka	guma
Przycisk blokujący	stal
Kulka	drewno

WYJAŚNIENIE SYMBOLI

	Producent
	Oznakowanie CE
	Numer referencyjny
	Data produkcji
	Zajrzyj do instrukcji używania
	Ostrzeżenie
	Numer serii
	Góra, nie przewracać

	Przechowywać w suchym miejscu
	Delikatne, obchodzić się ostrożnie


REHA FUND Sp. z o.o.

ul. Staniewicka 14, 03-310 Warszawa, Polska
tel.: +48 22 594 03 00, fax.: +48 22 594 03 07
e-mail: info@rehafund.pl www.rehafund.pl



Wer. 1.4
Wydano: 04/2023

**KARTA GWARANCYJNA
BALKONIK RF-100**

Model:	Numer seryjny:	Data sprzedaży:	Podpis i pieczęć sprzedawcy:

WARUNKI GWARANCJI

1. Producent zapewnia klienta, że przedmiot sprzedaży, na który jest wydana niniejsza karta gwarancyjna jest fabrycznie nowy oraz wysokiej jakości.
2. Balkonik jest objęty 24 miesięcznym okresem gwarancji od daty sprzedaży w karcie gwarancyjnej.
3. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji gwarancyjnej jest dostarczenie poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej wraz z dołączonym dowodem zakupu.
4. Ewentualne wady sprzętu zostaną usunięte przez firmę REHA FUND Sp. z o.o. lub autoryzowanych serwisantów pod warunkiem, sprzęt był wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami w instrukcji użytkowania.
5. Naprawa zostanie wykonana w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni, od daty przyjęcia sprzętu do punktu serwisowego.
6. Gwarancją nie są objęte:
 - czynności związane z konserwacją, czyszczeniem i regulacją opisane w instrukcji użytkowania;
 - części ulegające zużyciu podczas normalnego użytkowania;
 - mechaniczne i termiczne uszkodzenia np. wygięcia, zarysowania, połamania itp.
 - uszkodzenia powstałe wskutek używania sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi, zaniedbania, dokonania samodzielnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
7. Przed oddaniem sprzętu do autoryzowanych serwisantów należy go wyczyścić zgodnie z instrukcją użytkowania, tak aby nadawał się do wykonania przeglądu serwisowego.
8. Naprawy i wymiany części zamiennych powinny być wykonane przez autoryzowanych serwisantów firmy Reha Fund Sp. z o.o.
9. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego klient będzie obciążony kosztami przesyłki.
10. Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
11. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień klienta wynikających z niezgodności towaru z umową.

WYKAZ NAPRAW SERWISOWYCH (wypełnia serwis)

Lp.	Data zgłoszenia	Nr zlecenia	Opis wady/ Zakres naprawy	Data wykonania naprawy	Pieczęć i podpis serwisu
1.					
2.					