

INSTRUKCJA UŻYWANIA BALKONIK HARRY Z ŁAWECZKĄ I ZESTAWEM TOALETOWYM 133

I. WPROWADZENIE

Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy REHA FUND Sp. z o.o., czołowego dostawcy materiałów zaopatrzenia medycznego i artykułów rehabilitacyjnych na rynku polskim.

Instrukcja używania zawiera wskazówki i sugestie, których znajomość jest niezbędna do prawidłowego korzystania z wyrobu.



UWAGA! Przed użyciem wyrobu należy zapoznać się z instrukcją używania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z wyrobu, nieprzestrzeganie zasad bezpiecznego używania oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.

II. CHARAKTERYSTYKA

PARAMETRY TECHNICZNE

Nr katalogowy:	RF-133
Regulacja wysokości:	81-99 cm
Szerokość ramy:	52 cm
Szerokość zestawu toaletowego:	40 cm
Szerokość ławeczki:	41 cm
Wysokość siedziska:	46 cm
Max. bezpieczne obciążenie:	100 kg
Waga:	5,9 kg


ELEMENTY SKŁADOWE BALKONIKA



*Powyższe zdjęcia mają charakter poglądowy.

ŁAWECZKA I ZESTAW TOALETOWY

W skład balkonika wchodzi ławeczka (rys. 1) i zestaw toaletowy (rys. 2). Te elementy należy stosować w zależności od potrzeb użytkownika.

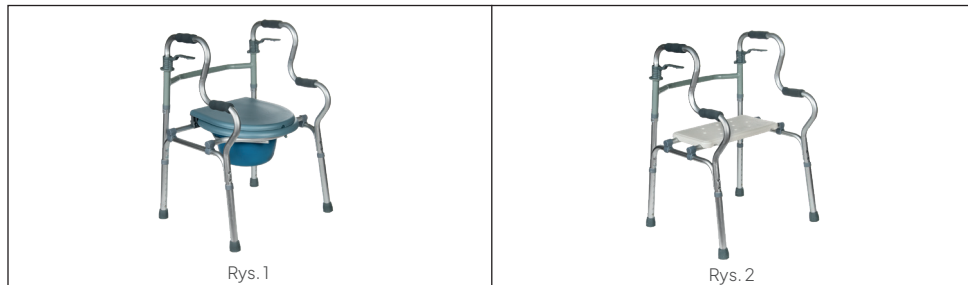

*Powyższe zdjęcia mają charakter poglądowy.

LISTA UŻYTYCH MATERIAŁÓW

Rama / balkonik rehabilitacyjny	stal + aluminium
Ławeczka	PE (polietylen) + PP (polipropylen)
Zestaw toaletowy	PE (polietylen) + PP (polipropylen)
Nasadki	TPR (guma termoplastyczna)
Uchwyty	pianka
Koła	PVC (polichlorek winylu)
Przycisk blokujący	stal

III. PRZEZNACZENIE I ZASTOSOWANIE WYROBU

Balkonik przeznaczony jest dla osób starszych i niepełnosprawnych ze schorzeniami narządów ruchu lub z problemem pionizacji. Może być używany wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Pomaga w codziennych czynnościach, np. wstawaniu z łóżka, chodzeniu, korzystaniu z toalety, spacerze.

IV. PRZECIWSKAZANIA

Przeciwwskazania do pionizacji, urazy i dysfunkcje kończyn górnych uniemożliwiające wspieranie się na balkoniku, urazy kończyn dolnych uniemożliwiające utrzymanie równowagi, zaburzenia koordynacji ruchowej, problemy z błędnikiem, niestabilność kręgosłupa.

V. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYWANIA

Dla zachowania bezpieczeństwa należy przestrzegać poniższych zaleceń:

1. Przed użyciem balkonika każdorazowo sprawdź czy:
 - balkonik ustawiony jest na prawidłową wysokość;
 - mechanizm blokujący i przyciski do regulacji wysokości są prawidłowo zabezpieczone;
 - wszystkie stopki balkonika są ustawione na taką samą wysokość;
 - nasadki na stopkach nie są zużyte – jeżeli tak to wymień je.
2. Nie przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia balkonika.
3. Podczas korzystania z balkonika zawsze zachowywać wyjątkową ostrożność. Należy unikać wszelkich potencjalnych zagrożeń takich jak: nierówne lub miękkie powierzchnie, przeszkody na drodze, mokra podłoga itp.
4. Korzystać wyłącznie z oryginalnych akcesoriów. Używanie nieoryginalnych części może spowodować nieodpowiednie przystosowanie balkonika w wyniku czego powstaje ryzyko upadku.
5. Nie przechować balkonika w temperaturze poniżej 0°C.
6. Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania



UWAGA! Nieprzestrzeganie powyższych zasad bezpiecznego używania może doprowadzić do poważnych wypadków.



UWAGA! Przed użyciem należy skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia odnośnie braku przeciwwskazań do używania wyrobu.



UWAGA! Jeżeli balkonik jest prawidłowo wyregulowany, użytkownik powinien być w stanie zachować wyprostowaną postawę z lekko zgiętymi stawami łokciowymi. Wówczas podczas chodzenia ciężar ciała przejmie rama balkonika.

VI. SPOSÓB UŻYWANIA

MONTAŻ

1. Produkt jest przeznaczony do samodzielnego montażu bez użycia narzędzi.
2. Naciśnij dźwignię blokującą na ramie / balkoniku rehabilitacyjnym (rys. 3).
3. Rozłóż pierwszy bok ramy / balkonika rehabilitacyjnego (rys. 4).
4. Rozłóż całą ramę / balkonik rehabilitacyjny (rys. 5).
5. W zależności od potrzeby, zamontuj zestaw toaletowy lub ławeczkę (rys. 6).
6. Wyreguluj wysokość (rys. 7).
7. Ustaw złożony produkt w odpowiednim miejscu (rys. 8).



Rys. 3



Rys. 4



Rys. 5



Rys. 6



Rys. 7



Rys. 8

*Powyższe zdjęcia mają charakter poglądowy.

FUNKCJE BALKONIKA

Balkonik posiada 3 funkcje:

- przestawną – ramę przestawia się w czasie chodzenia;
- z kołkami – dla ułatwienia na przednie nogi można zamontować koła, które są dostępne w standardzie; w czasie chodzenia ramę przesuwają się do przodu za pomocą kół;
- wspomaganie w czasie wstawania – rama balkonika posiada uchwyty na dwóch wysokościach.

REGULACJA WYSOKOŚCI

Możesz regulować wysokość za pomocą przycisków blokujących znajdujących się w nogach balkonika. Wciśnij przycisk blokujący jedną ręką, drugą przesunąć rękę do odpowiedniej wysokości. Zatrzasknij przycisk blokujący.

VII. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Zaleca się regularną kontrolę balkonika pod kątem wszelkich uszkodzeń czy widocznych oznak zużycia. Regularnie sprawdzaj czy:
 - na ramie nie pojawiły się pęknięcia lub załamania,
 - nasadki nie uległy zniszczeniu – jeżeli tak, należy je wymienić,
 - żadne inne części balkonika nie są poluzowane lub uszkodzone.
2. Zaleca się regularne czyszczenie balkonika miękką szmatką i wodą z mydłem. Balkonik po wyczyszczeniu należy osuszyć miękką szmatką. Wiaderko można dezynfekować na zimno np. etanolem.



UWAGA! Do czyszczenia balkonika nie wolno używać rozpuszczalników, wybielaczy czy środków ściernych.



UWAGA! W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zgodności sprzętu do użycia skontaktuj się z serwisem producenta.

VIII. KONIEC UŻYWANIA

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas kontroli balkonika zgodnie z zaleceniami producenta. Patrz punkt instrukcji: Czyszczenie i Konserwacja - należy niezwłocznie zaprzestać korzystania z wyrobu. Po zakończeniu używania należy poddać wyrób utylizacji zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.

IX. PRZEWIDZANY OKRES UŻYWANIA

Przewidziany okres używania balkonika to 5 lat. Ten czas może być dłuższy lub krótszy, zależnie od częstotliwości korzystania i konserwacji wyrobu.

X. GWARANCJA

Producent zapewnia klienta, że przedmiot sprzedaży jest fabrycznie nowy oraz wysokiej jakości. Wyrób objęty jest gwarancją (szczegółowe warunki gwarancji znajdują się na stronie internetowej Producenta). Wyrób powinien być wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami w instrukcji używania.

XI. GLOSARIUSZ SYMBOLI

	Producent		Ostrzeżenie
	Oznakowanie CE		Kod partii
	Numer katalogowy		Ilość
	Data produkcji		Góra, nie przewracać
	Zajrzyj do instrukcji używania		Chronić przed wilgocią
	Wyrób medyczny		Kruchy, obchodzić się ostrożnie
	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu		Przechowywać z dala od światła słonecznego



REHA FUND Sp. z o.o.
ul. Staniewicka 14,
03 – 310 Warszawa, Polska
www.rehafund.pl



I/RF-133/3/16.10.2024
Data wydania instrukcji używania:10/2024 v.3