

INSTRUKCJA UŻYWANIA AMBONKA DO CHODZENIA ATLANTA 141

I. WPROWADZENIE

Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy REHA FUND Sp. z o.o., czołowego dostawcy materiałów zaopatrzenia medycznego i artykułów rehabilitacyjnych na rynku polskim.

Instrukcja używania zawiera wskazówki i sugestie, których znajomość jest niezbędna do prawidłowego korzystania z wyrobu.



UWAGA! Przed użyciem wyrobu należy zapoznać się z instrukcją używania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z wyrobu, nieprzestrzeganie zasad bezpiecznego używania oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.


II. CHARAKTERYSTYKA

Nr katalogowy:	RF-141
Max. bezpieczne obciążenie:	100 kg
Szerokość:	64 cm
Długość:	73 cm
Regulacja wysokości:	113–135,5 cm
Waga:	10,8 kg

CZĘŚCI AMBONKI

Części ambonki zostały przedstawione na rysunku nr 1.

1. Stolik – blat podpierający.
2. Pokrętło.
3. Błokada koła.
4. Koło.
5. Rurka.
6. Oparcie.
7. Rama.

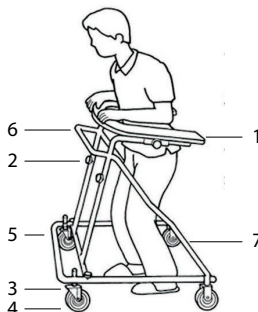

UWAGA! Przed rozpoczęciem korzystania z ambonki należy uważnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami.

III. PRZEZNACZENIE I ZASTOSOWANIE WYROBU

Ambonka do chodzenia przeznaczona jest dla osób starszych i niepełnosprawnych ze schorzeniami narządów ruchu lub wspomagająco podczas procesu pionizacji. Służy do pomocy podczas chodzenia oraz zwiększenia zdolności użytkownika do poruszania się bez obecności innej osoby. Może być używany wewnątrz pomieszczeń.

IV. PRZECIWSKAZANIA

Przeciwwskazania do pionizacji, urazy i dysfunkcje kończyn górnych uniemożliwiające wspieranie się na ambonce, urazy kończyn dolnych uniemożliwiające utrzymanie równowagi, zaburzenia koordynacji ruchowej, problemy z błędnikiem, niestabilność kręgosłupa.

V. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYWANIA

Dla zachowania bezpieczeństwa należy przestrzegać poniższych zaleceń:

1. Przed użyciem ambonki do chodzenia każdorazowo sprawdź czy:
 - ustawiona jest na prawidłową wysokość;
 - pokrętła do regulacji wysokości są prawidłowo zabezpieczone.

2. Nie przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia ambonki do chodzenia.
3. Podczas korzystania z ambonki do chodzenia zawsze zachowywać wyjątkową ostrożność. Należy unikać wszelkich potencjalnych zagrożeń takich jak: nierówne lub miękkie powierzchnie, przeszkody na drodze, mokra podłoga itp.
4. Korzystać wyłącznie z oryginalnych akcesoriów. Używanie nieoryginalnych części może spowodować nieodpowiednie przystosowanie ambonki do chodzenia w wyniku czego powstaje ryzyko upadku.
5. Nie przechowywać ambonki do chodzenia w temperaturze poniżej 0°C.
6. Wyrób przeznaczony dla jednej osoby. Wyrób do stosowania tylko obiema rękami.
7. Wyrób przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń, wyłącznie na suchych, równych i utwardzonych powierzchniach, bez ostrych krawędzi.
8. Dopuszcza się eksploatację ambonki do chodzenia dla osób o wadze ciała do 100 kg.
9. Nie wolno zawieszania ani przytwierdzenia przedmiotów (np. toreb, plecaków) na ramię wyrobu, w jakimkolwiek miejscu. Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować uszkodzeniem ciała (np. podczas upadku) i/lub wyrobu. Wytwórca nie odpowiada za szkody, które wynikną w niezastosowania się do ww. obostrzenia.
10. Zużyty sprzęt należy oddać do recyklingu.
11. Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.



UWAGA! Nieprzestrzeganie powyższych zasad bezpiecznego używania może doprowadzić do poważnych wypadków.



UWAGA! Przed użyciem należy skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia odnośnie braku przeciwwskazań do używania wyrobu.





UWAGA! Po regulacji wysokości ambonki upewnij się, że lewa i prawa strona jest ustawiona na tej samej wysokości, a także sprawdź, czy pokrętko jest zablokowane, aby uniknąć wypadków spowodowanych nagłym upadkiem.

Jeżeli ambonka do chodzenia jest prawidłowo wyregulowana, użytkownik powinien być w stanie zachować wyprostowaną postawę z lekko zgiętymi nogami i opartymi rękami na blacie ambonki ze zgiętymi stawami łokciowymi, z lekko opuszczonymi barkami. Wówczas podczas chodzenia ciężar ciała przejmie rama ambonki.

VI. SPOSÓB UŻYWANIA

1. Wstań i ustaw wysokość blatu podpierającego na odpowiednim poziomie (rys. 2).
2. Aby wyregulować wysokość blatu podpierającego, odkręć pokrętko, ustaw odpowiednią wysokość, zakręć pokrętko (rys. 3).
3. Podczas czynności chodzenia utrzymuj swoje ciało w środku ramy ambonki. Pochyl się lekko do przodu opierając ciężar ciała na ambonce (rys. 4).

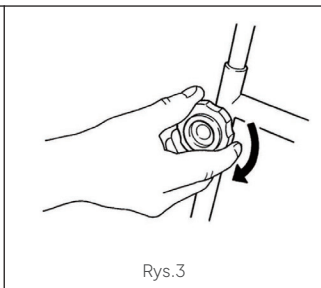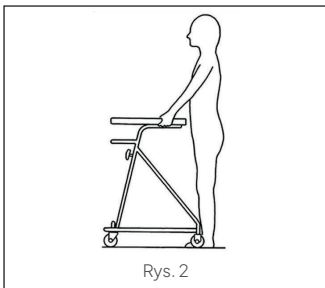

VII. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

4. Elementy z tworzywa oraz rurki czyścić miękką gąbką, zwilżoną w łagodnym środku czyszczącym, po czyszczeniu przetrzeć wilgotną szmatką, wypolerować do sucha.
5. Koniecznie na bieżąco usuwać zanieczyszczenia w postaci włosów i nici z ruchomych elementów ambonki do chodzenia - koła.
6. Wszelkie uszkodzenia, które wynikną ze złego czyszczenia, konserwacji wyrobu, nie podlegają naprawie gwarancyjnej.
7. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w pomieszczeniach suchych, zamkniętych, wolnych od oparów chemicznych (z dala od sztucznych źródeł ciepła typu: kaloryfer, grzejnik, piec).
8. Przechowywanie w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza (łazienka, pralnia, piwnice itp. lub na wolnym powietrzu połączone z brakiem higieny zwłaszcza przy dłuższym przechowywaniu, będą przyczyną utraty parametrów użytkowych i estetycznych balnikownika a tym samym gwarancji na wyrób.
9. Kontrolę stanu technicznego wyrobu użytkownik przeprowadza nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.



UWAGA! Do czyszczenia ambonki nie wolno stosować do czyszczenia środków ściernych, mocnych detergentów, benzyny, rozpuszczalników, środków powierzchniowo czynnych wchodzących w reakcję z aluminium.



UWAGA! W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do przydatności sprzętu do użycia skontaktuj się z serwisem producenta..

VIII. KONIEC UŻYWANIA

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas kontroli ambonki zgodnie z zaleceniami producenta. Patrz punkt instrukcji: Czyszczenie i Konserwacja – należy niezwłocznie zaprzestać korzystania z wyrobu. Po zakończeniu używania należy poddać wyrób utylizacji zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.

IX. PRZEWIDZANY OKRES UŻYWANIA

Przewidziany okres używania ambonki to 5 lat. Ten czas może być dłuższy lub krótszy, zależnie od częstotliwości korzystania i konserwacji wyrobu.

X. GWARANCJA

Producent zapewnia klienta, że przedmiot sprzedaży jest fabrycznie nowy oraz wysokiej jakości. Wyrób objęty jest gwarancją (szczegółowe warunki gwarancji znajdują się na stronie internetowej Producenta). Wyrób powinien być wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami w instrukcji używania.

XI. GLOSARIUSZ SYMBOLI

	Producent		Ostrzeżenie
	Oznakowanie CE		Kod partii
	Numer katalogowy		Ilość
	Data produkcji		Góra, nie przewracać
	Zajrzyj do instrukcji używania		Chronić przed wilgocią
	Wyrób medyczny		Kruchy, obchodzić się ostrożnie
	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu		Przechowywać z dala od światła słonecznego



REHA FUND Sp. z o.o.
ul. Staniewicka 14,
03 – 310 Warszawa, Polska
www.rehafund.pl



I/RF-141/03.10.2024
Data wydania instrukcji używania 10.2024 v.2

