

INSTRUKCJA UŻYWANIA KULA PACHOWA

Nr. katalogowy	RF-230	RF-230
Numer model	RF-230/M	RF-230/L
Max. bezpieczne obciążenie:	113 kg	113 kg
Waga:	1,5 kg	1,7 kg
Max. bezpieczne obciążenie:	114–134 cm	134–155 cm



Przed rozpoczęciem korzystania z kuli pachowej należy uważnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami.

PRZEZNACZENIE

Kule pachowe przeznaczone są do poruszania się, asekuracji podczas chodzenia, do podpierania się, utrzymania równowagi i przenoszenia ciężaru ciała w przypadkach schorzeń urazowo – ortopedycznych kończyn dolnych przy zakazie pełnego obciążenia kończyny. Przeznaczone dla pacjentów po urazach w obrębie układu ruchu, zabiegach, złamaniach, z niedowładem kończyn dolnych.

ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Dla zachowania bezpieczeństwa należy przestrzegać poniższych zaleceń:

1. Nie przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia.
2. Podczas korzystania z kuli zawsze zachowywać wyjątkową ostrożność. Należy unikać wszelkich potencjalnych zagrożeń takich jak: nierówne lub miękkie powierzchnie, przeszkody na drodze, mokra podłoga itp.
3. Korzystać wyłącznie z oryginalnych akcesoriów. Używanie nieoryginalnych części może spowodować nieodpowiednie przystosowanie kuli w wyniku czego powstaje ryzyko upadku.
4. Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

REGULACJA

Wysokości

Aby wyregulować kulę na pożądaną wysokość należy:

- wcisnąć przycisk zwalniający na dole kuli i lekko przekręcić dolną rurkę;
- ustawić pożądaną wysokość;
- obrócić dolną rurkę tak, aby przycisk zablokował się w otworach;



Należy dokładnie sprawdzić czy przycisk jest zablokowany w otworach.

Położenia rąkojeści

Aby wyregulować rąkojeść na pożądaną wysokość:

- odkręcić nakrętkę motylkową przy rąkojeści i wyciągnąć śrubę mocującą;
- ustawić rąkojeść na odpowiedniej wysokości;
- wsadzić w odpowiednie miejsca śrubę mocującą tak, aby przeszła przez obydwa otwory mocujące na ramie kuli. Przykręć motylkową nakrętkę do momentu aż wyczuwalny będzie opór.

Należy dokładnie sprawdzić czy rąkojeść jest prawidłowo zablokowana w otworach mocujących.

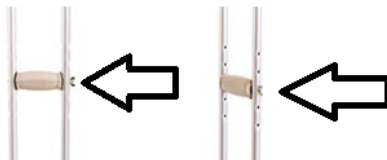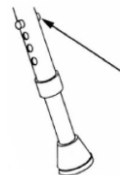

Poniższe zalecenia to zalecenia producenta, jednak powinno być ono skonsultowane z twoim lekarzem lub rehabilitantem.

Wysokość kuli powinna być tak dopasowana do użytkownika, aby mógł on zachować wyprostowaną postawę z lekko zgiętą nogą w stawie kolanowym. Rękojeść powinna być wyregulowana tak, aby ręka pozostawała lekko zgięta w stawie łokciowym a właściwy ciężar ciała opierał się na rękach a nie na dołach pachowych.

CZYSZCZENIE

1. Części z tworzywa i pianki należy czyścić tylko ciepłą wodą z dodatkiem mydła.
2. Części metalowe należy czyścić suchą szmatką.



Do czyszczenia kuli nie wolno używać rozpuszczalników, wybielaczy czy środków ścierających.

KONSERWACJA

Zaleca się regularną kontrolę kuli, aby upewnić się czy:

1. nie pojawiły się pęknięcia lub załamania;
2. przycisk blokujący prawidłowo zabezpiecza ustawioną wysokość;
3. otwory w rurce nie są powiększone lub wydłużone;
4. nie ma luzów na rękojeści i wsporniku pachowym;
5. dolna nasadka nie uległa zużyciu – jeżeli tak, należy ją wymienić.




W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do przydatności kuli do użycia skontaktuj się z serwisem producenta.



Kula pachowa nie jest wskazana dla osób mających problemy z pachowymi węzłami chłonnymi

ELEMENTY KULI

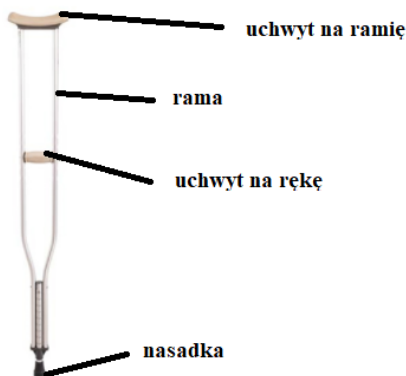

LISTA UŻYTYCH MATERIAŁÓW

Rama	aluminium
Nasadka	PVC (polichlorek winylu) + żelazo
Uchwyt na ramię	PP (polipropylen) + pianka
Uchwyt na rękę	PP (polipropylen) + pianka

WYJAŚNIENIE SYMBOLI

	Producent		Kod partii
	Oznakowanie CE		Ilość
	Numer katalogowy		Ostrzeżenie
	Numer modelu		Chronić przed wilgocią
	Data produkcji		Góra, nie przewracać
	Zajrzyj do instrukcji używania		Kruchy, obchodzić się ostrożnie
	Wyrób medyczny		



REHA FUND Sp. z o.o.
ul. Staniewicka 14, 03-310 Warsaw, Poland
www.rehafund.pl



I/PL/RF-230/2/06.06.2024
Data wydania instrukcji używania 06.2024 v.2

NOTATKI

**KARTA GWARANCYJNA
KULA PACHOWA**

Model:	Numer seryjny:	Data sprzedaży:	Podpis i pieczętka sprzedawcy:

WARUNKI GWARANCJI

1. Producent zapewnia klienta, że przedmiot sprzedaży, na który jest wydana niniejsza karta gwarancyjna jest fabrycznie nowy oraz wysokiej jakości.
2. Wyrób jest objęty 24 miesięcznym okresem gwarancji od daty sprzedaży w karcie gwarancyjnej.
3. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji gwarancyjnej jest dostarczenie poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej wraz z dołączonym dowodem zakupu.
4. Ewentualne wady wyrobu zostaną usunięte przez firmę REHA FUND Sp. z o.o. lub autoryzowanych serwisantów pod warunkiem, że wyrób był wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami w instrukcji używania.
5. Naprawa zostanie wykonana w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni, od daty przyjęcia wyrobu do punktu serwisowego.
6. Gwarancją nie są objęte:
 - czynności związane z konserwacją, czyszczeniem i regulacją opisane w instrukcji używania;
 - części ulegające zużyciu podczas normalnego użytkowania;
 - mechaniczne i termiczne uszkodzenia np. wygięcia, zarysowania, połamania itp.;
 - uszkodzenia powstałe wskutek używania sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi, zaniedbania, dokonania samodzielnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
7. Przed oddaniem wyrobu do autoryzowanych serwisantów należy go wyczyścić zgodnie z instrukcją używania, tak aby nadawał się do wykonania przeglądu serwisowego.
8. Naprawy i wymiany części zamiennych powinny być wykonane przez autoryzowanych serwisantów firmy REHA FUND Sp. z o.o.
9. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego klient będzie obciążony kosztami przesyłki.
10. Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
11. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień klienta wynikających z niezgodności towaru z umową.

WYKAZ NAPRAW SERWISOWYCH (wypełnia serwis)

Lp.	Data zgłoszenia	Nr zlecenia	Opis wady/ Zakres naprawy	Data wykonania naprawy	Pieczęć i podpis serwisu
1.					
2.					