

INSTRUKCJA UŻYWANIA CHODZIK CZTEROKOŁOWY DENVER PREMIUM RF-615



I. WPROWADZENIE

Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy REHA FUND Sp. z o.o., czołowego dostawcy materiałów zaopatrzenia medycznego i artykułów rehabilitacyjnych na rynku polskim.


Instrukcja używania zawiera wskazówki i sugestie, których znajomość jest niezbędna do prawidłowego korzystania z wyrobu.



UWAGA! Przed użyciem wyrobu należy zapoznać się z instrukcją używania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z wyrobu, nieprzestrzeganie zasad bezpiecznego używania oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.

II. CHARAKTERYSTYKA

Nr katalogowy:	RF-615
Max. bezpieczne obciążenie:	136 kg
Regulacja wysokości uchwytów:	82-93 cm
Szerokość po rozłożeniu:	61 cm
Szerokość po złożeniu:	23 cm
Całkowita długość:	69 cm
Średnica koła:	20 cm
Waga:	7,5 kg

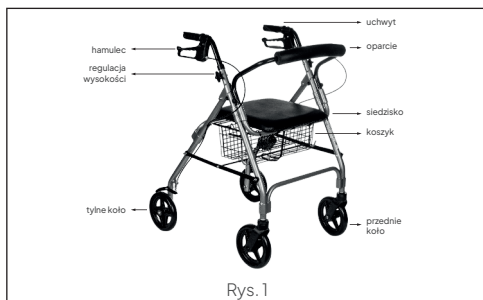

ELEMENTY CHODZIKA

Elementy chodzika są przedstawione na rys. nr 1.

LISTA UŻYTYCH MATERIAŁÓW

Rama	aluminium
Koła	PVC (polichlorek winylu) + PP (polipropylen)
Uchwyty	PVC (polichlorek winylu)
Koszyk	Stal
Przedni widelec	PP (polipropylen)
Hamulec	PP (polipropylen) + aluminium + stal

III. PRZEZNACZENIE I ZASTOSOWANIE WYROBU

Chodzik przeznaczony jest do pomocy dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, które wymagają wsparcia podczas wstawania, stania i chodzenia. Umożliwia samodzielną realizację większości codziennych czynności ruchowych. Może być używany w pomieszczeniach i na zewnątrz.

IV. PRZECIWSKAZANIA

Przeciwwskazania do pionizacji, urazy i dysfunkcje kończyn górnych uniemożliwiające wspieranie się na chodziku, urazy kończyn dolnych uniemożliwiające utrzymanie równowagi, zaburzenia koordynacji ruchowej, problemy z błędnikiem, niestabilność kręgosłupa.

V. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYWANIA

Dla zachowania bezpieczeństwa należy przestrzegać poniższych zaleceń:

1. Zawsze przed użyciem chodzika upewnić się, że jest on prawidłowo zablokowany w pozycji rozłożonej. Nigdy nie używaj chodzika do poruszania się, gdy jest złożony!
2. Nie przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia chodzika.
3. Nie przewozić w koszyku elementów mocno wystających poza jego obszar, ponieważ może to wpłynąć na stabilność chodzika.
4. Podczas korzystania z chodzika zawsze zachować wyjątkową ostrożność. Należy unikać wszelkich potencjalnych zagrożeń takich jak: nierówne lub miękkie powierzchnie, przeszkody na drodze, mokra podłoga itp. Stosować na różnych i twardych powierzchniach.
5. Korzystać wyłącznie z oryginalnych akcesoriów. Używanie nieoryginalnych części może spowodować nieodpowiednie przystosowanie chodzika w wyniku czego powstaje ryzyko upadku.
6. Korzystanie z chodzika w środowisku o dużej wilgotności (prysznic, basen itp.) może wywołać korozję jego ruchomych elementów, co w efekcie może spowodować uszkodzenie chodzika.
7. Nie korzystać z chodzika podczas chodzenia po schodach oraz schodach ruchomych.
8. Nie przechowywać chodzika w temperaturze poniżej 0°C. Nie wystawiać chodzika na długi czas w temperaturze powyżej 40°C, ponieważ może to spowodować przegrzanie elementów chodzika i poparzenie użytkownika.
9. Zawsze należy przestrzegać minimalnej i maksymalnej dopuszczalnej wysokości rur przesuwnych.
10. Nie wieszaj toreb ani worków na uchwytach – niebezpieczeństwo przewrócenia!
11. Użyj hamulca głównego na stromych powierzchniach.
12. Jeśli zbyt mocno oprzesz się o uchwyty, chodzik może przechylić się do tyłu.
13. Używanie chodzika do celów innych niż chodzenie, takich jak transport ciężkich ładunków, jest nieodpowiednie i niebezpieczne.
14. Nie stosować jako zamiennik wózka inwalidzkiego.
15. Nie używać na pochyłym terenie.
16. Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.



UWAGA! Nieprzestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa może doprowadzić do poważnych wypadków.



UWAGA! Przed użyciem należy skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia odnośnie braku przeciwwskazań do używania wyrobu



UWAGA! Jeżeli chodzik jest prawidłowo wyregulowany, użytkownik powinien być w stanie zachować wyprostowaną postawę z lekko zgiętymi stawami łokciowymi, wówczas podczas chodzenia część ciężaru ciała przejmie chodzik.



UWAGA! Przed korzystaniem z chodzika sprawdź czy hamulce działają prawidłowo i czy są dobrze wyregulowane. Upewnij się, że hamulce są zablokowane, gdy użytkownik siedzi na siedzisku. Na działanie hamulców może wpływać ścieranie kół.

VI. SPOSÓB UŻYWANIA

MONTAŻ CHODZIKA:

1. Wyciągnij z kartonu wszystkie części: oparcie, uchwyt z ręką, ramę chodzika oraz koszyk.
2. Otwórz ramę chodzika. Przyłóż do ramy oparcie i sprawdź, czy otwory do montowania na ramie i oparciu są widoczne. Wkręć śruby montujące.
3. Włóż do ramy uchwyty z ręką i ustaw odpowiednią wysokość rączek. Wkręć motylki mocujące.

SKŁADANIE I ROZKŁADANIE CHODZIKA

Aby rozłożyć:

1. Pociągnij w dół siedzisko do momentu aż rama całkowicie się rozłoży i poczujesz opór.
2. Zamontuj koszyk i przykryj go siedziskiem.

Aby złożyć:

1. Podnieś siedzisko i wyjmij koszyk.
2. Złóż ramę ciągnąc siedzisko do góry.

HAMULCE

1. Podczas ruchu hamulce można włączyć poprzez dociśnięcie uchwyty hamulca do rączki chodzika. Każdy hamulec włącza się niezależnie.
2. Każdy z hamulców można zablokować – aby to uczynić, należy pchnąć uchwyt hamulca do dołu. Aby zwolnić zablokowany hamulec należy pociągnąć uchwyt hamulca do góry.

REGULACJA WYSOKOŚCI RĄCZKI

- 1. Wysokość rączek można dostosować do użytkownika.
- 2. Wykręć motylki mocujące z ramy po prawej i lewej stronie.
- 3. Pociągnij rurkę w górę lub w dół do momentu osiągnięcia pożądanej wysokości.
- 4. Przykręć motylki mocujące.

KOSZYK

- 1. Koszyk można zamontować w środku ramy oraz na przodzie ramy. Koszyk jest odczepiany, co ułatwia transport i czyszczenie. Maksymalne obciążenie koszyka to 5 kg.

VII. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- 1. Zaleca się regularną kontrolę chodzika pod kątem wszelkich uszkodzeń czy widocznych oznak zużycia. Regularnie sprawdzaj czy:
 - na ramie nie pojawiły się pęknięcia lub załamania;
 - śruby są prawidłowo dokręcone;
 - przyciski blokujące prawidłowo zabezpieczają ustawioną wysokość rączek;
 - przewody hamulców nie są postrzępione;
 - hamulce są prawidłowo wyregulowane;
 - żadne inne części chodzika nie są poluzowane lub uszkodzone.



UWAGA! Jeśli zachodzi taka konieczność, należy wymienić lub wyregulować odpowiednie części. W razie potrzeby należy nasmarować części mechaniczne.



UWAGA! Zaleca się regularne czyszczenie chodzika miękką szmatką i wodą z mydłem. Chodzik po wyczyszczeniu należy osuszyć miękką szmatką. Do czyszczenia chodzika nie wolno używać rozpuszczalników, wybielaczy czy środków ściągających. Urządzenie można dezynfekować alkoholem lub pochodnymi, ale o niskim stężeniu.

VIII. KONIEC UŻYWANIA

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas kontroli chodzika zgodnie z zaleceniami producenta. Patrz punkt instrukcji: Czyszczenie i Konserwacja – należy niezwłocznie zaprzestać korzystania z wyrobu. Po zakończeniu używania należy poddać wyrób utylizacji zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.

IX. PRZEWIDZANY OKRES UŻYWANIA

Przewidzany okres używania chodzika to 5 lat. Ten czas może być dłuższy lub krótszy, zależnie od częstotliwości korzystania i konserwacji wyrobu.

X. GWARANCJA

Producent zapewnia klientu, że przedmiot sprzedaży jest fabrycznie nowy oraz wysokiej jakości. Wyrób objęty jest gwarancją (szczegółowe warunki gwarancji znajdują się na stronie internetowej Producenta). Wyrób powinien być wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami w instrukcji używania.

XI. GLOSARIUSZ SYMBOLI

	Producent		Ostrzeżenie
	Oznakowanie CE		Kod partii
	Numer katalogowy		Ilość
	Data produkcji		Góra, nie przewracać
	Zajrzyj do instrukcji używania		Chronić przed wilgocią
	Wyrób medyczny		Kruchy, obchodzić się ostrożnie
	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu		Przechowywać z dala od światła słonecznego



REHA FUND Sp. z o.o.
ul. Staniewicka 14,
03 – 310 Warszawa, Polska
www.rehafund.pl



I//RF-615/2/17.10.2024
Data wydania instrukcji używania 10.2024 v.2

