

**INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
CHODZIK TRZYKOŁOWY HELSINKI PREMIUM 621**

Nr katalogowy:	RF-621
Max. bezpieczne obciążenie:	110 kg
Regulacja wysokości uchwytów:	82 – 97 cm
Szerokość po rozłożeniu:	56 cm
Szerokość po złożeniu:	25 cm
Całkowita długość:	62 cm
Średnica koła:	20 cm
Grubość opony koła:	3,2 cm
Średnica rurki ramy:	2,2 cm
Grubość rurki ramy:	1,4 mm
Waga:	5,8 kg



UWAGA! Przed rozpoczęciem korzystania z chodzika należy uważnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami.

PRZEZNACZENIE

Chodzik przeznaczony jest do pomocy dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, które wymagają wsparcia podczas wstawania, stania i chodzenia. Umożliwia samodzielną realizację większości codziennych czynności ruchowych. Może być użytkowany w pomieszczeniach i na zewnątrz.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Dla zachowania bezpieczeństwa należy przestrzegać poniższych zaleceń:

1. Zawsze przed użyciem chodzika upewnić się, że jest on prawidłowo zablokowany w pozycji rozłożonej.
2. Nie przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia chodzika.
3. Nie przewozić w torbie elementów mocno wystających poza jego obszar, ponieważ może to wpłynąć na stabilność chodzika.
4. Podczas korzystania z chodzika zawsze zachować wyjątkową ostrożność. Należy unikać wszelkich potencjalnych zagrożeń takich jak: nierówne lub miękkie nawierzchnie, przeszkody na drodze, mokra podłoga itp.
5. Korzystać wyłącznie z oryginalnych akcesoriów. Używanie nieoryginalnych części może spowodować nieodpowiednie przystosowanie chodzika, w wyniku czego powstaje ryzyko upadku.
6. Korzystanie z chodzika w środowisku o dużej wilgotności (prysznic, basen itp.) może wywołać korozję jego ruchomych elementów, co w efekcie może spowodować uszkodzenie chodzika.
7. Nie korzystać z chodzika podczas chodzenia po schodach.
8. Nie przechowywać chodzika w temperaturze poniżej 0°C.
9. Zawsze należy przestrzegać minimalnej i maksymalnej dopuszczalnej wysokości rur przesuwnych.
10. Nie wieszaj toreb ani worków na uchwytach - niebezpieczeństwo przewrócenia!
11. Nigdy nie używaj chodzika do poruszania się, gdy jest złożony!
12. Jeśli zbyt mocno oprzesz się o uchwyty, chodzik może przechylić się do tyłu.
13. Używanie chodzika do celów innych niż chodzenie, takich jak transport ciężkich ładunków, jest nieodpowiednie i niebezpieczne. Przed użyciem upewnij się, że chodzik jest zablokowany w pozycji otwartej. Nie używaj na schodach lub schodach ruchomych, a także na stronnych powierzchniach.
14. Upewnij się, że wszystkie śruby, nakrętki i śruby są dobrze dokręcone.
15. Sprawdź, czy wszystkie koła są w dobrym stanie.
16. Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.



UWAGA! Nieprzestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa może doprowadzić do poważnych wypadków.



UWAGA! Skonsultuj się ze swoim lekarzem lub rehabilitantem w celu ustalenia odpowiedniego sposobu korzystania z chodzika, zgodnie z Twoimi możliwościami funkcjonalnymi i czynnościami dnia codziennego.



UWAGA! Poniższa informacja to zalecenie producenta, jednak powinno być ono skonsultowane z twoim lekarzem lub rehabilitantem.




UWAGA! Jeżeli chodzik jest prawidłowo wyregulowany, użytkownik powinien być w stanie zachować wyprostowaną postawę z lekko zgiętymi stawami łokciowymi, wówczas podczas chodzenia część ciężaru ciała przejmie chodzik.

ELEMENTY CHODZIKA I MONTAŻ

- 1. Elementy chodzika są przedstawione na rys. nr 1.
- 2. Rozłóż ramę chodzika i sprawdź czy poprzeczka stabilizująca jest zablokowana (rys. 2).
- 3. Odkręć śrubę motylkową znajdującą się na ramie uchwyty (rys. 3) i wyjmij śrubę mocującą (rys. 4), ustaw uchwyt na odpowiedniej wysokości.
- 4. Zamontuj na ramie torbę za pomocą zatrzasków (rys. 5).
- 5. Zamontuj koszyk na hakach (rys. 6).
- 6. Naciśnij hamulec. Koła powinny się zablokować (rys. 7).



UWAGA! Mechanizm hamulcowy koła tylnego musi być skierowany w stronę użytkownika (na zewnętrzną stronę koła).

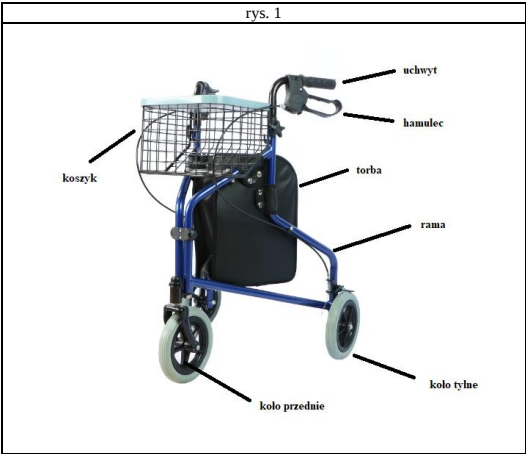

rys. 2	rys. 3	rys. 4
rys. 5	rys. 6	rys. 7

SKŁADANIE I ROZKŁADANIE CHODZIKA

Aby rozłożyć:

- 1. Ciągnij uchwyty na zewnątrz.
- 2. Zablokuj poprzeczkę stabilizującą.
- 3. Zamontuj torbę i koszyk na ramie.

Aby złożyć:

- 1. Wyjmij torbę i koszyk z ramy.
- 2. Odblokuj poprzeczkę stabilizującą.
- 3. Ciągnij uchwyty do wewnątrz.

HAMULCE

- 1. Podczas ruchu hamulce można włączyć poprzez docisnięcie uchwytu hamulca do rączki chodzika. Każdy hamulec włącza się niezależnie.
- 2. Każdy z hamulców można zablokować - aby to uczynić, należy pchnąć uchwyt hamulca do dołu. Aby zwolnić zablokowany hamulec należy pociągnąć uchwyt hamulca do góry.



UWAGA! Przed korzystaniem z chodzika sprawdź czy hamulce działają prawidłowo i czy są dobrze wyregulowane.

REGULACJA WYSOKOŚCI RĄCZKI

- 1. Wysokość rączek można dostosować do użytkownika.
- 2. Wykręć śrubę motylkową na ramie po prawej i po lewej stronie, a następnie wyjmij śruby mocujące.
- 3. Ustaw wysokość rurki na odpowiedniej wysokości.
- 4. Włóż śruby mocujące i wkręć śruby motylkowe.

TORBA I KOSZYK

Torba i koszyk są zamontowane na wspornikach znajdujących się na ramie chodzika.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Zaleca się regularną kontrolę chodzika pod kątem wszelkich uszkodzeń czy widocznych oznak zużycia. Regularnie sprawdzaj czy:

- na ramie nie pojawiły się pęknięcia lub załamania;
- przyciski blokujące prawidłowo zabezpieczają ustawioną wysokość rączek;
- przewody hamulców nie są postrzępione;
- hamulce są prawidłowo wyregulowane;
- żadne inne części chodzika nie są poluzowane lub uszkodzone.



UWAGA! Jeśli zachodzi taka konieczność, należy wymienić lub wyregulować odpowiednie części.

Zaleca się regularne czyszczenie chodzika miękką szmatką i wodą z mydłem. Chodzik po wyczyszczeniu należy osuszyć miękką szmatką.



UWAGA! Do czyszczenia chodzika nie wolno używać rozpuszczalników, wybielaczy czy środków ściernych.

LISTA UŻYTYCH MATERIAŁÓW

Rama	aluminium
Koła	PP (polipropylen) + PVC (polichlorek winylu)
Uchwyty	PE (polietylen)
Koszyk	Stal + PE (polietylen)
Przedni widelec	Stal
Torba na zakupy	PVC (polichlorek winylu)
Hamulec	PP (polipropylen) + aluminium + stal

WYJAŚNIENIE SYMBOLI

	Producent
	Oznakowanie CE
	Numer referencyjny
	Data produkcji
	Zajrzyj do instrukcji używania
	Ostrzeżenie
	Numer serii
	Góra, nie przewracać
	Przechowywać w suchym miejscu
	Delikatne, obchodzić się ostrożnie



REHA FUND Sp. z o.o.

ul. Staniewicka 14, 03-310 Warszawa, Polska
tel.: +48 22 594 03 00, fax.: +48 22 594 03 07
e-mail: info@rehafund.pl www.rehafund.pl



Wer. 1.2
Wydano: 11/2021

KARTA GWARANCYJNA
CHODZIK TRZYKOŁOWY HELSINKI PREMIUM 621

Model:	Numer seryjny:	Data sprzedaży:	Podpis i pieczętka sprzedawcy:

WARUNKI GWARANCJI

1. Producent zapewnia klienta, że przedmiot sprzedaży, na który jest wydana niniejsza karta gwarancyjna jest fabrycznie nowy oraz wysokiej jakości.
2. Chodzik jest objęty 24 miesięcznym okresem gwarancji od daty sprzedaży w karcie gwarancyjnej.
3. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji gwarancyjnej jest dostarczenie poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej wraz z dołączonym dowodem zakupu.
4. Ewentualne wady sprzętu zostaną usunięte przez firmę REHA FUND Sp. z o.o. lub autoryzowanych serwisantów pod warunkiem, że sprzęt był wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami w instrukcji użytkowania.
5. Naprawa zostanie wykonana w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni, od daty przyjęcia sprzętu do punktu serwisowego.
6. Gwarancją nie są objęte:
 - czynności związane z konserwacją, czyszczeniem i regulacją opisane w instrukcji użytkowania;
 - części ulegające zużyciu podczas normalnego użytkowania;
 - mechaniczne i termiczne uszkodzenia np. wygięcia, zarysowania, połamania itp.;
 - uszkodzenia powstałe wskutek używania sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi, zaniedbania, dokonania samodzielnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
7. Przed oddaniem sprzętu do autoryzowanych serwisantów należy go wyczyścić zgodnie z instrukcją użytkowania, tak aby nadawał się do wykonania przeglądu serwisowego.
8. Naprawy i wymiany części zamiennych powinny być wykonane przez autoryzowanych serwisantów firmy Reha Fund Sp. z o.o.
9. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego klient będzie obciążony kosztami przesyłki.
10. Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
11. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień klienta wynikających z niezgodności towaru z umową.

WYKAZ NAPRAW SERWISOWYCH (wypełnia serwis)

Lp.	Data zgłoszenia	Nr zlecenia	Opis wady/ Zakres naprawy	Data wykonania naprawy	Pieczęć i podpis serwisu
1.					
2.					

NOTATKI