

INSTRUKCJA UŻYWANIA CHODZIK TRZYKOŁOWY GENEWA PREMIUM 622

I. WPROWADZENIE

Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy REHA FUND Sp. z o.o., czołowego dostawcy materiałów zaopatrzenia medycznego i artykułów rehabilitacyjnych na rynku polskim.

Instrukcja używania zawiera wskazówki i sugestie, których znajomość jest niezbędna do prawidłowego korzystania z wyrobu.



UWAGA! Przed użyciem wyrobu należy zapoznać się z instrukcją używania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z wyrobu, nieprzestrzeganie zasad bezpiecznego używania oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.



II. CHARAKTERYSTYKA

Nr katalogowy	RF-622/S	RF-622/BR
Max. bezpieczne obciążenie	115 kg	115 kg
Regulacja wys. uchwytów	82,5 cm – 92,5 cm	82,5 cm – 92,5 cm
Całkowita szerokość	69,5 cm	69,5 cm
Całkowita długość	66 cm	66 cm
Waga	5 kg	5 kg
Średnica kół	18 cm	18 cm
Kolor	szary	brązowy

LISTA UŻYTYCH MATERIAŁÓW

Rama	aluminium
Koła	TPR (guma termoplastyczna)
Uchwyty	PVC (polichlorek winylu)
Przedni widelec	PVC+PP (polichlorek winylu + polipropylen)
Torba na zakupy	mylon
Hamulec	PP (polipropylen) + aluminium + stal

ELEMENTY CHODZIKA TRZYKOŁOWEGO GENEWA PREMIUM 622


1. Rama główna i przednie koło;
- 2a. Uchwyt prawy;
- 2b. Tylne koło prawe;
- 3a. Uchwyt lewy;
- 3b. Koło tylne lewe;
4. Torba;
5. Pokrętko;
6. Śruby.

KOLOR:

Chodzik występuje w dwóch kolorach: brązowym i szarym



UWAGA! Przed rozpoczęciem korzystania z chodzika należy uważnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami.

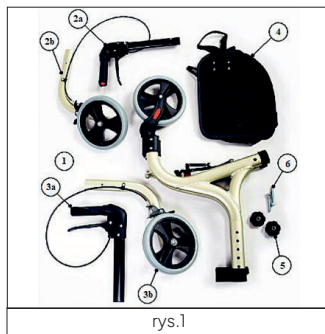

III. PRZEZNACZENIE I ZASTOSOWANIE

Chodzik przeznaczony jest do pomocy dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, które wymagają wsparcia podczas wstawania, stania i chodzenia. Umożliwia samodzielną realizację większości codziennych czynności ruchowych. Może być użytkowany w pomieszczeniach i na zewnątrz.

IV. PRZECIWWSKAZANIA

Przeciwwskazania do pionizacji, urazy i dysfunkcje kończyn górnych uniemożliwiające oparcie się, urazy kończyn dolnych uniemożliwiające utrzymanie równowagi, niestabilność kręgosłupa.

V. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYWANIA

Dla zachowania bezpieczeństwa należy przestrzegać poniższych zaleceń:

1. Zawsze przed użyciem chodzika upewnij się, że jest on prawidłowo zablokowany w pozycji rozłożonej.
2. Nie przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia chodzika.
3. Nie przewozić w torbie elementów mocno wystających poza jego obszar, ponieważ może to wpłynąć na stabilność chodzika.
4. Podczas korzystania z chodzika zawsze zachować wyjątkową ostrożność. Należy unikać wszelkich potencjalnych zagrożeń takich jak: nierówne lub miękkie nawierzchnie, przeszkody na drodze, mokra podłoga itp.
5. Korzystać wyłącznie z oryginalnych akcesoriów. Używanie nieoryginalnych części może spowodować nieodpowiednie przystosowanie chodzika, w wyniku czego powstaje ryzyko upadku.
6. Korzystanie z chodzika w środowisku o dużej wilgotności (prysznic, basen itp.) może wywołać korozję jego ruchomych elementów, co w efekcie może spowodować uszkodzenie chodzika.
7. Nie korzystać z chodzika podczas chodzenia po schodach.
8. Nie przechowywać chodzika w temperaturze poniżej 0°C.
9. Zawsze należy przestrzegać minimalnej i maksymalnej dopuszczalnej wysokości rur przesuwnych.
10. Nie wieszaj toreb ani worków na uchwytach – niebezpieczeństwo przewrócenia!
11. Nigdy nie używaj chodzika do poruszania się, gdy jest złożony!
12. Jeśli zbyt mocno oprzesz się o uchwyty, chodzik może przechylić się do tyłu.
13. Używanie chodzika do celów innych niż chodzenie, takich jak transport ciężkich ładunków, jest nieodpowiednie i niebezpieczne. Przed użyciem upewnij się, że chodzik jest zablokowany w pozycji otwartej. Nie używaj na schodach lub schodach ruchomych, a także na stronnych powierzchniach.
14. Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwaczłonkowskiemu, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.



UWAGA! Nieprzestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa może doprowadzić do poważnych wypadków.



UWAGA! Skonsultuj się ze swoim lekarzem lub rehabilitantem w celu ustalenia odpowiedniego sposobu korzystania z chodzika, zgodnie z Twoimi możliwościami funkcjonalnymi i czynnościami dnia codziennego.



UWAGA! Poniższa informacja to zalecenie producenta, jednak powinno być ono skonsultowane z twoim lekarzem lub rehabilitantem.



UWAGA! Jeżeli chodzik jest prawidłowo wyregulowany, użytkownik powinien być w stanie zachować wyprostowaną postawę z lekko zgiętymi stawami łokciowymi, wówczas podczas chodzenia część ciężaru ciała przejmuje chodzik.


VI. SPOSÓB UŻYCIA

MONTAŻ

1. Rozłóż ramę chodzika i sprawdź czy poprzeczka stabilizująca jest zablokowana (rys. 2).
2. Zamontuj tylne koła. Wsuń rurkę koła do ramy głównej. Wkręć śrubę (rys. 3). Powtórz czynność po drugiej stronie.
3. Na śrubie zamocuj plastikowe pokrętła (rys. 4). Powtórz czynność po drugiej stronie.
4. Wsuń rurkę uchwytu do ramy głównej. Ustaw wysokość uchwytu za pomocą przycisku blokującego (rys. 5). Powtórz czynność po drugiej stronie.
5. Zamontuj torbę. Wsuń wspornik do ramy głównej. Włóż do niego torbę. Powtórz czynność po drugiej stronie. Zabezpiecz konstrukcję paskiem zabezpieczającym (rys. 6 i 7).



UWAGA! Mechanizm hamulcowy koła tylnego musi być skierowany w stronę użytkownika (na zewnętrznej stronie koła).

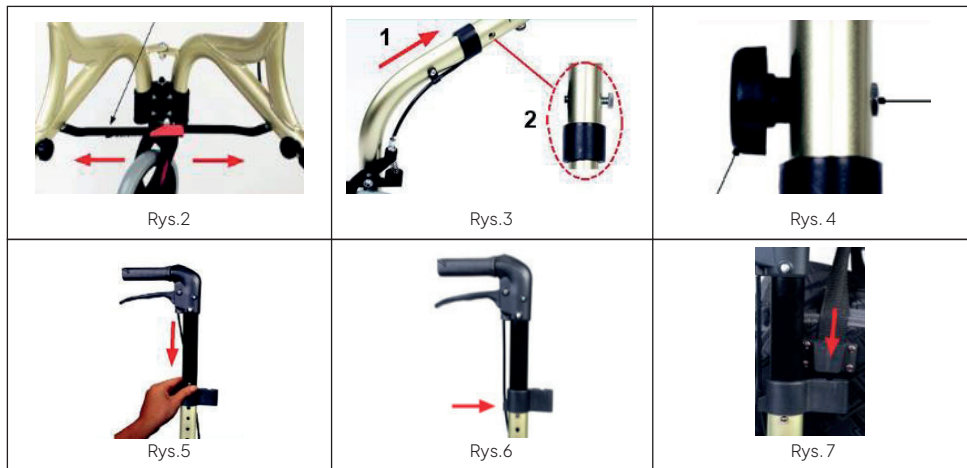

SKŁADANIE I ROZKŁADANIE CHODZIKA

Aby rozłożyć:

1. Ciągnij podłokietniki na zewnątrz.
2. Zablokuj poprzeczkę stabilizującą.
3. Zamontuj torbę.

Aby złożyć:

1. Wyjmij torbę z podłokietnika.
2. Odblokuj poprzeczkę stabilizującą.
3. Ciągnij podłokietniki do wewnątrz.

HAMULCE

1. Podczas ruchu hamulce można włączyć poprzez docieszczenie uchwytu hamulca do rączki chodzika. Każdy hamulec włącza się niezależnie.
2. Każdy z hamulców można zablokować - aby to uczynić, należy pchnąć uchwyt hamulca do dołu. Aby zwolnić zablokowany hamulec należy pociągnąć uchwyt hamulca do góry.



UWAGA! Przed korzystaniem z chodzika sprawdź czy hamulce działają prawidłowo i czy są dobrze wyregulowane.

REGULACJA WYSOKOŚCI RĄCZKI

1. Wysokość rączek można dostosować do użytkownika.
2. Wciśnij przyciski blokujące na ramie po prawej i po lewej stronie.
3. Pociągnij rurkę w górę do momentu osiągnięcia pożądanej wysokości.
4. Przyciski blokujące zatrzymują się automatycznie.

TORBA

1. Torba jest zamontowana na wspornikach znajdujących się na ramie chodzika. Udźwig torby wynosi 5 kg.

VII. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Zaleca się regularną kontrolę chodzika pod kątem wszelkich uszkodzeń czy widocznych oznak zużycia. Regularnie sprawdzaj czy:

- na ramie nie pojawiły się pęknięcia lub załamania;
- przyciski blokujące prawidłowo zabezpieczają ustawioną wysokość rączek;
- przewody hamulców nie są postrzępione;
- hamulce są prawidłowo wyregulowane;
- żadne inne części chodzika nie są poluzowane lub uszkodzone.



UWAGA! Jeśli zachodzi taka konieczność, należy wymienić lub wyregulować odpowiednie części.

Zaleca się regularne czyszczenie chodzika miękką szmatką i wodą z mydłem. Chodzik po wyczyszczeniu należy osuszyć miękką szmatką.



UWAGA! Do czyszczenia chodzika nie wolno używać rozpuszczalników, wybielaczy czy środków ściernych.

VIII. KONIEC UŻYWANIA

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas kontroli wyrobu zgodnie z zaleceniami producenta. Patrz punkt instrukcji: Czyszczenie i Konserwacja - należy niezwłocznie zaprzestać korzystania z wyrobu. Po zakończeniu używania należy poddać wyrób utylizacji zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.

IX. PRZEWIDZANY OKRES UŻYWANIA

Przewidziany okres używania wyrobu to 3 lata. Ten czas może być dłuższy lub krótszy, zależnie od częstotliwości korzystania i konserwacji wyrób.

X. GWARANCJA

Producent zapewnia klienta, że przedmiot sprzedaży jest fabrycznie nowy oraz wysokiej jakości.
Wyrób objęty jest gwarancją (szczegółowe warunki gwarancji znajdują się na stronie internetowej Producenta).
Wyrób powinien być wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami w instrukcji używania.

XI. GLOSARIUSZ SYMBOLI

	Producent		Ostrzeżenie
	Oznakowanie CE		Kod partii
	Numer katalogowy		Ilość
	Numer modelu		Góra, nie przewracać
	Data produkcji		Chronić przed wilgocią
	Zajrzyj do instrukcji używania		Kruchy, obchodzić się ostrożnie
	Wyrób medyczny		Data ważności
	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu		



REHA FUND Sp. z o.o.
ul. Staniewicka 14,
03 – 310 Warszawa, Polska (Poland)
e-mail: info@rehafund.pl
www.rehafund.pl



I/RF-622/2/05.03.2025
Data wydania instrukcji używania: 03.2025