

INSTRUKCJA UŻYWANIA KRZESŁO TOALETOWE BRUNO 801

I. WPROWADZENIE

Szanowni Państwo,
Serdecznie dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy REHA FUND Sp. z o.o., czołowego dostawcy materiałów zaopatrzenia medycznego i artykułów rehabilitacyjnych na rynku polskim.
Instrukcja używania zawiera wskazówki i sugestie, których znajomość jest niezbędna do prawidłowego korzystania z wyrobu.



UWAGA! Przed użyciem wyrobu należy zapoznać się z instrukcją używania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z wyrobu, nieprzestrzeganie zasad bezpiecznego używania oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.



II. CHARAKTERYSTYKA

Nr katalogowy:	RF-801
Szerokość:	55 cm
Całkowita wysokość:	72-82 cm
Całkowita długość:	72 cm
Wysokość siedziska:	42-52 cm
Głębokość siedziska:	65 cm
Wysokość oparcia siedziska:	33 cm
Max. bezpieczne obciążenie:	100 kg
Waga:	6,6 kg

LISTA UŻYTYCH MATERIAŁÓW

klapka	PP (polipropylen)
podtokiećnik	PP (polipropylen)
deska toaletowa	PP (polipropylen)
rama	stal
przycisk blokujący	stal
nasadka	guma
pokrywka	PP (polipropylen)
wiaderko	PP (polipropylen)
nasadka stabilizująca	PP (polipropylen)



UWAGA! Przed rozpoczęciem korzystania z krzesła należy uważnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami.

III. PRZEZNACZENIE I ZASTOSOWANIE

Krzesło toaletowe spełnia funkcję przenośnej toalety. Krzesła można użytkować przy łóżku pacjenta. Pomaga osobom ograniczonej sprawności ruchowej i starszym w podstawowych czynnościach fizjologicznych. Ułatwia też opiekę nad nimi. Bariereki ułatwiają wstawanie z krzesła i siadanie na nim.

IV. PRZECIWSKAZANIA

Przeciwwskazania do pionizacji, urazy i dysfunkcje kończyn górnych uniemożliwiające siadanie na krześle, urazy kończyn dolnych uniemożliwiające utrzymanie równowagi, zaburzenia koordynacji ruchowej, problemy z błędnikiem, niestabilność kręgosłupa.

V. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYWANIA

Dla zachowania bezpieczeństwa należy przestrzegać poniższych zaleceń:

- Przed korzystaniem z krzesła toaletowego upewnić się, że:
 - wysokość krzesła jest odpowiednio wyregulowana;
 - przyciski blokujące działają poprawnie;
 - gumowe nasadki są w dobrym stanie;
 - wszystkie stopki krzesła ustawione są na tej samej wysokości.
- Korzystać wyłącznie z oryginalnych akcesoriów. Używanie nieoryginalnych części może spowodować nieodpowiednie przystosowanie krzesła w wyniku czego powstaje ryzyko upadku.
- Nie przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia krzesła.
- Nie przechowywać krzesła w temperaturze poniżej 0°C.
- Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.



UWAGA! Nieprzestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa może doprowadzić do poważnych wypadków.

VI. SPOSÓB UŻYCIA

SIADANIE I WSTAWANIE


- Przed użyciem upewnij się, że krzesło stoi stabilnie i jest gotowe do użycia.
- Stań tyłem do krzesła tak, aby dotykać jego przodu, tylną stroną kolan.
- Sięgnij rękoma do tyłu i oprzyj dłonie na podłokietnikach.
- Powoli siadaj na krzesło, zginając łokcie i jeśli jest to możliwe kolana oraz biodra.
- Aby wstać z krzesła, oprzyj dłonie na poręczach i podnieś się. Zanim puścisz podłokietniki krzesła, upewnij się, że utrzymujesz równowagę.



UWAGA! Do czyszczenia krzesła nie wolno używać rozpuszczalników, wybielaczy czy środków ściernych.


MONTAŻ

- Produkt jest przeznaczony do samodzielnego montażu bez użycia narzędzi.
- Przed montażem sprawdź listę części (rys.1).
- Rozłóż ramę.
- Ustaw ramę w na stabilnej i równej powierzchni.
- Połącz przeciwległe końce ramy poprzeczką stabilizującą.
- Włóż wiaderko do konstrukcji.
- Przykryj wiaderko pokrywką.
- Zamontuj deskę i klapkę.

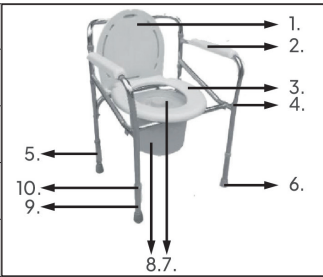Lista części		
1.klapka	6.nasadka	
2.podłokietnik	7.pokrywka	
3.deska toaletowa	8.wiaderko	
4.poprzeczka stabilizująca	9.regulacja wysokości	
5.przycisk blokujący	10.nasadka stabilizująca	
		rys.1

REGULACJA WYSOKOŚCI

Możesz regulować wysokość za pomocą przycisków blokujących znajdujących się w nogach krzesła. Wciśnij przycisk blokujący jedną ręką (rys.2), drugą przesunij rurkę do odpowiedniej wysokości. Zatrzaśnij przycisk blokujący.

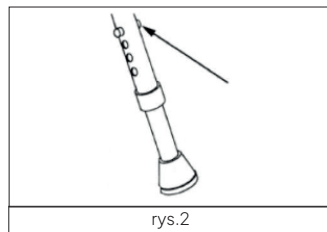

VII. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Zaleca się regularną kontrolę krzesła pod kątem wszelkich uszkodzeń czy widocznych oznak zużycia. Regularnie sprawdzaj czy:
 - na ramie nie pojawiły się pęknięcia lub załamania;
 - nasadki nie uległy zniszczeniu – jeżeli tak, należy je wymienić;
 - żadne inne części krzesła toaletowego nie są poluzowane lub uszkodzone.
- Zaleca się regularne czyszczenie krzesła toaletowego miękką szmatką i wodą z mydłem. Krzesło toaletowe po wyczyszczeniu należy osuszyć miękką szmatką. Wiaderko można dezynfekować na zimno np. etanolem.

VIII. KONIEC UŻYWANIA

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas kontroli wyrobu zgodnie z zaleceniami producenta. Patrz punkt instrukcji: Czyszczenie i Konserwacja - należy niezwłocznie zaprzestać korzystania z wyrobu. Po zakończeniu używania należy poddać wyrób utylizacji zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.

IX. PRZEWIDZIANY OKRES UŻYWANIA

Przewidziany okres używania wyrobu to 3 lata. Ten czas może być dłuższy lub krótszy, zależnie od częstotliwości korzystania i konserwacji wyrobów.

X. GWARANCJA

Producent zapewnia klienta, że przedmiot sprzedaży jest fabrycznie nowy oraz wysokiej jakości. Wyrób objęty jest gwarancją (szczegółowe warunki gwarancji znajdują się na stronie internetowej Producenta). Wyrób powinien być wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami w instrukcji używania.

XI. GLOSARIUSZ SYMBOLI

	Producent		Ostrzeżenie
	Oznakowanie CE		Kod partii
	Numer katalogowy		Ilość
	Data produkcji		Góra, nie przewracać
	Zajrzyj do instrukcji używania		Chronić przed wilgocią
	Wyrób medyczny		Kruchy, obchodzić się ostrożnie
	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu		

