

INSTRUKCJA UŻYWANIA KRZESŁO TOALETOWE MICHAEL 805

I. WPROWADZENIE

Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy REHA FUND Sp. z o.o., czołowego dostawcy materiałów zaopatrzenia medycznego i artykułów rehabilitacyjnych na rynku polskim.

Instrukcja używania zawiera wskazówki i sugestie, których znajomość jest niezbędna do prawidłowego korzystania z wyrobu.

*Zdjęcia znajdujące się w poniższej instrukcji mają charakter poglądowy.



UWAGA! Przed użyciem wyrobu należy zapoznać się z instrukcją używania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z wyrobu, nieprzestrzeganie zasad bezpiecznego używania oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.

II. CHARAKTERYSTYKA

Nr katalogowy	RF-805
Całkowita długość	64 cm
Całkowita szerokość	51 cm
Całkowita głębokość	59,5 cm
Szerokość siedziska	49,5 cm
Głębokość siedziska	41 cm
Zakres regulacji wysokości siedziska	41-56,3 cm
Max waga użytkownika	120 kg
Waga krzesła	6 kg

LISTA UŻYTYCH MATERIAŁÓW

klapka	PE (polietylen)
podłokietnik	PE (polietylen)
deska toaletowa	PE (polietylen)
rama	stal
nasadka	PVC (polichlorek winylu)
pokrywka	PVC (polichlorek winylu)
wiaderko	PVC (polichlorek winylu)
nasadka stabilizująca	PVC (polichlorek winylu)

III. PRZEZNACZENIE I ZASTOSOWANIE

Krzesło toaletowe spełnia funkcję przenośnej toalety. Krzesła można używać przy łóżku pacjenta. Pomaga osobom o ograniczonej sprawności ruchowej i starszym w podstawowych czynnościach fizjologicznych. Ułatwia też opiekę nad nimi. Barierek ułatwiają wstawanie z krzesła i siadanie na nim.

IV. PRZECIWSKAZANIA

Przeciwwskazania do pionizacji, urazy kończyn dolnych uniemożliwiające utrzymanie równowagi, zaburzenia koordynacji ruchowej, problemy z błędnikiem, niestabilność kręgosłupa. Osoby ograniczone intelektualnie nie powinny stosować wyrobu bez nadzoru opiekuna

V. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYWANIA

Dla zachowania bezpieczeństwa należy przestrzegać poniższych zaleceń:

- Przed korzystaniem z krzesła toaletowego upewnić się, że:
 - wysokość krzesła jest odpowiednio wyregulowana;
 - przyciski blokujące działają poprawnie;
 - gumowe nasadki są w dobrym stanie;
 - wszystkie stopki krzesła ustawione są na tej samej wysokości.
- Korzystać wyłącznie z oryginalnych akcesoriów. Używanie nieoryginalnych części może spowodować nieodpowiednie przystosowanie krzesła w wyniku czego powstaje ryzyko upadku.
- Nie przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia krzesła.
- Nie przechowywać krzesła w temperaturze poniżej 0°C.

5. Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.
6. Podczas otwierania opakowania sprawdź integralność kompletu i czy nie wykazuje on żadnych nieprawidłowości, skontaktuj się z dystrybutorem, u którego go kupiłeś.
7. Podczas używania krzesła należy ustawić na płaskiej, niezawilgoconej lub śliskiej powierzchni.
8. Sprawdź poprawność mocowania zdejmowanych nóżek oraz klipsów regulujących wysokość.
9. Zawsze przed użyciem zwracaj uwagę na wagę pacjenta, która nie może przekraczać udźwigu zadeklarowanego przez producenta.



Nieprzestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa może doprowadzić do poważnych wypadków.

VI. SPOSÓB UŻYWANIA

SIADANIE I WSTAWANIE

1. Upewnij się, że krzesło stoi stabilnie i jest gotowe do użycia.
2. Stań tyłem do krzesła tak, aby dotykać jego przodu, tylną stroną kolan.
3. Sięgnij rękoma do tyłu i oprzyj dłoń na podłokietnikach.
4. Powoli siadaj na krzesło, zginając łokcie i jeśli jest to możliwe kolana oraz biodra.
5. Aby wstać z krzesła, oprzyj dłoń na poręczach i podnieś się. Zanim puścisz podłokietniki krzesła, upewnij się, że utrzymujesz równowagę.



Do czyszczenia krzesła nie wolno używać rozpuszczalników, wybielaczy czy środków ściągających.

MONTAŻ


1. Zamontuj boczne ramy krzesła (rys. 1).
2. Włóż śruby w dolne otwory (rys. 2).
3. Dołącz poprzeczkę łączącą na tyle krzesła (rys. 3).
4. Dokręć śruby motylkowe (rys. 4).
5. Dołącz poprzeczki do wiadra (rys. 5).
6. Zamontuj poprzeczkę łączącą na przodzie krzesła (rys. 6).
7. Zamocuj oparcie i przykręć za pomocą śrub motylkowych (rys. 7 i rys. 8).
8. Włóż wiadro do ramy (rys. 9).
9. Zamontuj deskę toaletową (rys. 10).
10. Zamontuj klapkę (rys. 11).
11. Sprawdź stabilność krzesła (rys. 12).



rys. 1



rys. 2

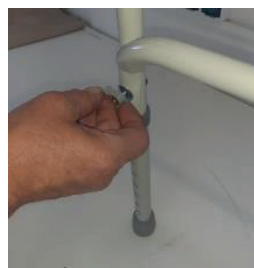

rys. 3



rys. 4



rys. 5



rys. 6



rys. 7



rys. 8




rys. 9



rys. 10




rys. 11

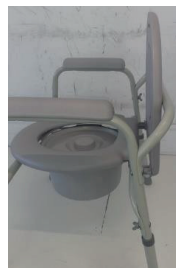

rys. 12

REGULACJA WYSOKOŚCI

Możesz regulować wysokość za pomocą przycisków blokujących znajdujących się w nogach krzesła. Wciśnij przycisk blokujący jedną ręką (rys. 13), drugą przesun rurkę do odpowiedniej wysokości. Zatrzasknij przycisk blokujący.

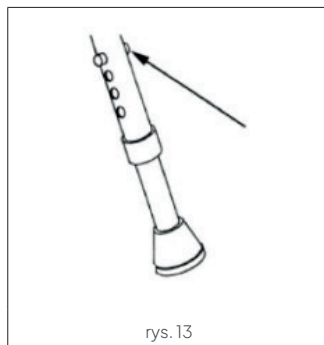

rys. 13

VII. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Zaleca się regularną kontrolę krzesła pod kątem wszelkich uszkodzeń czy widocznych oznak zużycia. Regularnie sprawdzaj czy:
 - na ramie nie pojawiły się pęknięcia lub załamania;
 - nasadki nie uległy zniszczeniu – jeżeli tak, należy je wymienić;
 - żadne inne części krzesła toaletowego nie są poluzowane lub uszkodzone.
2. Zaleca się regularne czyszczenie krzesła toaletowego miękką szmatką i wodą z mydłem. Krzesło toaletowe po wyczyszczeniu należy osuszyć miękką szmatką. Wiaderko można dezynfekować na zimno np. etanolem.
3. Wskazane jest okresowe sprawdzanie komfortu i szczelności spoin.
4. Sprawdź działanie zacisków mocujących, śrub i zużycie końcówek.
5. Czyścić nieagresywnymi detergentami.
6. W przypadku dezynfekcji stosować środki na bazie alkoholu.
7. Udogodnienie należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VIII. KONIEC UŻYWANIA

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas kontroli taboretu zgodnie z zaleceniami producenta. Patrz punkt instrukcji: Czyszczenie i Konserwacja – należy niezwłocznie zaprzestać korzystania z wyrobu. Po zakończeniu używania należy poddać wyrób utylizacji zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.

IX. PRZEWIDZIANY OKRES UŻYWANIA

Brak przewidzianego okresu używania taboretu. Ten czas może być dłuższy lub krótszy, zależnie od częstotliwości korzystania i konserwacji wyrobu.

X. GWARANCJA

Producent zapewnia klientowi, że przedmiot sprzedaży jest fabrycznie nowy oraz wysokiej jakości. Wyrób objęty jest gwarancją (szczegółowe warunki gwarancji znajdują się na stronie internetowej Producenta). Wyrób powinien być wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami w instrukcji używania.

XI. GLOSARIUSZ SYMBOLI

	Producent		Ostrzeżenie
	Oznakowanie CE		Kod partii
	Numer katalogowy		Ilość
	Data produkcji		Góra, nie przewracać
	Zajrzyj do instrukcji używania		Chronić przed wilgocią
	Wyrób medyczny		Kruchy, obchodzić się ostrożnie
	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu		