

**INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
TABORET I STOPIEŃ DO WANNY 2W1 JOHN 823
WYRÓB MEDYCZNY**

Nr katalogowy	RF-823
Max. bezpieczne obciążenie	120 kg
Waga	1,5 kg
Regulacja wysokości siedziska	20,2-25,2 cm
Szerokość siedziska	41,6 cm
Głębokość siedziska	22,6 cm
Rozstaw nóg wzdłuż	47,8 cm
Rozstaw nóg w poprzek	31,6 cm
Kąt nachylenia nóg wzdłuż	107 stopni
Kąt nachylenia nóg w poprzek	100 stopni
Kolor siedziska	biały


UWAGA!

Przed rozpoczęciem korzystania z produktu, należy uważnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami.

PRZEZNACZENIE

Taboret/stopień pozwala osobom z ograniczoną sprawnością ruchową utrzymać codzienną higienę osobistą zachowując przy tym znaczną samodzielność. Dzięki temu sprzętowi zagrożenie upadkiem, czy innym urazem, które możliwe są w wannie, znacznie spada. Taboret/stopień ułatwia korzystanie z wanny, pomoc w codziennej higienie i zwiększa bezpieczeństwo. Taboret/stopień ułatwia wchodzenie i wychodzenie z wanny osobom z ograniczoną sprawnością ruchową. Może służyć także jako stabilne podparcie w czasie kąpieli w wannie.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Dla zachowania bezpieczeństwa należy przestrzegać poniższych zaleceń:


- Przed korzystaniem z taboretu/stopnia upewnić się, że:
 - wysokość siedziska jest odpowiednio wyregulowana,
 - przyciski blokujące działają poprawnie,
 - gumowe nasadki są w dobrym stanie,
 - wszystkie stopki ustawione są na tej samej wysokości.
- Korzystać wyłącznie z oryginalnych akcesoriów. Używanie nieoryginalnych części może spowodować nieodpowiednie przystosowanie taboretu/stopnia w wyniku czego powstaje ryzyko upadku.
- Nie przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia taboretu/stopnia.
- Nie przechować w temperaturze poniżej 0°C.
- Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.


UWAGA!

Nieprzestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa może doprowadzić do poważnych wypadków.

REGULACJA WYSOKOŚCI

- Wciśnij przycisk zabezpieczający na stopce taboretu/stopnia i obróć ją delikatnie, jak na rysunku obok.
- Ustaw odpowiednią wysokość.

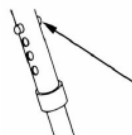

3. Naceluj przyciskiem na odpowiedni otwór, dzięki czemu zablokujesz stopkę na żądanej wysokości.
4. Powtórz powyższe czynności na każdej stopce upewniając się, że wszystkie stopki ustawione są na tej samej wysokości.



UWAGA!

Upewnij się, że wszystkie stopki są poprawnie zablokowane i wyregulowane na tą samą wysokość.

SIADANIE I WSTAWANIE; WCHODZENIE DO WANNY I WYCHODZENIE Z WANNY

	Funkcja: taboret do wanny	Funkcja: stopień do wanny
1.	Upewnij się, taboret/stopień stoi stabilnie i jest gotowy do użycia.	Upewnij się, że taboret/stopień stoi stabilnie i jest gotowy do użycia.
2.	Stań tyłem do taboretu/stopnia tak, aby dotykać jego przodu, tylną stroną kolan.	Wejść na taboret/stopień.
3.	Sięgnij rękoma do tyłu i oprzyj dłonie na siedzisku.	Ostrożnie przełóż pierwszą nogę do wanny.
4.	Powoli siadaj na taborecie/stopniu, zginając łokcie i, jeśli jest to możliwe, kolana oraz biodra.	Ostrożnie przełóż drugą nogę do wanny.
5.	Aby wstać z krzesła, oprzyj dłonie na siedzisku i podnieś się.	W przypadku funkcji stopień do wanny: Wejść do wanny. Wychodzenie z wanny jest czynnością odwrotną do wchodzenia do wanny.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Zaleca się regularną kontrolę taboretu/stopnia pod kątem wszelkich uszkodzeń czy widocznych oznak zużycia. Regularnie sprawdzaj czy:
 - na ramie nie pojawiły się pęknięcia lub załamania,
 - przycisk blokujący prawidłowo zabezpiecza ustawioną wysokość,
 - otwory w rurkach nie są powiększone lub wydłużone,
 - dolne nasadki nie uległy zużyciu – jeżeli tak, należy je wymienić,
 - żadne inne części taboretu/stopnia nie są poluzowane lub uszkodzone.
2. Zaleca się regularne czyszczenie taboretu/stopnia miękką szmatką i wodą z mydłem. Taboret/stopień po wyczyszczeniu należy osuszyć miękką szmatką.



UWAGA!

Do czyszczenia taboretu/stopnia nie wolno używać rozpuszczalników, wybielaczy czy środków ścierających.


ELEMENTY PRODUKTU



Powyższe zdjęcie ma charakter poglądowy.

SPOSÓB MONTAŻU

1. Przygotuj wszystkie elementy do montażu (rys. 1).
2. Połącz wszystkie elementy ramy (rys. 2).
3. Przykręć ramę do siedziska (rys. 3).
4. Zamontuj nóżki na ramie (rys. 4).
5. Sprawdź, czy stopień/taboret jest prawidłowo zmontowany (rys. 5).

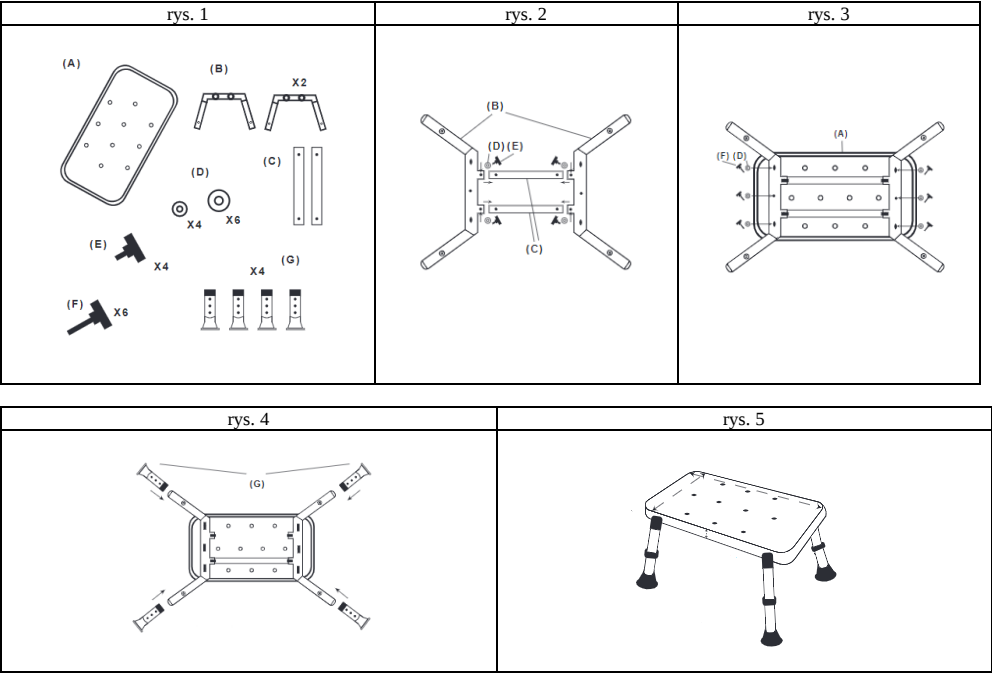

LISTA UŻYTYCH MATERIAŁÓW

Rama	aluminium
Siedzisko	HD-PE (polietylen dużej gęstości)
Nasadka	TPR (guma termoplastyczna)

WYJAŚNIENIE SYMBOLI

	Producent
	Oznakowanie CE
	Numer referencyjny
	Data produkcji
	Zajrzyj do instrukcji używania
	Ostrzeżenie
	Numer serii
	Góra, nie przewracać
	Przechowywać w suchym miejscu
	Delikatne, obchodzić się ostrożnie

**REHA FUND Sp. z o.o.**

ul. Staniewicka 14, 03-310 Warszawa, Polska
tel.: +48 22 594 03 00, fax.: +48 22 594 03 07
e-mail: info@rehafund.pl www.rehafund.pl



Wer. 1.3
Wydano: 07/2022

**KARTA GWARANCYJNA
TABORET I STOPIEŃ DO WANNY 2W1 JOHN 823**

Model:	Numer seryjny:	Data sprzedaży:	Podpis i pieczęć sprzedawcy:

WARUNKI GWARANCJI

1. Producent zapewnia klienta, że przedmiot sprzedaży, na który jest wydana niniejsza karta gwarancyjna jest fabrycznie nowy oraz wysokiej jakości.
2. Taboret/stopień jest objęty 24 miesięcznym okresem gwarancji od daty sprzedaży w karcie gwarancyjnej.
3. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji gwarancyjnej jest dostarczenie poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej wraz z dołączonym dowodem zakupu.
4. Ewentualne wady sprzętu zostaną usunięte przez firmę REHA FUND Sp. z o.o. lub autoryzowanych serwisantów pod warunkiem, że taboret/stopień był wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami w instrukcji użytkowania.
5. Naprawa zostanie wykonana w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni, od daty przyjęcia sprzętu do punktu serwisowego.
6. Gwarancją nie są objęte:
 - czynności związane z konserwacją, czyszczeniem i regulacją opisane w instrukcji użytkowania;
 - części ulegające zużyciu podczas normalnego użytkowania;
 - mechaniczne i termiczne uszkodzenia np. wygięcia, zarysowania, połamania itp.;
 - uszkodzenia powstałe wskutek używania sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi, zaniedbania, dokonania samodzielnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
7. Przed oddaniem sprzętu do autoryzowanych serwisantów należy go wyczyścić zgodnie z instrukcją użytkowania, tak aby nadawał się do wykonania przeglądu serwisowego.
8. Naprawy i wymiany części zamiennych powinny być wykonane przez autoryzowanych serwisantów firmy Reha Fund Sp. z o.o.
9. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego klient będzie obciążony kosztami przesyłki.
10. Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
11. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień klienta wynikających z niezgodności towaru z umową.

WYKAZ NAPRAW SERWISOWYCH *(wypełnia serwis)*

Lp.	Data zgłoszenia	Nr zlecenia	Opis wady/ Zakres naprawy	Data wykonania naprawy	Pieczęć i podpis serwisu
1.					