

**INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
OKRĄGLY TABORET OBROTOWY POD PRYSZNIC RYAN 824
WYRÓB MEDYCZNY**

Nr katalogowy	RF-824
Max. bezpieczne obciążenie	150 kg
Waga taboretu	2,6 kg
Regulacja wysokości siedziska	42-54 cm
Średnica siedziska	35 cm
Kolor siedziska	niebieski



UWAGA! Przed rozpoczęciem korzystania z taboretu, należy uważnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami.

PRZEZNACZENIE

Taboret pod prysznic pozwala osobom z ograniczoną sprawnością ruchową utrzymać codzienną higienę osobistą zachowując przy tym znaczną samodzielność. Dzięki temu sprzętowi zagrożenie upadkiem czy innym urazem, które możliwe są pod prysznicem, znacznie spada.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Dla zachowania bezpieczeństwa należy przestrzegać poniższych zaleceń:


1. Przed korzystaniem z taboretu upewnić się, że:
 - a. wysokość siedziska jest odpowiednio wyregulowana;
 - b. przyciski blokujące działają poprawnie;
 - c. gumowe nasadki są w dobrym stanie;
 - d. wszystkie stopki ustawione są na tej samej wysokości.
2. Korzystać wyłącznie z oryginalnych akcesoriów. Używanie nieoryginalnych części może spowodować nieodpowiednie przystosowanie taboretu w wyniku czego powstaje ryzyko upadku.
3. Nie przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia taboretu.
4. Nie przechować w temperaturze poniżej 0°C.
5. Przed użyciem upewnić się, że rurki stóp ustawione są na tej samej wysokości.
6. Nie próbuj przesunąć taboretu w górę lub w dół po pochyłości za pomocą wody, lodu lub oleju.
7. Taboret musi być stosowany na płaskiej powierzchni.
8. Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

**UWAGA!**

Nieprzestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa może doprowadzić do poważnych wypadków.

REGULACJA WYSOKOŚCI

1. Wciśnij przycisk zabezpieczający na stopce taboretu i obróć ją delikatnie, jak na rysunku obok.
2. Ustaw odpowiednią wysokość.
3. Naceluj przyciskiem na odpowiedni otwór, dzięki czemu zablokujesz stopkę na żądanej wysokości.
4. Powtórz powyższe czynności na każdej stopce upewniając się, że wszystkie stopki ustawione są na tej samej wysokości.

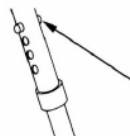**UWAGA!**

Upewnij się, że wszystkie stopki są poprawnie zablokowane i wyregulowane na tą samą wysokość.

SIADANIE I WSTAWANIE

1. Upewnij się, że taboret stoi stabilnie i jest gotowy do użycia.
2. Stań tyłem do taboretu tak, aby dotykać jego przodu, tylną stroną kolan.
3. Sięgnij rękoma do tyłu i oprzyj dłonie na siedzisku.
4. Powoli siadaj na taborecie, zginając łokcie i, jeśli jest to możliwe, kolana oraz biodra.
5. Aby wstać z krzesła, oprzyj dłonie na siedzisku i podnieś się.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA


1. Zaleca się regularną kontrolę taboretu pod kątem wszelkich uszkodzeń czy widocznych oznak zużycia. Regularnie sprawdzaj czy:
 - na ramie nie pojawiły się pęknięcia lub złamania;
 - przycisk blokujący prawidłowo zabezpiecza ustawioną wysokość;
 - otwory w rurkach nie są powiększone lub wydłużone;
 - dolne nasadki nie uległy zużyciu – jeżeli tak, należy je wymienić;
 - żadne inne części krzesła prysznicowego nie są poluzowane lub uszkodzone.
2. Zaleca się regularne czyszczenie taboretu miękką szmatką i wodą z mydłem. Taboret po wyczyszczeniu należy osuszyć miękką szmatką.



UWAGA!

Do czyszczenia taboretu nie wolno używać rozpuszczalników, wybielaczy czy środków ściernych.

ELEMENTY TABORETU

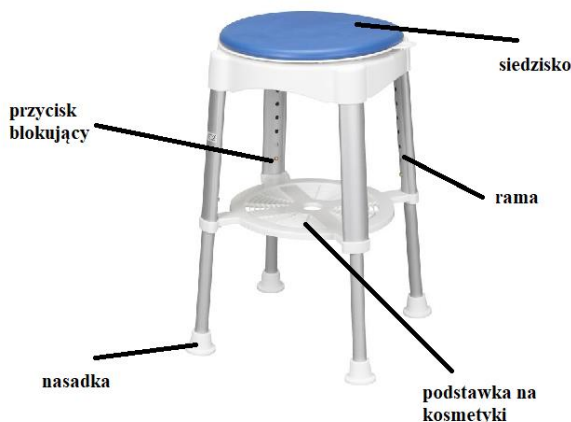

Powyższe zdjęcie ma charakter poglądowy.

SPOSÓB MONTAŻU

1. Połóż siedzisko na twardej powierzchni płaską częścią do dołu.
2. Zamontuj górne rurki ramy.
3. Zamontuj podstawkę na kosmetyki.
4. Zamontuj dolne rurki ramy.
5. Nałóż nasadki.

LISTA UŻYTYCH MATERIAŁÓW

Rama	PP (polipropylen)
Siedzisko	ABS (terpolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy)
Nasadka	ABS (terpolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy)
Przycisk blokujący	ABS (terpolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy)
Podstawka na kosmetyki	ABS (terpolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy)

WYJAŚNIENIE SYMBOLI

	Producent
	Oznakowanie CE
	Numer referencyjny
	Data produkcji
	Zajrzyj do instrukcji używania
	Ostrzeżenie
	Numer serii
	Góra, nie przewracać
	Przechowywać w suchym miejscu
	Delikatne, obchodzić się ostrożnie



REHA FUND Sp. z o.o.

ul. Staniewicka 14, 03-310 Warszawa, Polska
tel.: +48 22 594 03 00, fax.: +48 22 594 03 07
e-mail: info@rehafund.pl www.rehafund.pl



Wer. 1.3
Wydano: 11/2022

NOTATKI

KARTA GWARANCYJNA
OKRĄGLY TABORET OBROTOWY POD PRYSZNIC RYAN 824

Model:	Numer seryjny:	Data sprzedaży:	Podpis i pieczęć sprzedawcy:

WARUNKI GWARANCJI

1. Producent zapewnia klienta, że przedmiot sprzedaży, na który jest wydana niniejsza karta gwarancyjna jest fabrycznie nowy oraz wysokiej jakości.
2. Taboret jest objęty 24 miesięcznym okresem gwarancji od daty sprzedaży w karcie gwarancyjnej.
3. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji gwarancyjnej jest dostarczenie poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej wraz z dołączonym dowodem zakupu.
4. Ewentualne wady sprzętu zostaną usunięte przez firmę REHA FUND Sp. z o.o. lub autoryzowanych serwisantów pod warunkiem, że taboret był wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami w instrukcji użytkowania.
5. Naprawa zostanie wykonana w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni, od daty przyjęcia sprzętu do punktu serwisowego.
6. Gwarancją nie są objęte:
 - czynności związane z konserwacją, czyszczeniem i regulacją opisane w instrukcji użytkowania;
 - części ulegające zużyciu podczas normalnego użytkowania;
 - mechaniczne i termiczne uszkodzenia np. wygięcia, zarysowania, połamania itp.;
 - uszkodzenia powstałe wskutek używania sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi, zaniedbania, dokonania samodzielnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
7. Przed oddaniem sprzętu do autoryzowanych serwisantów należy go wyczyścić zgodnie z instrukcją użytkowania, tak aby nadawał się do wykonania przeglądu serwisowego.
8. Naprawy i wymiany części zamiennych powinny być wykonane przez autoryzowanych serwisantów firmy Reha Fund Sp. z o.o.
9. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego klient będzie obciążony kosztami przesyłki.
10. Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
11. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień klienta wynikających z niezgodności towaru z umową.

WYKAZ NAPRAW SERWISOWYCH *(wypełnia serwis)*

Lp.	Data zgłoszenia	Nr zlecenia	Opis wady/ Zakres naprawy	Data wykonania naprawy	Pieczęć i podpis serwisu
1.					
2.					