

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ŁAWECZKA DO WANNY EMMA 851

Nr katalogowy:	RF-851
Max. bezpieczne obciążenie:	181 kg
Waga:	2,14 kg
Regulacja szer. mocowania:	500 - 600 mm
Długość siedziska:	68,5 cm
Szerokość siedziska:	22,5 mm
Całkowita wysokość:	11,5 cm
Wysokość szczebelka:	1,8 cm
Szerokość szczebelka:	5 cm




UWAGA! Przed rozpoczęciem korzystania z ławeczki należy uważnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami.

PRZEZNACZENIE

Ławeczka do wanny zapewnia stabilne siedzisko podczas kąpieli w standardowej wannie. Pomaga we wchodzeniu i wychodzeniu z wanny; pomaga usiąść i/lub podnieść się do/z wanny. Przeznaczona jest dla osób starszych oraz osób o ograniczonej możliwości ruchowej (czasowej lub trwałej) spowodowanej, np. wylewem, udarem, wypadkiem komunikacyjnym, łamliwością kości, urazami kończyn, bioder, operacją.

BUDOWA ŁAWECZKI

1. Szczebelki;
2. Klamra łącząca;
3. Wspornik;
4. Wewnętrzna prowadnica.

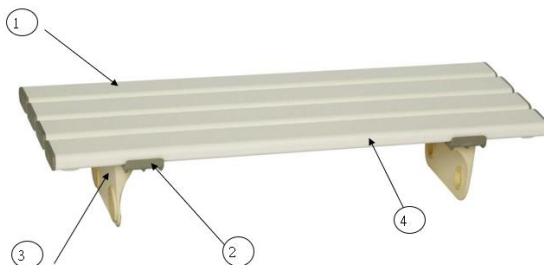


MONTAŻ

- 1) Poluzuj motylkowe nakrętki znajdujące się na spodniej stronie ławeczki obracając je przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Spowoduje to zwolnienie wsporników regulacyjnych jak jest to przedstawione na rysunku obok.
- 2) Przesuń oba wsporniki maksymalnie do środka ławeczki, a potem połóż ławeczkę na brzegach wanny upewniając się, że ławeczka jest na tyle szeroka, aby bezpiecznie opierać się na brzegach wanny.



UWAGA! Jeśli z jednej strony ławeczka znacznie wystaje poza brzeg wanny może być to niebezpieczne dla użytkownika i grozić upadkiem.

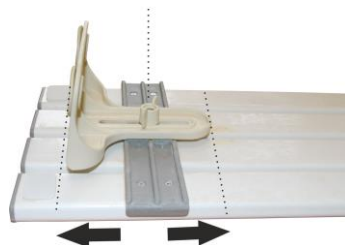

- 3) Przesuwaj oba wsporniki maksymalnie na zewnątrz, aż zablokują się przy brzegach wanny tak, że ławeczka będzie ściśle przylegać do obu jej brzegów. Mocno dokręć motylkowe nakrętki wsporników.



UWAGA! Zbyt mocne dokręcanie pokręteł motylkowych może spowodować uszkodzenie pokrętła.


- 4) Przed użytkowaniem sprawdź, czy ławeczka jest bezpiecznie zablokowana. Ławeczka nie może być położona niesymetrycznie względem brzegów wanny, a zabezpieczenia nie mogą nie przylegać lub tylko częściowo przylegać do wanny.
- 5) Powyższą procedurę należy stosować za każdym razem podczas montowania ławeczki na wannie.



UWAGA! Zawsze przed użyciem ławeczki upewnij się, że jest ona prawidłowo i stabilnie zamontowana do wanny.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Ławeczki nie można montować na wannie gdy pokrętła, znajdujące się pod spodem ławeczki, nie mają pełnego kontaktu z pionową (lub prawie pionową) ścianą wanny (patrz rysunek poniżej).
2. Należy zawsze przed użyciem ławeczki upewnić się, że jest prawidłowo zamocowana.
3. Przesuwaj pokrętła maksymalnie na zewnątrz, aż zablokują się przy brzegach wanny tak, że ławeczka będzie ściśle przylegać do obu jej brzegów.
4. Przed użytkowaniem sprawdź, czy ławeczka jest bezpiecznie zablokowana. Ławeczka nie może być położona niesymetrycznie względem brzegów wanny, a zabezpieczenia nie mogą nie przylegać lub tylko częściowo przylegać do wanny (patrz rysunek poniżej).
5. Powyższą procedurę należy stosować za każdym razem podczas montowania ławeczki na wannie.
6. Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.
7. Nie można stać na ławeczce podczas kąpieli. Nie można podnosić ławeczki, gdy ktoś na niej siedzi lub stoi.

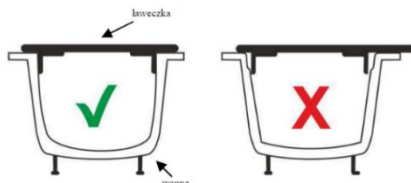

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Zaleca się regularną kontrolę ławeczki pod kątem wszelkich uszkodzeń i widocznych oznak zużycia.
2. Zaleca się regularne czyszczenie. Ławeczkę należy czyścić miękką szmatką oraz wodą z mydłem.



UWAGA! Do czyszczenia ławeczki nie wolno używać rozpuszczalników, wybielaczy czy środków ścierających.

LISTA UŻYTYCH MATERIAŁÓW

Szczelbelki	PVC (polichlorek winylu)
Klamra łącząca	PA6 (poliamid) + GF (włókno szklane)
Wspornik	PA6 (poliamid) + GF (włókno szklane)
Wewnętrzna prowadnica	Sklejka drewniana

WYJAŚNIENIE SYMBOLI

	Producent
	Oznakowanie CE
	Numer referencyjny
	Data produkcji
	Zajrzyj do instrukcji używania
	Ostrzeżenie
	Numer serii
	Góra, nie przewracać
	Przechowywać w suchym miejscu
	Delikatne, obchodzić się ostrożnie

**REHA FUND Sp. z o.o.**

ul. Staniewicka 14, 03-310 Warszawa, Polska
tel.: +48 22 594 03 00, fax.: +48 22 594 03 07
e-mail: info@rehafund.pl www.rehafund.pl



Wer. 1.2
Wydano: 02/2021

**KARTA GWARANCYJNA
ŁAWECZKA DO WANNY EMMA 851**

Model:	Numer seryjny:	Data sprzedaży:	Podpis i pieczęćka sprzedawcy:

WARUNKI GWARANCJI

- Producent zapewnia klienta, że przedmiot sprzedaży, na który jest wydana niniejsza karta gwarancyjna jest fabrycznie nowy oraz wysokiej jakości.
- Ławeczka jest objęta 24 miesięcznym okresem gwarancji, pozostałe części są objęte 6 miesięcznym okresem gwarancji od daty sprzedaży w karcie gwarancyjnej.
- Podstawą do rozpatrzenia reklamacji gwarancyjnej jest dostarczenie poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej wraz z dołączonym dowodem zakupu.
- Ewentualne wady sprzętu zostaną usunięte przez firmę REHA FUND Sp. z o.o. lub autoryzowanych serwisantów pod warunkiem, że ławeczka była wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami w instrukcji użytkowania.
- Naprawa zostanie wykonana w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni, od daty przyjęcia sprzętu do punktu serwisowego.
- Gwarancją nie są objęte:
 - czynności związane z konserwacją, czyszczeniem i regulacją ławeczki opisane w instrukcji użytkowania;
 - części ulegające zużyciu podczas normalnego użytkowania;
 - mechaniczne i termiczne uszkodzenia ławeczki np. wygięcia, zarysowania, połamania itp.;
 - uszkodzenia powstałe wskutek używania sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi, zaniedbania, dokonania samodzielnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
- Przed oddaniem sprzętu do autoryzowanych serwisantów należy go wyczyścić zgodnie z instrukcją użytkowania, tak aby nadawał się do wykonania przeglądu serwisowego.
- Naprawy i wymiany części zamiennych powinny być wykonane przez autoryzowanych serwisantów firmy Reha Fund Sp. z o.o.
- W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego klient będzie obciążony kosztami przesyłki.
- Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień klienta wynikających z niezgodności towaru z umową.

WYKAZ NAPRAW SERWISOWYCH (*wypełnia serwis*)

Lp.	Data zgłoszenia	Nr zlecenia	Opis wady/ Zakres naprawy	Data wykonania naprawy	Pieczęć i podpis serwisu
1.					
2.					

NOTATKI