

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ŁAWECZKA DO WANNY Z REGULACJĄ AVA 853

Nr katalogowy:	RF-853
Max. bezpieczne obciążenie:	150 kg
Całkowita szerokość:	71-81cm
Rozstaw nasadek:	28,3 cm
Szerokość siedziska:	41,6 cm
Długość siedziska:	22,6 cm
Wysokość wgłębienia:	14,5 cm
Waga:	2 kg



UWAGA!

Przed rozpoczęciem korzystania z ławeczki należy uważnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami.



PRZEZNACZENIE

Ławeczka do wanny zapewnia stabilne siedzisko podczas kąpieli w standardowej wannie. Pomaga we wchodzeniu i wychodzeniu z wanny; pomaga nisko usiąść i/lub podnieść się z dna wanny. Przeznaczona jest dla osób starszych oraz osób o ograniczonej możliwości ruchowej (czasowej lub trwałej) spowodowanej, np. wylewem, udarem, wypadkiem komunikacyjnym, łamliwością kości, urazami kończyn, bioder, operacją.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Ławeczki nie można montować na wannie, gdy gumowe podkładki, znajdujące się na bocznej stronie wsporników nie mają pełnego kontaktu z pionową (lub prawie pionową) ścianą wanny, tak jak to pokazano na rys. 2.
2. Należy zawsze przed użyciem ławeczki upewnić się, że jest prawidłowo zamocowana.
3. Zużyta gumową nasadkę należy wymienić na nową. Kontrolę nasadki użytkownik obowiązany jest dokonywać we własnym zakresie, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
4. Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

CZĘŚCI ŁAWECZKI

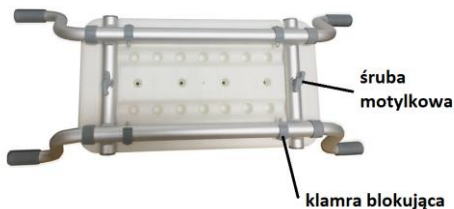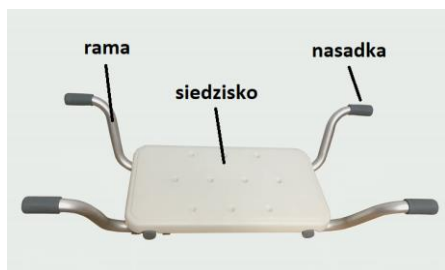

Powyższe zdjęcia mają charakter poglądowy.

MONTAŻ

1. Poluzuj śruby motylkowe znajdujące się na spodniej stronie ławeczki, obracając je przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
2. Zdejmij klamry blokujące.
3. Ustaw boczne rurki na odpowiedniej długości.
4. Załóż klamry blokujące.
5. Wkręć śruby motylkowe.



UWAGA!


Jeśli z jednej strony ławeczka znacznie wystaje poza brzeg wanny, może być to niebezpieczne dla użytkownika i grozić upadkiem.



UWAGA!

Zbyt mocne dokręcanie śrub motylkowych może spowodować ich uszkodzenie.

6. Przed użytkowaniem sprawdź, czy ławeczka jest bezpiecznie zablokowana. Ławeczka nie może być położona niesymetrycznie względem brzegów wanny, a zabezpieczenia nie mogą nie przylegać lub tylko częściowo przylegać do wanny jak jest to przedstawione na poniższym rysunku.

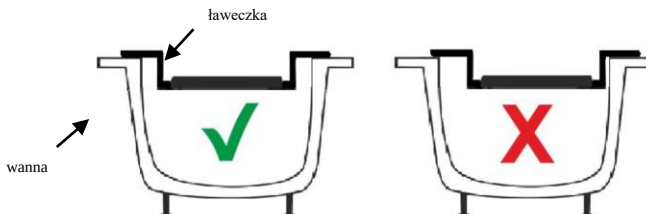

Powyższa grafika na charakter poglądowy.

7. Powyższą procedurę należy stosować za każdym razem podczas montowania ławeczki na wannie.



UWAGA!

Zawsze przed użyciem ławeczki upewnij się, że jest ona prawidłowo i stabilnie zamontowana do wanny.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Zaleca się regularną kontrolę ławeczki pod kątem wszelkich uszkodzeń lub widocznych oznak zużycia.
2. Zaleca się regularne czyszczenie. Ławeczkę należy czyścić miękką szmatką oraz wodą z mydłem.



UWAGA!

Do czyszczenia uchwytu nie wolno używać rozpuszczalników, wybielaczy czy środków ściernych.

LISTA UŻYTYCH MATERIAŁÓW

Siedzisko	HD-PE (polietylen dużej gęstości)
Nasadka	PVC (polichlorek winylu)
Rama	aluminium
Śruba motylkowa	stal nierdzewna
Klamra blokująca	PA (poliamid) + stal nierdzewna

WYJAŚNIENIE SYMBOLI

	Producent
	Oznakowanie CE
	Numer referencyjny
	Data produkcji
	Zajrzyj do instrukcji używania
	Ostrzeżenie

	Numer serii
	Góra, nie przewracać
	Przechowywać w suchym miejscu
	Delikatne, obchodzić się ostrożnie



REHA FUND Sp. z o.o.
ul. Staniewicka 14, 03-310 Warszawa, Polska
tel.: +48 22 594 03 00, fax.: +48 22 594 03 07
e-mail: info@rehafund.pl www.rehafund.pl



Wer. 1.3
Wydano: 07/2022

NOTATKI

**KARTA GWARANCYJNA
ŁAWECZKA DO WANNY Z REGULACJĄ AVA 853**

Model:	Numer seryjny:	Data sprzedaży:	Podpis i pieczęć sprzedawcy:

WARUNKI GWARANCJI

1. Producent zapewnia klienta, że przedmiot sprzedaży, na który jest wydana niniejsza karta gwarancyjna jest fabrycznie nowy oraz wysokiej jakości.
2. Ławeczka jest objęta 24 miesięcznym okresem gwarancji od daty sprzedaży w karcie gwarancyjnej.
3. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji gwarancyjnej jest dostarczenie poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej wraz z dołączonym dowodem zakupu.
4. Ewentualne wady sprzętu zostaną usunięte przez firmę REHA FUND Sp. z o.o. lub autoryzowanych serwisantów pod warunkiem, że ławeczka była wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami w instrukcji użytkowania.
5. Naprawa zostanie wykonana w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni, od daty przyjęcia sprzętu do punktu serwisowego.
6. Gwarancją nie są objęte:
 - czynności związane z konserwacją, czyszczeniem i regulacją ławeczki opisane w instrukcji użytkowania;
 - części ulegające zużyciu podczas normalnego użytkowania;
 - mechaniczne i termiczne uszkodzenia ławeczki np. wygięcia, zarysowania, połamania itp.;
 - uszkodzenia powstałe wskutek używania sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi, zaniedbania, dokonania samodzielnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
7. Przed oddaniem sprzętu do autoryzowanych serwisantów należy go wyczyścić zgodnie z instrukcją użytkowania, tak aby nadawał się do wykonania przeglądu serwisowego.
8. Naprawy i wymiany części zamiennych powinny być wykonane przez autoryzowanych serwisantów firmy Reha Fund Sp. z o.o.
9. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego klient będzie obciążony kosztami przesyłki.
10. Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
11. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień klienta wynikających z niezgodności towaru z umową.

WYKAZ NAPRAW SERWISOWYCH *(wypełnia serwis)*

Lp.	Data zgłoszenia	Nr zlecenia	Opis wady/ Zakres naprawy	Data wykonania naprawy	Pieczęć i podpis serwisu
1.					
2.					