

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA NASADKA TOALETOWA KATE 871

PRZEZNACZENIE

Nasadka toaletowa służy do zwiększenia wysokości toalety do poziomu najbardziej komfortowego dla użytkownika. Dzięki temu łatwiej jest usiąść i wstać. Przeznaczona jest dla wszystkich osób, którym kłopot sprawia przemieszczanie się i tradycyjne korzystanie z toalety, np. pacjenci po operacji biodra lub urazie, seniorzy.

MODELE		
Nr katalogowy	RF-871/11	RF-871/15
Max. bezpieczne obciążenie	150 kg	150 kg
Wysokość z przodu	117 mm	147 mm
Wysokość z tyłu	147 mm	177 mm
Wysokość z tyłu z klipsami	207 mm	237 mm
Szerokość siedziska	367 mm	367 mm
Głębokość siedziska	401 mm	401 mm
Szerokość otworu	208 mm	208 mm
Głębokość otworu	264 mm	264 mm
Waga	1,05 kg	1,32 kg



UWAGA! Przed rozpoczęciem korzystania z nasadki należy uważnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Dla zachowania bezpieczeństwa należy przestrzegać poniższych zaleceń:

1. Nasadka toaletowa nie jest przeznaczona do montażu na stałe. Należy ją poluzować i docisnąć raz w tygodniu, aby zapewnić właściwe dopasowanie.
2. Powoli usiądź na nasadce zginając kolana, jeśli to możliwe zegnij biodra i kolana równocześnie.
3. Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.
4. Nie dopuszczać do kontaktu z nagrzanymi urządzeniami.
5. Przed użyciem bezpiecznie przymocuj do toalety.



UWAGA! Nieprzestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa może doprowadzić do poważnych wypadków.



UWAGA! Skonsultuj się ze swoim lekarzem lub rehabilitantem w celu ustalenia odpowiedniego sposobu korzystania z nasadki, zgodnie z Twoimi możliwościami funkcjonalnymi i czynnościami dnia codziennego.



UWAGA! Poniższa informacja to zalecenie producenta, jednak powinno być ono skonsultowane z twoim lekarzem lub rehabilitantem.

MONTAŻ

- 1. Aby zamontować nasadkę, należy najpierw zdjąć z toalety deskę z klapką.
- 2. Poluzuj klipsy w nasadce (rys. 1).
- 3. Umieść nasadkę na muszli (rys. 2).
- 4. Zamontuj nasadkę na toaletę za pomocą za pomocą klipsów (rys. 3).
- 5. Sprawdź stabilność nasadki (rys. 4).

rys. 1 	rys. 2 
rys. 3 	rys. 4 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- 1. Zaleca się regularną kontrolę nasadki pod kątem wszelkich uszkodzeń czy widocznych oznak zużycia.
- 2. Zaleca się regularne czyszczenie nasadki miękką szmatką i wodą z mydłem. Nasadkę po wyczyszczeniu należy osuszyć miękką szmatką.
- 3. Nasadkę można zdemontować w celu wyczyszczenia odkręcając boczne pokrętko.



UWAGA! Do czyszczenia i odkażania nasadki nie wolno używać rozpuszczalników, wybielaczy, środków ściągających, roztworów na bazie alkaliów, rozcieńczalników, acetonów i innych roztworów.



UWAGA! Regularnie sprawdzaj mocowanie nasadki, aby upewnić się, że jest bezpieczna.

LISTA UŻYTYCH MATERIAŁÓW

Cała konstrukcja	PP (polipropylen)
------------------	-------------------

WYJAŚNIENIE SYMBOLI

	Producent
	Oznakowanie CE
	Numer referencyjny
	Data produkcji
	Zajrzyj do instrukcji używania
	Ostrzeżenie
	Numer serii
	Góra, nie przewracać

	Przechowywać w suchym miejscu
	Delikatne, obchodzić się ostrożnie



REHA FUND Sp. z o.o.

ul. Staniewicka 14, 03-310 Warszawa, Polska

tel.: +48 22 594 03 00, fax.: +48 22 594 03 07

e-mail: info@rehafund.pl www.rehafund.pl



Wer. 1.1

Wydano: 05/2023

NOTATKI

**KARTA GWARANCYJNA
NASADKA TOALETOWA KATE 871**

Model:	Numer seryjny:	Data sprzedaży:	Podpis i pieczęćka sprzedawcy:

WARUNKI GWARANCJI

1. Producent zapewnia klienta, że przedmiot sprzedaży, na który jest wydana niniejsza karta gwarancyjna jest fabrycznie nowy oraz wysokiej jakości.
2. Siedzisko nasadki jest objęte 24 miesięcznym okresem gwarancji, pozostałe części objęte są 6 miesięcznym okresem gwarancji od daty sprzedaży w karcie gwarancyjnej.
3. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji gwarancyjnej jest dostarczenie poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej wraz z dołączonym dowodem zakupu.
4. Ewentualne wady sprzętu zostaną usunięte przez firmę REHA FUND Sp. z o.o. lub autoryzowanych serwisantów pod warunkiem, że nasadka była wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami w instrukcji użytkowania.
5. Naprawa zostanie wykonana w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni, od daty przyjęcia sprzętu do punktu serwisowego.
6. Gwarancją nie są objęte:
 - czynności związane z konserwacją, czyszczeniem i regulacją nasadki opisane w instrukcji użytkowania;
 - części ulegające zużyciu podczas normalnego użytkowania;
 - mechaniczne i termiczne uszkodzenia nasadki np. wygięcia, zarysowania, połamania itp.;
 - uszkodzenia powstałe wskutek używania sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi, zaniedbania, dokonania samodzielnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
7. Przed oddaniem sprzętu do autoryzowanych serwisantów należy go wyczyścić zgodnie z instrukcją użytkowania, tak aby nadawał się do wykonania przeglądu serwisowego.
8. Naprawy i wymiany części zamiennych powinny być wykonane przez autoryzowanych serwisantów firmy Reha Fund Sp. z o.o.
9. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego klient będzie obciążony kosztami przesyłki.
10. Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
11. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień klienta wynikających z niezgodności towaru z umową.

WYKAZ NAPRAW SERWISOWYCH *(wypełnia serwis)*

Lp.	Data zgłoszenia	Nr zlecenia	Opis wady/ Zakres naprawy	Data wykonania naprawy	Pieczęć i podpis serwisu
1.					
2.					