

KARTA GWARANCYJNA

ROTOR SKŁADANY 903

Numer modelu:	Numer seryjny:	Data sprzedaży:	Podpis i pieczęć sprzedawcy:

WARUNKI GWARANCJI

- Producent zapewnia klienta, że przedmiot sprzedaży, na który jest wydana niniejsza karta gwarancyjna jest fabrycznie nowy oraz wysokiej jakości.
- Wyrób jest objęty 24 miesięcznym okresem gwarancji od daty sprzedaży w karcie gwarancyjnej.
- Podstawą do rozpatrzenia reklamacji gwarancyjnej jest dostarczenie poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej wraz z dołączonym dowodem zakupu.
- Ewentualne wady wyrobu zostaną usunięte przez firmę REHA FUND Sp. z o.o. lub autoryzowanych serwisantów pod warunkiem, że wyrób był wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami w instrukcji używania.
- Naprawa zostanie wykonana w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni, od daty przyjęcia sprzętu do punktu serwisowego.
- Gwarancją nie są objęte:
 - czynności związane z konserwacją, czyszczeniem i regulacją opisane w instrukcji używania;
 - części ulegające zużyciu podczas normalnego użytkowania;
 - mechaniczne i termiczne uszkodzenia np. wygięcia, zarysowania, połamania itp.;
 - uszkodzenia powstałe wskutek używania sprzętu niezgodnie z instrukcją używania, zaniedbania,
- Przed oddaniem wyrobu do autoryzowanych serwisantów należy go wyczyścić zgodnie z instrukcją używania, tak aby nadawał się do wykonania przeglądu serwisowego.
- Naprawy i wymiany części zamiennych powinny być wykonane przez autoryzowanych serwisantów firmy Reha Fund Sp. z o.o.
- W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego klient będzie obciążony kosztami przesyłki.
- Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień klienta wynikających z niezgodności towaru z umową.

WYKAZ NAPRAW SERWISOWYCH (wypełnia serwis)

Lp.	Data zgłoszenia	Nr zlecenia	Opis wady/ Zakres naprawy	Data wykonania naprawy	Pieczęć i podpis serwisu
1.					
2.					



PRODUCENT I DYSTRYBUTOR SPRZĘTU MEDYCZNEGO
ul. Staniewicka 14, 03-310 Warszawa, www.rehafund.pl

INSTRUKCJA UŻYWANIA

ROTOR SKŁADANY 903

Nr katalogowy RF-903

Waga: 2,1kg
Szerokość: 42 cm
Wysokość: 30 cm
Długość: 23 cm
Max. waga użytkownika: 100 kg



UWAGA! Przed rozpoczęciem korzystania z rotora należy uważnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami.

PRZEZNACZENIE

Rotor przeznaczony jest do ćwiczeń czynnych (oporowych) kończyn dolnych i górnych przy schorzeniach urazowo ortopedycznych oraz reumatycznych. Ma zastosowanie na oddziałach rehabilitacji, w domach pomocy społecznej oraz do ćwiczeń w domu. Rotor jest przeznaczony do bezpiecznego wzmocnienia mięśni, ćwiczeń kondycyjnych mięśni, stymulacji układu krążenia.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA


Dla zachowania bezpieczeństwa należy przestrzegać poniższych zaleceń:

- Należy dopilnować, aby przed rozpoczęciem rotor stał na stabilnej płaskiej powierzchni. W razie potrzeby użyj maty antypoślizgowej.
- Przy ćwiczeniach czynnych kończyn dolnych rotor należy ustawić bezpośrednio na podłodze.
- Ćwiczenia należy przeprowadzać w pozycji siedzącej. Zamontowane nasadki przeciwpoślizgowe zabezpieczają rotor przed przesuwaniem się.
- Nie pozwól dzieciom na zbliżanie się do rotora w czasie ćwiczeń. Nie pozwól im wspinać się na urządzenie.
- W czasie ćwiczeń upewnij się, że wokół przyrządu znajduje się 1 m wolnej przestrzeni.
- W czasie ćwiczeń noś wygodną odzież.
- Ćwicz we własnym tempie, nie wykonuj nadmiernej liczby ćwiczeń.
- Nigdy nie stawaj na pedałach i nie ćwicz w pozycji stojącej.
- Metal wokół korby i korba mogą się nagrzać w czasie ćwiczeń.
- Przerwij ćwiczenia, jeśli czujesz zawroty głowy lub źle się czujesz.
- Jeśli używasz rotora do ćwiczeń kończyn górnych, upewnij się, że stoi na stole na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- Unikaj luźnej części garderoby, które mogą zaplatać się w wystające części przyrządu w czasie ćwiczeń.
- Nie używaj rotora z nieokreślonymi częściami. Przed każdym użyciem sprawdzaj czy pedały są prawidłowo zamocowane.




UWAGA! Przed rozpoczęciem ćwiczeń skonsultuj się z lekarzem lub fizjoterapeutą.

CZĘŚCI ROTORA

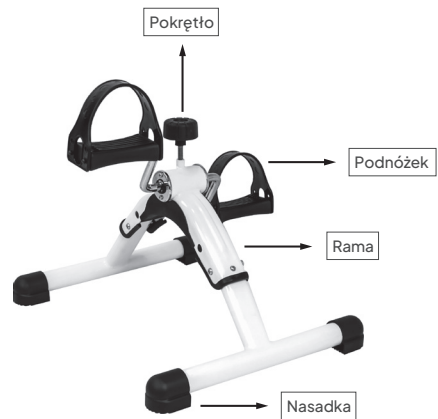

SPOSÓB UŻYCIA

- 1. Rozłóż ramę rotora jak na rysunku nr 1.
- 2. Dostosuj obciążenie za pomocą pokrętła (rys. 2).

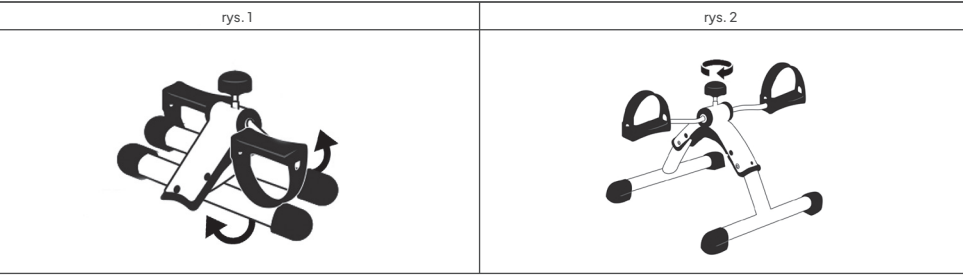

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Zaleca się regularną kontrolę rotora pod kątem wszelkich uszkodzeń czy widocznych oznak zużycia. Zaleca się regularne czyszczenie rotora miękką szmatką i wodą z mydłem. Rotor po wyczyszczeniu należy osuszyć miękką szmatką.

-  **UWAGA!** Do czyszczenia rotora nie wolno używać rozpuszczalników, wybielaczy czy środków ściernych.
-  **UWAGA!** Raz na miesiąc zaleca się wkropić kilka kropel oleju przekładniowego do otworu pod pokrętło regulacji oporu.

LISTA UŻYTYCH MATERIAŁÓW

Rama	Stal
Podnóżki	PVC+ABS
Nasadki	Guma
Pokrętło	Stal + PVC

WYJAŚNIENIE SYMBOLI

	Producent		Ostrzeżenie
	Oznakowanie CE		Kod partii
	Numer katalogowy		Ilość
	Data produkcji		Góra, nie przewracać
	Zajrzyj do instrukcji używania		Chronić przed wilgocią
	Wyrób medyczny		Delikatny, obchodzić się ostrożnie

 **REHA FUND Sp. z o.o.**
ul. Staniewicka 14
03-310 Warszawa, Polska
www.rehafund.pl


I/PL/RF-903/3/13.06.2024
Data wydania instrukcji używania 06.2024 v.3

NOTATKI