

**INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
UCHWYT PROSTY CEZAR 911
WYRÓB MEDYCZNY**

UWAGA!

Przed rozpoczęciem korzystania z uchwytu należy uważnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami.



Model	RF- 910/20	RF- 910/30	RF- 910/40	RF- 910/50	RF- 910/60	RF- 910/70	RF- 910/80	RF- 910/90	RF- 910/100
Długość uchwytu	20 cm	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm
Średnica rurki	3,2 cm	3,2 cm	3,2 cm	3,2 cm	3,2 cm	3,2 cm	3,2 cm	3,2 cm	3,2 cm
Odległość od ściany do zewnętrznej ścianki uchwytu	11 cm	11 cm	11 cm	11 cm	11 cm	11 cm	11 cm	11 cm	11 cm
Kolor	biały	biały	biały	biały	biały	biały	biały	biały	biały
Max waga użytkownika	135 kg	135 kg	135 kg	135 kg	135 kg	135 kg	135 kg	135 kg	135 kg
Waga	0,35 kg	0,40 kg	0,55 kg	0,7 kg	0,85 kg	1 kg	1,15 kg	1,3 kg	1,45 kg

PRZEZNACZENIE

Uchwyt pomaga w utrzymaniu równowagi oraz przemieszczaniu się osobom z ograniczoną sprawnością ruchową, zwiększa bezpieczeństwo osób korzystających z urządzeń sanitarnych, nadaje się do zamontowania w łazience. Uchwyt przeznaczony jest do użytkowania w mieszkaniach, domach opieki, placówkach zajmowanych przez osoby niepełnosprawne. Produkt służy głównie do zapobiegania upadkom.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Po zamontowaniu uchwytów upewnić, że są one dobrze przymocowane do podłoża i nie grożą odpadnięciem. Zbyt słabe zamocowanie uchwytów grozi upadkiem i urazem użytkownika.
- Zabrania się montażu uchwytów do ścian słabych, np. płyt kartonowo-gipsowych, gdyż podczas użytkowania może nastąpić zawalenie ściany, a w efekcie użytkownik może doznać ciężkich urazów.
- Należy zwracać szczególną uwagę na mocne i pewne złapanie uchwytu (szczególnie, jeśli jest on mokry), przed pełnym oparciem ciężaru ciała na uchwycie. Zbyt słabe złapanie uchwytu może doprowadzić do przewrócenia się użytkownika i urazu.
- Osoby uczulone na stal nie mogą używać produktu.
- Nie instaluj tego sprzętu bez uprzedniego przeczytania i zrozumienia niniejszej instrukcji. Jeśli nie jesteś w stanie zrozumieć tych ostrzeżeń i instrukcji, skontaktuj się z pracownikiem służby zdrowia, sprzedawcą lub personelem technicznym w celu uzyskania pomocy przed przystąpieniem do instalacji tego sprzętu, w przeciwnym razie może dojść do obrażeń.
- Uchwyty zwiększają bezpieczeństwo w łazienkach i toaletach, jeśli są przymocowane zgodnie z instrukcją. Lokalizacja, rozmiar i kąt uchwytu powinien zostać określony przez wykwalifikowanego specjalistę, aby zapewnić optymalne bezpieczeństwo i funkcjonalność.
- Zachowaj ostrożność na mokrej powierzchni wanny lub podłogi.

8. Użytkownicy o ograniczonych możliwościach fizycznych powinni być nadzorowani lub wspomagani w łazienkach i toaletach, nawet podczas korzystania z uchwytu.
9. Uchwyt może zapewnić wsparcie i zwiększoną stabilność do 135 kg. Uchwyty nie są zaprojektowane do podtrzymywania całkowitej wagi osoby. Używaj uchwytu wyłącznie w celu zapewnienia wsparcia.
10. Uchwyt może być używany tylko do zadań, do których jest przeznaczony. Nie używaj go do wiązania przedmiotów, wieszania na nim przedmiotów lub mocowania do niego przedmiotów. Może to mieć poważny negatywny wpływ na jego działanie i bezpieczeństwo.
11. Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.
12. Uchwyt ma być używany tylko jako urządzenie wspomagające równowagę, a nie jako urządzenie do przenoszenia ciężarów.



UWAGA!

Nieprzestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa może doprowadzić do poważnych wypadków.




UWAGA!

Skonsultuj się ze swoim lekarzem lub rehabilitantem w celu ustalenia odpowiedniego sposobu korzystania z uchwytu, zgodnie z Twoimi możliwościami funkcjonalnymi i czynnościami dnia codziennego.

MONTAŻ

1. Przygotuj zestaw do montażu (rys.1).
2. Nawierć otwory dla korpusów łącznikowych o średnicy odpowiadającej średnicy korpusu łącznikowego, którego rozmieszczenie w ścianie będzie odpowiadało rozmieszczeniu otworów w podstawie uchwytu. Głębokość otworu w podłożu powinna być równa głębokości osadzenia łącznika powiększonej o 10 mm (rys. 2).
3. Oczyszczyć otwór z pyłu.
4. Wprowadź korpus łącznikowy w nawiercone otwory (rys.3).
5. Między podłoże a uchwyt założyć podkładki wykonane z tworzywa sztucznego (rys.3).
6. Wkręcić, stalowe wkręty w korpusy łącznikowe na całą ich długość. Dla wkrętów dołączonych w komplecie z uchwytem należy stosować podłoże wykonane z cegły pełnej ceramicznej i silikonowej lub zwykłego betonu. Należy zwrócić uwagę aby otwór nie wypadł w fudze. Nie zaleca się montażu uchwytu na podłożu wykonanym z płyty kartonowo-gipsowej.
7. Założyć zatyczki wykańczające na lby stalowych wkrętów (rys. 4).

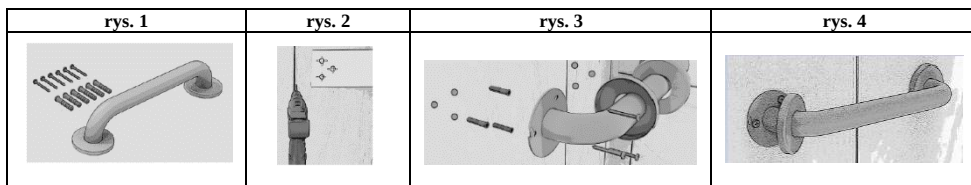

SPOSÓB UŻYTKOWANIA

1. Złapać mocno ręką za uchwyt. Upewnić się, że ręka nie ślizga się na uchwycie, szczególnie jeżeli uchwyt jest wilgotny.
2. Podciągnąć się na uchwycie i wykonać zamierzoną czynność, np. wstać.
3. Przed puszczeniem uchwytu upewnić się, że możliwe będzie bezpieczne utrzymanie przyjętej pozycji bez podparcia uchwytem.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- W trakcie użytkowania uchwytu należy cyklicznie sprawdzać, czy kołki mocujące nie zostały obłuzowane. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek luzów należy sprawdzić ich przyczynę i dokręcić wkręty lub wymienić na nowe wraz z korpusami łącznikowymi.
- W przypadku samoczynnego opadania ramienia uchwytu z pozycji pionowej należy dokręcić śrubę mocującą.
- Uchwyt powinien być regularnie sprawdzany i konserwowany, a wszelkie widoczne uszkodzenia lub ślady niewłaściwego użytkowania należy usunąć.
- Utrzymuj swój uchwyt w czystości. Ten produkt należy okresowo czyścić przy użyciu zwykłych domowych środków do czyszczenia łazienki. Po czyszczeniu zawsze spłucz uchwyt wodą, a następnie wytrzyj dokładnie wilgotną szmatką, aby usunąć wszelkie resztki materiału czyszczącego. Nie używaj silnych lub stężonych kwaśnych, zasadowych lub innych środków czyszczących, ponieważ mogą one odbarwić lub uszkodzić produkt.
- Tam, gdzie dezynfekcja jest konieczna, należy zastosować standardowe procedury dezynfekcji sprzętu.
- Ten uchwyt jest dostarczany w opakowaniu, aby utrzymać produkt w stanie niezanieczyszczonym do czasu instalacji. Opakowanie nadaje się do recyklingu i należy je zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

- Po każdej regulacji, naprawie lub serwisie przed ponownym użyciem upewnij się, że wszystkie elementy mocujące są dobrze dokręcone.
- Upewnij się, że uchwyty są prawidłowo i bezpiecznie zamontowane. Nigdy nie używaj uchwytu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek luzu.



UWAGA!

Do czyszczenia uchwytu nie wolno używać rozpuszczalników, wybielaczy czy środków ściernych.



UWAGA!

Regularnie sprawdzaj mocowanie uchwytu, aby upewnić się, że jest bezpieczny.

LISTA UŻYTYCH MATERIAŁÓW

Uchwyt jest zrobiony ze stali – 100%.

WYJAŚNIENIE SYMBOLI

	Producent
	Oznakowanie CE
	Numer referencyjny
	Data produkcji
	Zajrzyj do instrukcji używania
	Ostrzeżenie
	Numer serii
	Góra, nie przewracać
	Przechowywać w suchym miejscu
	Delikatne, obchodzić się ostrożnie



REHA FUND Sp. z o.o.

ul. Staniewicka 14, 03-310 Warszawa, Polska
tel.: +48 22 594 03 00, fax.: +48 22 594 03 07
e-mail: info@rehafund.pl www.rehafund.pl



Wer. 1.2
Wydano: 08/2021

NOTATKI

**KARTA GWARANCYJNA
UCHWYT PROSTY CEZAR 911**

Model:	Numer seryjny:	Data sprzedaży:	Podpis i pieczęć sprzedawcy:

WARUNKI GWARANCJI

1. Producent zapewnia klienta, że przedmiot sprzedaży, na który jest wydana niniejsza karta gwarancyjna jest fabrycznie nowy oraz wysokiej jakości.
2. Uchwyt jest objęty 24-miesięcznym okresem gwarancji od daty sprzedaży w karcie gwarancyjnej.
3. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji gwarancyjnej jest dostarczenie poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej wraz z dołączonym dowodem zakupu.
4. Ewentualne wady sprzętu zostaną usunięte przez firmę REHA FUND Sp. z o.o. lub autoryzowanych serwisantów pod warunkiem, że uchwyt był wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami w instrukcji użytkowania.
5. Naprawa zostanie wykonana w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni, od daty przyjęcia sprzętu do punktu serwisowego.
6. Gwarancją nie są objęte:
 - czynności związane z konserwacją, czyszczeniem i regulacją uchwytu opisane w instrukcji użytkowania;
 - części ulegające zużyciu podczas normalnego użytkowania;
 - mechaniczne i termiczne uszkodzenia uchwytu, np. wygięcia, zarysowania, połamania itp.;
 - uszkodzenia powstałe wskutek używania sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi, zaniedbania, dokonania samodzielnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
7. Przed oddaniem sprzętu do autoryzowanych serwisantów należy go wyczyścić zgodnie z instrukcją użytkowania, tak aby nadawał się do wykonania przeglądu serwisowego.
8. Naprawy i wymiany części zamiennych powinny być wykonane przez autoryzowanych serwisantów firmy Reha Fund Sp. z o.o.
9. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego klient będzie obciążony kosztami przesyłki.
10. Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
11. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień klienta wynikających z niezgodności towaru z umową.

WYKAZ NAPRAW SERWISOWYCH *(wypełnia serwis)*

Lp.	Data zgłoszenia	Nr zlecenia	Opis wady/ Zakres naprawy	Data wykonania naprawy	Pieczęć i podpis serwisu
1.					
2.					