

INSTRUKCJA UŻYWANIA

RF-C1 Materac przeciwoleżynowy samodzielny RehaComfort

RF-S1 Materac podkładowy i samodzielny RehaStandard


RF-B1 Materac przeciwoleżynowy podkładowy RehaBASIC

I. WPROWADZENIE

Szanowni Państwo,
Serdecznie dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy REHA FUND Sp. z o.o., czołowego dostawcy materiałów zaopatrzenia medycznego i artykułów rehabilitacyjnych na rynku polskim.

Instrukcja używania zawiera wskazówki i sugestie, których znajomość jest niezbędna do prawidłowego korzystania z wyrobu.

Zdjęcia użyte w instrukcji mają charakter poglądowy!

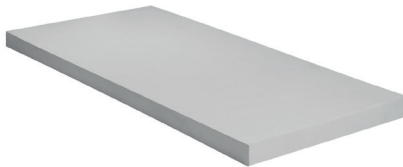

UWAGA! Przed użyciem wyrobu należy zapoznać się z instrukcją używania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z wyrobu, nieprzestrzeganie zasad bezpiecznego używania oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.

II. CHARAKTERYSTYKA

Materac jest wykonany z nietoksycznej, pianki poliuretanowej. Materac występuje w rozmiarach: 200 x 90 x 7 cm; 200 x 90 x 10 cm; 200 x 90 x 12 cm i 200 x 90 x 15 cm (tolerancja wymiarów +/-10 mm) i dostępny jest w pokrowcu: bawełniano-poliestrowy (REF-15/P/B); elastycznym-nieprzemakalnym (REF-15/EN), bawełniano-elastycznym-nieprzemakalnym (REF-15/P/BEN) oraz nieprzemakalnym (REF-15/P/N).

III. PRZEZNACZENIE I ZASTOSOWANIE

Materac przeciwoleżynowy o płaskim profilu, zalecany do profilaktyki powstawania odleżyn I stopnia. Jest doskonałym wyborem dla osób wymagających długotrwałej opieki. Rekomendowany jest do łóżek z metalowym leżem oraz drewnianymi/metalowymi lamelami. Przynosi ulgę w bólu pleców.

IV. PRZECIWSKAZANIA

Nie stosować wilgotnego wyrobu bezpośrednio w kontakcie ze skórą.

Nie stosować w przypadku wystąpienia reakcji alergicznych skóry.

Nie stosować, jeśli nastąpiło uszkodzenie mechaniczne wyrobu (np. pęknięcie, rozerwanie). Nie stosować inaczej niż zgodnie z przeznaczeniem.

V. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYWANIA

Przed użyciem należy skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia celowość zastosowania, dobór wyrobu i sposób używania.

Przed pierwszym użyciem należy wyprać pokrowiec.

Wyrób należy dobrać odpowiednio do rozmiaru ciała.

Nie wystawiać produktu na działanie otwartego płomienia lub innych źródeł ognia mogących wywołać zapłon.

Pianka wystawiona na działanie otwartego ognia gwałtownie się zapala.

Nie wystawiać produktu na długotrwałe działanie niskich temperatur (poniżej 5 °C).

Opakowanie produktu nie jest zabawką.

Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

Nie wystawiać produktu na długotrwałe, bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ponieważ pod wpływem nasłonecznienia może ulec przebarwieniu. Przebarwienie pianki nie wpływa na jej właściwości fizyczno-mechaniczne produktu.

VI. SPOSÓB UŻYWANIA

1. Wymij materac z opakowania
2. Umieść materac na stabilnym łóżku lub ramie, aby zapobiec jego przesuwaniu się.
3. Po transporcie wyrób potrzebuje 24 h na uzyskanie pełnych właściwości użytkowych. Pianka z którego wykonany jest materac w transporcie może ulec chwilowej deformacji.
4. Zawsze używaj przesteradła lub pokrowca na materacu przeciwoleżynowym, który można łatwo zdjąć i prać, aby utrzymać higienę.
5. W celu zapobiegania odkształceniu materaca, podczas jego używania należy regularnie go obracać stronami.

VII. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Piankę czyścić delikatną szmatką zamoczoną w ciepłej wodzie z dodatkiem środków do prania. Po wyczyszczeniu dobrze wysuszyć.
Nie moczyć całej pianki w wodzie.
Dla własnego bezpieczeństwa kontroluj na bieżąco stan wyrobu.

pielęgnacja pokrowców do materaca	15/P/EN	    
	15/P/B	     
	15/P/N	   
	15/P/BEN	     

VIII. KONIEC UŻYWANIA

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas kontroli wyrobu zgodnie z zaleceniami producenta. Patrz punkt instrukcji: Czyszczenie i Konserwacja - należy niezwłocznie zaprzestać korzystania z wyrobu. Po zakończeniu używania należy poddać wyrób utylizacji zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.

IX. PRZEWIDZANY OKRES UŻYWANIA

Przewidzany okres używania materaca to 2 lata. Ten czas może być dłuższy lub krótszy, zależnie od częstotliwości korzystania i konserwacji wyrobu.

X. GWARANCJA

Producent zapewnia klientowi, że przedmiot sprzedaży jest fabrycznie nowy oraz wysokiej jakości.
Wyrób objęty jest gwarancją (szczegółowe warunki gwarancji znajdują się na stronie internetowej Producenta).
Wyrób powinien być wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami w instrukcji używania.

XI. GLOSARIUSZ SYMBOLI

	Producent		Przechowywać z dala od światła słonecznego
	Oznakowanie CE		Najniższa dopuszczalna temperatura
	Numer katalogowy		Prać w temperaturze max 60°C
	Numer modelu		Prać w temperaturze max 90°C
	Data produkcji		Prać w temperaturze max 95°C
	Zajrzyj do instrukcji używania		Prać na sucho bez użycia rozpuszczalników
	Wyrób medyczny		Prasować w temperaturze maksymalnie 150 °C
	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu		Nie prasować
	Ostrzeżenie		Odporność na suszenie 70 °C
	Kod partii		Nie czyścić chemicznie
	Ilość		Nie wybielać
	Dbaj o czystość		Suszyć w pozycji poziomej
	Chronić przed wilgocią		Nie prać w suszarce bębnowej
	Nie używać, jeśli opakowanie zostało uszkodzone		Dopuszczalne suszenie w suszarce bębnowej w normalnej temperaturze