

INSTRUKCJA UŻYWANIA

PODUSZKA DO SIEDZENIA KOMFORT



PRZEZNACZENIE

Poduszka do siedzenia Komfort zalecana jest w profilaktyce przeciwoleżynowej i w stanach po powstaniu odleżyn. Zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza i odpowiednie ułożenie ciała. Doskonale sprawdza się również dla osób przebywających długotrwale w pozycji siedzącej.

CHARAKTERYSTYKA

Poduszka jest wykonana z nietoksycznej, profilowanej pianki poliuretanowej. Wymiary: 40,5 x 44 x 9 cm. Poduszka dostępna jest w wersji z pokrowcem bawełniano – poliestrowym, nieprzemakalnym (100 % poliester).

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Czyścić delikatną szmatką zamoczoną w ciepłej wodzie z dodatkiem łagodnych środków do prania. Po wyczyszczeniu dobrze wysuszyć. Nie namaczać całej pianki w wodzie.

PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować wilgotnego wyrobu bezpośrednio w kontakcie ze skórą.

Nie stosować w przypadku wystąpienia reakcji alergicznych skóry.

Nie stosować, jeśli nastąpiło uszkodzenie mechaniczne wyrobu (np. pęknięcie, rozerwanie).

Nie stosować inaczej niż zgodnie z przeznaczeniem

⚠ OSTRZEŻENIA

Przed użyciem skonsultować celowość zastosowania, dobór wyrobu i sposób używania z lekarzem lub specjalistą rehabilitantem. Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania. Przed pierwszym użyciem należy wyprać pokrowiec. Wyrób należy dobrać odpowiednio do rozmiaru ciała. Nie wystawiać wyrobu na działanie otwartego płomienia lub innych źródeł ognia mogących wywołać zapłon. Pianka wystawiona na działanie otwartego ognia gwałtownie się zapala. Nie wystawiać wyrobu na długotrwałe działanie niskich temperatur (poniżej 5 °C).

Opakowanie wyrobu nie jest zabawką. Nie wystawiać wyrobu na długotrwałe, bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ponieważ pod wpływem nasłonecznienia może ulec przebarwieniu. Przebarwienie pianki nie wpływa na jej właściwości fizyczno-mechaniczne produktu

GWARANCJA

Producent zapewnia klienta, że przedmiot sprzedaży jest fabrycznie nowy oraz wysokiej jakości. Wyrób objęty jest gwarancją (szczegółowe warunki gwarancji znajdują się na stronie internetowej Producenta).

Wyrób powinien być wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami w instrukcji używania.

Glosariusz symboli

Producent	Data produkcji	Chronić przed wilgocią
Numer katalogowy	Oznakowanie CE	Najniższa dopuszczalna temperatura
Zajrzyj do instrukcji używania	Ostrzeżenie	Nie prać
Kod partii	Dbaj o czystość	Nie prasować
Wyrób medyczny	Numer modelu	Suszyć w pozycji poziomej
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu	Przechowywać z dala od światła słonecznego	Nie czyścić chemicznie
Ilość	Nie używać, jeśli opakowanie zostało uszkodzone	Nie wybielać

Data wydania instrukcji używania: 01.2025 v.1



REHA FUND Sp. z o.o.

ul. Staniewicka 14

03-310 Warszawa, Polska (Polnad)

e-mail: info@rehafund.pl

www.rehafund.pl

I/RF-K1/1/15.01.2025