

INSTRUKCJA UŻYWANIA

Podkładka przeciwoślężynowa pod głowę Runa



PRZEZNACZENIE

Podkładka przeciwoślężynowa piankowa zapewnia odpowiednią stabilizację i redukcję nacisku podłoża na tkanki miękkie w okolicach głowy.

CHARAKTERYSTYKA

Podkładka wykonana jest z pianki poliuretanowej o wymiarach 18 x 16 x 9 cm.

W opakowaniu znajduje się 1 sztuka.

Produkt dostępny jest w dwóch rozmiarach: rozm. M – 18 x 16 x 9 cm oraz L – 23 x 21 x 10 cm.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Piankę czyścić delikatną szmatką zamoczoną w ciepłej wodzie z dodatkiem środków do prania.

Po wyczyszczeniu dobrze wysuszyć. Nie moczyć całej pianki w wodzie.

PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować wilgotnego wyrobu bezpośrednio w kontakcie ze skórą.

Nie stosować w przypadku wystąpienia reakcji alergicznych skóry.

Nie stosować, jeśli nastąpiło uszkodzenie mechaniczne wyrobu (np. pęknięcie, rozerwanie).

⚠️ OSTRZEŻENIA

Przed użyciem skonsultować celowość zastosowania, dobór wyrobu i sposób używania z lekarzem lub specjalistą rehabilitantem.

Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

Nie wystawiać produktu na działanie otwartego płomienia lub innych źródeł ognia mogących wywołać zapłon. Pianka wystawiona na działanie otwartego ognia gwałtownie się zapala.

Nie wystawiać produktu na długotrwałe działanie niskich temperatur (poniżej 5°C).

Opakowanie wyrobu nie jest zabawką.

Nie wystawiać produktu na długotrwałe, bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ponieważ pod wpływem nasłonecznienia może ulec przebarwieniu. Przebarwienie pianki nie wpływa na jej właściwości fizyczno-mechaniczne produktu.

GWARANCJA

Wyrób objęty jest 24-miesięcznym okresem gwarancji. Wyrób powinien być wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami w instrukcji używania. Gwarancja nie obejmuje usterek powstałych w skutek używania wyrobu niezgodnie z instrukcją używania, zaniedbań, dokonywania samodzielnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych. Do serwisu produkt należy dostarczyć czysty.

W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia, nabywca będzie obciążony kosztami realizacji i reklamacji. Gwarancja jest realizowana na podstawie dowodu zakupu. Zasięg terytorialny ochrony gwarancji obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień nabywcy wynikających z niezgodności towaru z umową.

Wyjaśnienie symboli

Producent	Kod partii	Oznakowanie CE	Dbaj o czystość	Chronić przed wilgocią
Numer katalogowy	Wyrób medyczny	Najniższa dopuszczalna temperatura	Ostrzeżenie	Nie używać, jeśli opakowanie zostało uszkodzone
Zajrzyj do instrukcji używania	Data produkcji	Przechowywać z dala od światła słonecznego	Numer modelu	

Data wydania instrukcji używania: 01.2024 v.2



REHA FUND Sp. z o.o.

ul. Staniewicka 14

03-310 Warszawa, Polska

www.rehafund.pl