

INSTRUKCJA UŻYWANIA

Podkładka przeciwośloneżnowa trójkątna



CHARAKTERYSTYKA

Podkładka przeciwośloneżnowa trójkątna wykonana z nietoksycznej pianki poliuretanowej.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Czyścić delikatną szmatką zamoczoną w ciepłej wodzie z dodatkiem łagodnych środków do prania. Po wyczyszczeniu dobrze wysuszyć. Nie namaczać całej pianki w wodzie.

PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować wilgotnego wyrobu bezpośrednio w kontakcie ze skórą. Nie stosować w przypadku reakcji alergicznych skóry. Nie stosować, jeżeli nastąpiło mechaniczne uszkodzenie (np. rozerwanie, pęknięcie). Nie stosować inaczej niż zgodnie z przeznaczeniem.

⚠ OSTRZEŻENIA

Przed użyciem należy skonsultować celowość zastosowania, dobór wyrobu i sposób używania z lekarzem lub specjalistą rehabilitantem. Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

Wyrób należy dobrać odpowiednio do rozmiaru ciała.

Nie wystawiać produktu na działanie otwartego płomienia lub innych źródeł ognia mogących wywołać zapłon. Pianka wystawiona na działanie otwartego ognia gwałtownie się zapala.

Nie wystawiać produktu na długotrwałe działanie niskich temperatur (poniżej 5°C).

Opakowanie produktu nie jest zabawką.

Nie wystawiać produktu na długotrwałe, bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ponieważ pod wpływem nasłonecznienia może ulec przebarwieniu. Przebarwienie pianki nie wpływa na jej właściwości.

GWARANCJA

Wyrób objęty jest 12-miesięcznym okresem gwarancji. Wyrób powinien być wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami w instrukcji użytkowania. Gwarancja nie obejmuje usterek powstałych wskutek używania wyrobu niezgodnie z instrukcją obsługi, zaniedbań, dokonywania samodzielnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych. Do serwisu produkt należy dostarczyć czysty.

W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia, nabywca będzie obciążony kosztami realizacji reklamacji. Gwarancja jest realizowana na podstawie dowodu zakupu. Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień nabywcy wynikających z niezgodności towaru z umową.

Producent	Data produkcji	Najniższa dopuszczalna temperatura	Nie wybielać
Numer katalogowy	Oznakowanie CE	Przechowywać z dala od światła słonecznego	Nie prasować
Zajrzyj do instrukcji używania	Ostrzeżenie	Chronić przed wilgocią	Nie czyścić chemicznie
Kod partii	Dbaj o czystość	Nie używać, jeśli opakowanie zostało uszkodzone	Suszyć w pozycji poziomej
Wyrób medyczny	Numer modelu	Nie prać	

Data wydania instrukcji używania: 05.2024



REHA FUND Sp. z o.o.
ul. Staniewicka 14
03-310 Warszawa, Polska
www.rehafund.pl