

INSTRUKCJA UŻYWANIA

MISKA DO MYCIA GŁOWY MISKA DO MYCIA GŁOWY Z PRYSZNICEM

PRODUKT	Shampoo Basin	Shampoo Basin with Water Bag
Wymiary po napompowaniu	53 cm (długość) x 61 cm (szerokość) x 20 cm (wysokość)	53 cm (długość) x 61 cm (szerokość) x 20 cm (wysokość)
Wymiary po złożeniu i opróżnieniu	22cm (długość) x 25cm (szerokość) x 4cm (wysokość)	22cm (długość) x 25cm (szerokość) x 4cm (wysokość)
Długość węża odpływowego	118 cm	118 cm



UWAGA!

Przed rozpoczęciem korzystania z miski należy uważnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami.



UWAGA!


Zdjęcia użyte w instrukcji mają charakter poglądowy! Szczegóły specyfikacji przedstawione na zdjęciach i znajdujące się w docelowym produkcie mogą się różnić.

PRZEZNACZENIE

Przeznaczony dla osób obłożnie chorych lub unieruchomionych.

ZAWARTOŚĆ

1. Miska na szampon z podłączonym wężem odpływowym.
2. Kieszka na wodę ze słuchawką prysznicową i klipssem (tylko dla wersji z prysznicem).
3. Plastikowa rurka i sznurek do lepszego trzymania i zawieszania worka z wodą (tylko dla wersji z prysznicem)..
4. Zestaw naprawczy.
5. Pompka.

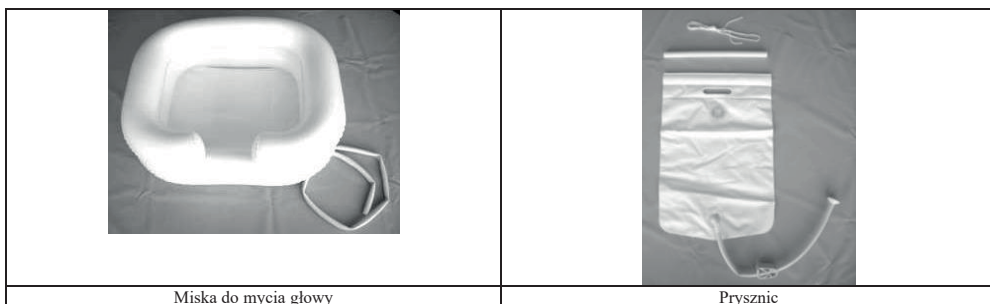

CECHY

1. Miska do mycia głowy szamponem o głębokości 20 cm z podwójnymi rurkami zapewnia solidność i wygodę.
2. Jest wyposażona w korek spustowy z wężem, który ułatwia odprowadzanie zabrudzonej wody podczas lub po użyciu.

3. Oddzielny worek na wodę do łatwego transportu wody tam, gdzie źródło wody może nie być dogodnie dostępne. Jest również wyposażony w głowicę prysznicową i regulowany klips ułatwiający kontrolę przepływu wody (tylko dla wersji z prysznicem).

MONTAŻ

1. Napompuj miskę do mycia głowy za pomocą pompki powietrza .



UWAGA!

Zawór powietrza ma wewnątrz zawór jednokierunkowy, który zapobiega wydostawaniu się powietrza na zewnątrz. Aby napompować miskę, ściśnij zawór powietrza za szyjkę, aby pomóc otworzyć zawór jednokierunkowy w środku.

2. Umieść miskę na płaskiej i półsztywnej powierzchni, aby lepiej z niej korzystać.
3. Umieść wąż odpływowy w wiadrze na wodę. Wiadra nie ma w komplecie.



UWAGA!

Wiadro na wodę musi być umieszczone niżej niż miska na szampon, aby brudna woda spływała w dół.

4. Odłącz korek spustowy, aby odprowadzić wodę podczas użytkowania.



Korek spustowy

5. Umieść miskę pod szyją pacjenta, w razie potrzeby wyreguluj dla wygody.




















Zmontowany zestaw


LISTA UŻYTYCH MATERIAŁÓW

Produkt wykonany jest z PVC (polichlorek winylu) o grubości 0,35 mm.

Wyjaśnienie Symboli:

	Producent		Zajrzyj do instrukcji używania
	Upoważniony przedstawiciel		Oznakowanie CE
	Importer		Góra, nieprzewracać
	Numer katalogowy		Kruchy, obchodzić się ostrożnie
	Data produkcji		Chronić przed wilgocią
	Numer modelu		Ostrzeżenie
	Wyrób medyczny		Opakowanie nadaje się do recyklingu
	Kod partii		
	Ilość		

 Airflo (Xiamen) Medical Co., Ltd.
4F, NO.6, East Haijing Road, Haicang,
361026 Xiamen, Fujian, China

 Share Info GmbH Heerdter
Lohweg 83, 40549
Dusseldorf, Germany

 **REHA FUND Sp. z o.o.**
ul. Staniewicka 14,
03-310 Warsaw, Poland
www.rehafund.pl



KARTA GWARANCYJNA
MISKA DO MYCIA GŁOWY
MISKA DO MYCIA GŁOWY Z PRYSZNICEM

Numer modelu:	Numer seryjny:	Data sprzedaży:	Podpis i pieczęćka sprzedawcy:

WARUNKI GWARANCJI

1. Producent zapewnia klienta, że przedmiot sprzedaży, na który jest wydana niniejsza karta gwarancyjna jest fabrycznie nowy oraz wysokiej jakości.
2. Wyrób jest objęty 24 miesięcznym okresem gwarancji od daty sprzedaży w karcie gwarancyjnej.
3. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji gwarancyjnej jest dostarczenie poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej wraz z dołączonym dowodem zakupu.
4. Ewentualne wady sprzętu zostaną usunięte przez firmę REHA FUND Sp. z o.o. lub autoryzowanych serwisantów pod warunkiem, że miska była wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami w instrukcji użytkowania.
5. Naprawa zostanie wykonana w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni, od daty przyjęcia sprzętu do punktu serwisowego.
6. Gwarancją nie są objęte:
 - czynności związane z konserwacją, czyszczeniem opisane w instrukcji użytkowania;
 - części ulegające zużyciu podczas normalnego użytkowania np. elementy gumowe, plastikowe wykończenia itp.
 - mechaniczne i termiczne uszkodzenia np. pęknięcia, przecięcia itp.;
 - uszkodzenia powstałe wskutek używania sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi, zaniedbania, dokonania samodzielnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
7. Przed oddaniem sprzętu do autoryzowanych serwisantów należy go wyczyścić zgodnie z instrukcją użytkowania tak, aby nadawał się do wykonania przeglądu serwisowego.
8. Naprawy i wymiany części zamiennych powinny być wykonane przez autoryzowanych serwisantów firmy REHA FUND Sp. z o.o.
9. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego klient będzie obciążony kosztami przesyłki.
10. Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
11. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawieszają uprawnień klienta wynikających z niezgodności towaru z umową.

WYKAZ NAPRAW SERWISOWYCH (wypełnia serwis)

Lp.	Data zgłoszenia	Nr zlecenia	Opis wady/ Zakres naprawy	Data wykonania naprawy	Pieczęć i podpis serwisu
1.					
2.					