

INSTRUKCJA UŻYWANIA KRZESŁO POD PRYSZNIC NATHAN 820

I. WPROWADZENIE

Szanowni Państwo,
Serdecznie dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy REHA FUND Sp. z o.o., czołowego dostawcy materiałów zaopatrzenia medycznego i artykułów rehabilitacyjnych na rynku polskim.
Instrukcja używania zawiera wskazówki i sugestie, których znajomość jest niezbędna do prawidłowego korzystania z wyrobu.



UWAGA! Przed użyciem wyrobu należy zapoznać się z instrukcją używania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z wyrobu, nieprzestrzeganie zasad bezpiecznego używania oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.



II. CHARAKTERYSTYKA

Nr katalogowy: RF-820
Całkowita szerokość: 50 cm
Szerokość siedziska: 50 cm
Całkowita wysokość: 75-85 cm
Całkowita długość: 48 cm
Wysokość siedziska: 39-49 cm
Głębokość siedziska: 35 cm
Wysokość oparcia: 37 cm
Max. bezpieczne obciążenie: 110 kg
Waga: 2,9 kg

LISTA UŻYTYCH MATERIAŁÓW

Rama	aluminium
Siedzisko	PE (polietylen)
Oparcie	PE (polietylen)
Nasadka	TPR (guma termoplastyczna)
Przycisk blokujący	stal

ELEMENTY KRZESŁA

Elementy krzesła przedstawione są na rys. nr 1



Powyższe zdjęcie ma charakter poglądowy.

III. PRZEZNACZENIE I ZASTOSOWANIE WYROBU

Krzesło pozwala osobom z ograniczoną sprawnością ruchową, seniorom utrzymać codzienną higienę osobistą zachowując przy tym znaczną samodzielność. Dzięki temu artykułowi zagrożenie upadkiem czy innym urazem, które możliwe są pod prysznicem, znacznie spada.

IV. PRZECIWSKAZANIA

Przeciwwskazania do pionizacji, urazy i dysfunkcje kończyn górnych uniemożliwiające siadanie na krześle, urazy kończyn dolnych uniemożliwiające utrzymanie równowagi, zaburzenia koordynacji ruchowej, problemy z błędnikiem, niestabilność kręgosłupa.

V. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYWANIA

Dla zachowania bezpieczeństwa należy przestrzegać poniższych zaleceń:

1. Przed korzystaniem z krzesła prysznicowego upewnij się, że:
 - a. wysokość siedziska jest odpowiednio wyregulowana;
 - b. przyciski blokujące działają poprawnie;
 - c. gumowe nasadki są w dobrym stanie;
 - d. wszystkie stopki ustawione są na tej samej wysokości.
2. Korzystać wyłącznie z oryginalnych akcesoriów. Używanie nieoryginalnych części może spowodować nieodpowiednie przystosowanie krzesła w wyniku czego powstaje ryzyko upadku.
3. Nie przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia krzesła.
4. Nie przechować w temperaturze poniżej 0°C.
5. Przed użyciem upewnij się, że rurki stóp ustawione są na tej samej wysokości.
6. Nie próbuj przesuwając krzesła w górę lub w dół po pochyłości za pomocą wody, lodu lub oleju.
7. Krzesło musi być stosowane na płaskiej powierzchni.
8. Przed każdym użyciem sprawdź stabilność krzesła oraz poziom dokręcenia śrub.
9. Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.




UWAGA! Nieprzestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa może doprowadzić do poważnych wypadków.

VI. SPOSÓB UŻYWANIA

REGULACJA WYSOKOŚCI

1. Wciśnij przycisk zabezpieczający na stopce krzesła i obróć ją delikatnie.
2. Ustaw odpowiednią wysokość.
3. Naceluj przyciskiem na odpowiedni otwór, dzięki czemu zablokujesz stopkę na żądanej wysokości.
4. Powtórz powyższe czynności na każdej stopce upewniając się, że wszystkie stopki ustawione są na tej samej wysokości.

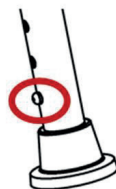

UWAGA! Upewnij się, że wszystkie stopki są poprawnie zablokowane i wyregulowane na tą samą wysokość.

MONTAŻ

1. Przygotuj zestaw do montażu (rys. 1).
2. Od spodu siedziska dopasuj nogi krzesła (rys. 2).
3. Następnie dopasuj rurki oparcia (rys. 3).
4. Do otworów włóż śruby, a następnie wkręcaj je równomiernie – wkręcaj po kolei każdą śrubę po trochu. Jeśli wkręcisz po kolei całkowicie śruby, możesz mieć problemy z montażem (rys. 4).
5. Zamontuj oparcie (rys. 5).
6. Sprawdź czy skrócone krzesło jest stabilne (rys. 6).




Rys. 1



Rys. 2



Rys. 3

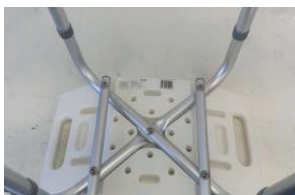

Rys. 4



Rys. 5



Rys. 6

Powyższe zdjęcia mają charakter poglądowy.

VII. SIADANIE I WSTAWANIE

1. Upewnij się, że krzesło stoi stabilnie i jest gotowe do użycia.
2. Stań tyłem do krzesła tak, aby dotykać jego przodu, tylną stroną kolan.
3. Sięgnij rękoma do tyłu i oprzyj dłonie na siedzisku.
4. Powoli siadaj na krześle, zginając łokcie i jeśli jest to możliwe kolana oraz biodra.
5. Aby wstać z krzesła, oprzyj dłonie na siedzisku i podnieś się.

VIII. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Zaleca się regularną kontrolę krzesła pod kątem wszelkich uszkodzeń czy widocznych oznak zużycia. Regularnie sprawdzaj czy:
 - a. na ramie nie pojawiły się pęknięcia lub załamania;
 - b. przycisk blokujący prawidłowo zabezpiecza ustawioną wysokość;
 - c. otwory w rurkach nie są powiększone lub wydłużone;
 - d. dolne nasadki nie uległy zużyciu – jeżeli tak, należy je wymienić;
 - e. żadne inne części krzesła nie są poluzowane lub uszkodzone.
2. Zaleca się regularne czyszczenie krzesła miękką szmatką i wodą z mydłem.
3. Krzesło po wyczyszczeniu należy osuszyć miękką szmatką.
4. Regularne czyszczenie zapobiegnie zabrudzeniu rurek i zapewni prawidłowe działanie krzesła.



UWAGA! Do czyszczenia wyrobu nie wolno używać rozpuszczalników, wybielaczy czy środków ściągających.

IX. KONIEC UŻYWANIA

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas kontroli wyrobu zgodnie z zaleceniami producenta. Patrz punkt instrukcji: Czyszczenie i Konserwacja - należy niezwłocznie zaprzestać korzystania z wyrobu. Po zakończeniu używania należy poddać wyrób utylizacji zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.

X. PRZEWIDZANY OKRES UŻYWANIA

Przewidzany okres używania wyrobu to 5 lat. Ten czas może być dłuższy lub krótszy, zależnie od częstotliwości korzystania i konserwacji wyrobów.

XI. GWARANCJA

Producent zapewnia klienta, że przedmiot sprzedaży jest fabrycznie nowy oraz wysokiej jakości. Wyrób objęty jest gwarancją (szczegółowe warunki gwarancji znajdują się na stronie internetowej Producenta). Wyrób powinien być wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami w instrukcji używania.

XII. GLOSARIUSZ SYMBOLI

	Producent		Ostrzeżenie
	Oznakowanie CE		Kod partii
	Numer katalogowy		Ilość
	Data produkcji		Góra, nie przewracać
	Zajrzyj do instrukcji używania		Chronić przed wilgocią
	Wyrób medyczny		Kruchy, obchodzić się ostrożnie
	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu		



REHA FUND Sp. z o.o.

ul. Staniewicka 14,
03-310 Warszawa, Polska (Poland)
e-mail: info@rehafund.pl
www.rehafund.pl



I/RF-820/2/18.02.2025
Data wydania instrukcji używania: 02.2025 v.2

