

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA KRZESŁO TOALETOWE LOUIS 840

WYRÓB MEDYCZNY

Nr katalogowy	RF-840/N	RF-840/CZA
Kolor tapicerki	niebieski	czarny
Kolor ramy	szary	szary
Max. bezpieczne obciążenie	130 kg	130 kg
Waga	8 kg	8 kg
Całkowita szerokość	56 cm	56 cm
Wysokość całkowita	80-95 cm	80-95 cm
Głębokość	52-57 cm	52-57 cm
Szerokość siedziska	43 cm	43 cm
Głębokość siedziska	42 cm	42 cm
Wysokość siedziska	40-55 cm	40-55 cm
Rozmiar otworu toalety	24 x 21 cm	24 x 21 cm



UWAGA! Przed rozpoczęciem korzystania z krzesła należy uważnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami.

PRZEZNACZENIE

Krzesło toaletowe spełnia funkcję przenośnej toalety. Krzesło można użytkować przy łóżku pacjenta. Pomaga osobom o ograniczonej sprawności ruchowej (stałej lub okresowej) i starszym w podstawowych czynnościach fizjologicznych. Krzesło może pełnić również funkcję nadstawki toaletowej oraz zwykłego krzesła do siedzenia. Krzesło ułatwia opiekę nad pacjentem. Bariery ułatwiają wstawanie z krzesła i siadanie na nim. Jest przeznaczone dla użytkowników z ograniczoną możliwością ruchu, ale z wystarczającą możliwością siedzenia. Krzesło jest przydatne w przypadkach: pacjenci z ograniczoną kontrolą tętna, osoby z zaburzeniami równowagi, zawrotami głowy, osoby z zaburzeniami funkcji kończyn dolnych, znacznie ograniczona ruchomość odcinka lędźwiowego kręgosłupa, stawu biodrowego i kolanowego, paraliż.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA


Dla zachowania bezpieczeństwa należy przestrzegać poniższych zaleceń:

- Przed korzystaniem z krzesła toaletowego upewnić się, że:
 - wysokość krzesła jest odpowiednio wyregulowana;
 - przyciski blokujące działają poprawnie;
 - gumowe nasadki są w dobrym stanie;
 - wszystkie stopki krzesła ustawione są na tej samej wysokości.
- Korzystać wyłącznie z oryginalnych akcesoriów. Używanie nieoryginalnych części może spowodować nieodpowiednie przystosowanie krzesła w wyniku czego powstaje ryzyko upadku.
- Nie przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia krzesła.
- Nie przechowywać krzesła w temperaturze poniżej 0°C.
- Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.
- Krzesło nie powinno być używane w przypadku zaburzeń percepcji oraz poważnej nierównowagi.
- Ryzyko wywrócenia wzrasta przy dużym jednostronnym obciążeniu.
- Zabrania się wchodzenia na krzesło – niebezpieczeństwo poślizgnięcia się.



UWAGA! Nieprzestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa może doprowadzić do poważnych wypadków.

BUDOWA KRZESŁA

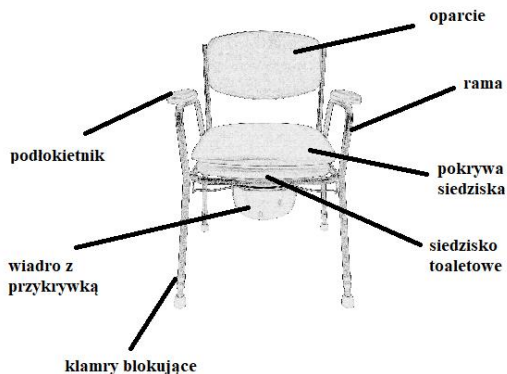

WYJMOWANIE I ZAKŁADANIE WIADERKA

Aby wyjąć wiaderko, należy wysunąć je z prowadnic z boku krzesła (rys. 2) lub wyjąć górą odchylając siedzisko toaletowe (rys. 1). Aby włożyć wiaderko, należy wsunąć je na prowadnice (rys. 2) lub włożyć górą odchylając siedzisko toaletowe (rys. 1).

REGULACJA WYSOKOŚCI

1. Zdejmij klamrę blokującą - chwyć ją pomiędzy kciuk i palec wskazujący, następnie pociągnij na zewnątrz (rys. 4).
2. Przesuń stopkę w dół lub do góry, aby uzyskać żądaną wysokość (rys. 3).
3. Wetknij klamrę blokującą z powrotem w odpowiedni otwór.
4. Upewnij się, że klamra blokująca prawidłowo zablokowała daną pozycję stopki.

rys. 1	rys. 2
rys. 3	rys. 4

SIADANIE I WSTAWANIE

1. Upewnij się, że krzesło stoi stabilnie i jest gotowe do użycia.
2. Stań tyłem do krzesła tak, aby dotykać jego przodu, tylną stroną kolan.
3. Sięgnij rękoma do tyłu i oprzyj dłonie na poręczach.
4. Powoli siadaj na krześle, zginając łokcie i jeśli jest to możliwe kolana oraz biodra.
5. Aby wstać z krzesła oprzyj dłonie na poręczach i podnieś się. Zanim puścisz poręcze krzesła upewnij się, że utrzymujesz równowagę.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Zaleca się regularną kontrolę krzesła pod kątem wszelkich uszkodzeń lub widocznych oznak zużycia. Regularnie sprawdzaj czy:
 - na ramie nie pojawiły się pęknięcia lub załamania;
 - dolne nasadki nie uległy zużyciu – jeżeli tak, należy je wymienić;
 - żadne inne części krzesła nie są poluzowane lub uszkodzone.
2. Zaleca się czyszczenie krzesła miękką szmatką i wodą z mydłem po każdym użyciu. Krzesło po wyczyszczeniu należy osuszyć miękką szmatką. Wiaderko można dezynfekować na zimno np. etanolem.



UWAGA! Do czyszczenia krzesła nie wolno używać rozpuszczalników, wybielaczy czy środków ściągających.

LISTA UŻYTYCH MATERIAŁÓW

oparcie	drewno + pianka + PVC (polichlorek winylu)
rama	stal, malowana proszkowo
pokrywa siedziska	drewno + pianka + PVC (polichlorek winylu)
klamra blokująca	PA6 (poliamid)
wiadro	PP (polipropylen)
pokrywka	PP (polipropylen)
podłokietnik	PVC (polichlorek winylu)
nasadki	TPE (elastomer termoplastyczny)

WYJAŚNIENIE SYMBOLI

	Producent
	Oznakowanie CE
	Numer referencyjny
	Data produkcji
	Zajrzyj do instrukcji używania
	Ostrzeżenie
	Numer serii
	Góra, nie przewracać
	Przechowywać w suchym miejscu
	Delikatne, obchodzić się ostrożnie



REHA FUND Sp. z o.o.

ul. Staniewicka 14, 03-310 Warszawa, Polska
tel.: +48 22 594 03 00, fax.: +48 22 594 03 07
e-mail: info@rehafund.pl www.rehafund.pl



Wer. 1.3
Wydano: 03/2021

**KARTA GWARANCYJNA
KRZESŁO TOALETOWE LOUIS 840**

Model:	Numer seryjny:	Data sprzedaży:	Podpis i pieczęć sprzedawcy:

WARUNKI GWARANCJI

1. Producent zapewnia klienta, że przedmiot sprzedaży, na który jest wydana niniejsza karta gwarancyjna jest fabrycznie nowy oraz wysokiej jakości.
2. Krzesło jest objęte 12 miesięcznym okresem gwarancji od daty sprzedaży w karcie gwarancyjnej.
3. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji gwarancyjnej jest dostarczenie poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej wraz z dołączonym dowodem zakupu.
4. Ewentualne wady sprzętu zostaną usunięte przez firmę REHA FUND Sp. z o.o. lub autoryzowanych serwisantów pod warunkiem, że krzesło było wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami w instrukcji użytkowania.
5. Naprawa zostanie wykonana w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni, od daty przyjęcia sprzętu do punktu serwisowego.
6. Gwarancją nie są objęte:
 - czynności związane z konserwacją, czyszczeniem i regulacją krzesła opisane w instrukcji użytkowania;
 - części ulegające zużyciu podczas normalnego użytkowania;
 - mechaniczne i termiczne uszkodzenia krzesła np. wygięcia, zarysowania, połamania itp.;
 - uszkodzenia powstałe wskutek używania sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi, zaniedbania, dokonania samodzielnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
7. Przed oddaniem sprzętu do autoryzowanych serwisantów należy go wyczyścić zgodnie z instrukcją użytkowania, tak aby nadawał się do wykonania przeglądu serwisowego.
8. Naprawy i wymiany części zamiennych powinny być wykonane przez autoryzowanych serwisantów firmy Reha Fund Sp. z o.o.
9. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego klient będzie obciążony kosztami przesyłki.
10. Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
11. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień klienta wynikających z niezgodności towaru z umową.

WYKAZ NAPRAW SERWISOWYCH *(wypełnia serwis)*

Lp.	Data zgłoszenia	Nr zlecenia	Opis wady/ Zakres naprawy	Data wykonania naprawy	Pieczęć i podpis serwisu
1.					
2.					