

**INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA  
WÓZEK INWALIDZKI CRUISER SMART**



## Spis treści

1. Elementy wózka inwalidzkiego CRUISER SMART .....	3
2. Parametry techniczne.....	3
3. Wprowadzenie .....	4
4. Przeznaczenie i zakres zastosowania .....	4
5. Ogólne zasady bezpiecznego użytkowania .....	4
6. Sposób użytkowania .....	5
6.1 Rozłożenie wózka .....	5
6.2 Złożenie wózka .....	5
6.3 Siadanie na wózku.....	5
6.4 Zsiadanie z wózka .....	6
7. Regulacja i dopasowanie wózka .....	6
7.1 Blokada hamulców .....	6
7.2 Podnóżki .....	6
7.3 Platformy podnóżków .....	7
7.5 Odchylanie boczka .....	8
7.6 Montaż kół tylnych.....	8
7.7 Hamulce dla asystenta .....	8
7.8. Koła antywywrotne .....	8
7.9 Pas biodrowy .....	8
8. Oznakowanie .....	9
9. Czyszczenie i konserwacja, lista użytych materiałów .....	10
10. Wyjaśnienie symboli.....	11
11. Warunki gwarancji .....	12




**UWAGA!** Zdjęcia użyte w instrukcji mają charakter poglądowy! Szczegóły specyfikacji przedstawione na zdjęciach i znajdujące się w docelowym wózku mogą się różnić.



**UWAGA!** Podczas użytkowania i obsługi wyrobu oraz podczas jego składania i regulowania mechanizmów może zaistnieć niebezpieczeństwo uwięźnięcia i/lub ściśnięcia części ciała użytkownika / osoby towarzyszącej w otworach / szczelinach pomiędzy elementami. Należy wykonywać te czynności szczególnie ostrożnie. Po zakończeniu regulacji ustabilizować pozycję poprzez dokładne dokręcenie nakrętek / śrub.



**UWAGA!** Ze względu na występujące w wyrobie małe elementy – chronić przed dostępem małych dzieci.

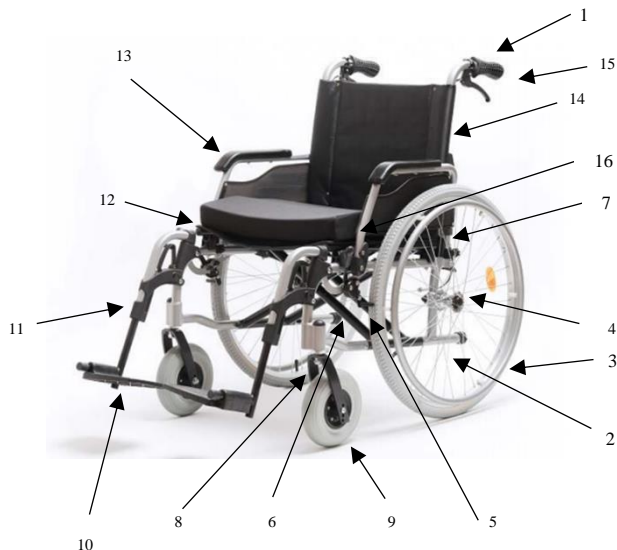**1. ELEMENTY WÓZKA INWALIDZKIEGO CRUISER SMART**

**Wyposażenie podstawowe**

1. Rączki do popychania
2. Koło tylne
3. Ciągi
4. Szybkozłącze
5. Blokada kół (hamulec)
6. Krzyżak
7. Aluminiowa rama
8. Metalowy widelec
9. Koło przednie 8"
10. Platforma podnóżka
11. Regulowany podnóżek
12. Tapicerka siedziska
13. Boczek
14. Tapicerka oparcia
15. Hamulce dla asystenta
16. Przycisk odchylania boczka

**2. PARAMETRY TECHNICZNE**

PARAMETRY TECHNICZNE		
Nr katalogowy / Nazwa	WÓZEK INWALIDZKI CRUISER SMART	
Szerokość siedziska [mm]	450	
Całkowita szerokość [mm]	630	
Całkowita długość [mm]	1100	
Całkowita wysokość [mm]	930	
Głębokość siedziska [mm]	400	
Wysokość oparcia [mm]	455	
Wysokość podłokietników od siedziska [mm]	270	
Wysokość siedziska od podłoża [mm]	535	
Maksymalne bezpieczne obciążenie [kg]	140	
Waga wózka podstawowego [kg]	14	
Stabilność statyczna [°]	z góry	≥5°
	pod górkę	≥5°
	poprzeczna	≥5°

Średnica kół	przednie	200
	tylne	600
Temperatura użytkowania i przechowywania		5°C~40°C

### 3. WPROWADZENIE

Szanowni Państwo,  
Serdecznie dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy REHA FUND Sp. z o.o., czołowego dostawcy materiałów zaopatrzenia medycznego i artykułów rehabilitacyjnych na rynku polskim.

Instrukcja użytkowania zawiera wskazówki i sugestie, których znajomość jest niezbędna do prawidłowego korzystania z wózka inwalidzkiego.



**UWAGA! Przed rozpoczęciem korzystania z wózka inwalidzkiego należy uważnie zapoznać się z instrukcją użytkowania.**

Dbamy o to, aby zarówno świadczone przez nas usługi, jak i nasze produkty były najwyższej jakości. REHA FUND Sp. z o.o. posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001.13485:2016.

Oświadczamy, że wózek inwalidzki Cruiser Smart spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektywy Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań prosimy kontaktować się z firmą REHA FUND Sp. z o.o. lub sprzedawcą.



**REHA FUND Sp. z o.o.**

ul. Staniewicka 14, 03 – 310 Warszawa, Polska  
tel.: +48 22 594 03 00, fax.: +48 22 594 03 07  
e-mail: info@rehafund.pl www.rehafund.pl



*Pieczętka sprzedawcy*

### 4. PRZEZNACZENIE I ZASTOSOWANIE

Wózki inwalidzkie umożliwiają poruszanie się w pozycji siedzącej dla osób o ograniczonej zdolności ruchowej. Składają się z części podpierającej i stabilizującej (siedzenie, oparcie, podłokietniki, podnóżki) oraz części umożliwiających mobilność (koła, ciągi, blokady kół). Wózki inwalidzkie umożliwiają poruszanie się, zarówno z pomocą asystenta, jak i samodzielnie, co ułatwia funkcjonowanie w czynnościach życia codziennego.

W celu wyboru odpowiedniego wózka należy wziąć pod uwagę: wiek, wymiary ciała, wagę, stan fizyczny i psychiczny oraz warunki życia użytkownika.

Wiele wariantów wózka i akcesoriów umożliwia użytkowanie wózka przez osoby dotknięte niepełnosprawnością z powodu: porażenia, amputacji kończyn dolnych, urazów, problemów z równowagą, chorób mięśniowych, lub innych schorzeń ograniczających zdolność ruchową.

Wózek inwalidzki Cruiser Smart jest przeznaczony dla osób z trwałymi dysfunkcjami ograniczającymi samodzielne chodzenie.

### 5. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Wózek został zaprojektowany zgodnie z międzynarodowymi standardami, aby zapewnić użytkownikowi najwyższy stopień bezpieczeństwa. Jednakże sam użytkownik poprzez niewłaściwe użytkowanie wózka inwalidzkiego może spowodować niebezpieczeństwo. Dlatego też, dla własnego bezpieczeństwa należy stosować się do poniższych zasad.

- Użytkownik wózka inwalidzkiego poruszając się na zewnątrz jest uczestnikiem ruchu drogowego. Należy zadbać o to, aby wózek posiadał odpowiednie oznakowanie odblaskowe i był łatwo zauważalny w warunkach słabej widoczności. Należy pamiętać, że podczas jazdy po drogach publicznych wózek podlega wszystkim prawom ruchu drogowego.
- W trakcie pierwszej jazdy należy zapoznać się z wózkiem i poćwiczyć jazdę po równym terenie oraz po wzniesieniach i pochyłościach przy asekuracji asystenta.
- Zawsze przed skorzystaniem z wózka należy sprawdzić jego stan techniczny: szybkozłączka kół tylnych, bieżnik opon, ciśnienie w kołach pneumatycznych, blokady kół.
- Przy siadaniu i wstawianiu z wózka należy zająć możliwie najbliższą pozycję miejsca, w którym zamierza się usiąść. Podczas tych czynności nie należy również stawać na platformach podnóżków, ponieważ grozi to ich połamaniem lub wyróceniem się wózka.

- Aby zminimalizować lub wykluczyć prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku należy prawidłowo wyregulować wózek. Podczas regulowania poszczególnych elementów wózka należy ściśle stosować się do wskazówek zawartych w instrukcji użytkowania lub poradzić się fachowca.
- Nie należy wjeżdżać ani zjeżdżać ze wzniesień o nachyleniu większym niż 10°. Przy wjeżdżaniu na wzniesienie należy przechylić ciało do przodu, a przy zjeżdżaniu możliwie odchylić się, aby wyrównać zmiany w położeniu środka ciężkości. Jeżeli to możliwe należy skorzystać z pomocy asystenta.
- Podczas jazdy nie należy hamować blokadami kół. Blokadę kół należy zawsze zaciskać podczas postoju, aby zabezpieczyć wózek przed swobodnym toczeniem się. Blokadę kół należy zaciskać zawsze z obydwu stron jednocześnie, ponieważ zaciśnięcie tylko jednej blokady może spowodować jednostronne toczenie się wózka, a w konsekwencji jego wywrócenie się. Blokadę kół nie będą prawidłowo działać, jeżeli ciśnienie w tylnych kołach nie będzie odpowiednio lub gdy będą za bardzo odsunięte od kół.
- Użytkownicy wózka podczas przemieszczania się pojazdami silnikowymi (pociąg, autobus) powinni korzystać z siedzeń specjalnie dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. Podczas poruszania się samochodem nie należy siedzieć na wózku inwalidzkim, a na siedzeniu w samochodzie. Wózek należy przewozić odpowiednio zabezpieczony.
- Podczas korzystania z wózka nie należy się wychylać tak, aby zmieniło się położenie środka ciężkości, ponieważ grozi to przewróceniem się wózka lub wypadnięciem z niego. Zawieszanie z tyłu wózka plecaka lub torby może powodować zmianę stabilności wózka, a w konsekwencji większe prawdopodobieństwo wywrócenia się.
- Podczas korzystania z wózka należy ostrożnie obchodzić się z ogniem. Tapicerka siedziska i oparcia oraz poduszka do siedzenia mogą się zapalić.
- Aby uniknąć korozji, wózek należy utrzymać w czystości.
- Zawsze, gdy pozwala na to infrastruktura należy korzystać z wind i podjazdów przeznaczonych dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. W przypadku braku dostosowania infrastruktury należy skorzystać z pomocy dwóch osób, aby bezpiecznie pomogły pokonać bariery infrastrukturalne. Wózka nigdy nie wolno przenosić wraz z użytkownikiem. Należy upewnić się, że osoba towarzysząca podnosi wózek, trzymając za pewnie umocowane części. Nie wolno podnosić wózka za części odłączane (np. podnóżki lub osłony boczne).
- Nigdy nie przekraczać maksymalnego obciążenia wózka (140 kg).
- Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

## 6. SPOSÓB UŻYTKOWANIA

### ROZŁOŻENIE WÓZKA

1. Nacisnąć silnie dwie rurki krzyżaka po bokach tapicerki siedziska (rys. 1).
2. Rozłożyć wózek i docisnąć siedzisko.

### ZŁOŻENIE WÓZKA


1. Pociągnąć do góry platformy podnóżków.
2. Pociągnąć do góry tapicerkę pośrodku siedziska jedną ręką od przodu, drugą od tyłu, a następnie pociągnąć delikatnie do góry (rys. 2). Następnie docisnąć do siebie boki wózka, tak, aby osiągnąć maksymalną wysokość środka tapicerki. Można również odłączyć podnóżki oraz zdjąć koła na szybkojeźdźcu.



**UWAGA!** Przy rozkładaniu wózka nie wkładać palców poniżej rurek krzyżaka.

### SIADANIE NA WÓZKU

1. Przysunąć wózek blisko miejsca, na którym się siedzi, tak aby znajdował się do niego bokiem (rys. 3).
2. Zaciśnąć blokady kół i uchylić podłokietnik znajdujący się bliżej, a następnie odchylić podnóżki, tak aby nie przeszkadzały (rys. 4).
3. Zaprzeć się jedną ręką o siedzisko wózka, drugą zaś o powierzchnię na której się siedzi, a następnie przesunąć miednicę nad kołem na siedzisko wózka. Jeżeli trzeba, należy powtórzyć czynność, by poprawić pozycję (rys. 5).
4. Zablockować podnóżki i położyć na nich nogi, opuścić podłokietnik i odpuścić blokadę hamulców (rys. 6).

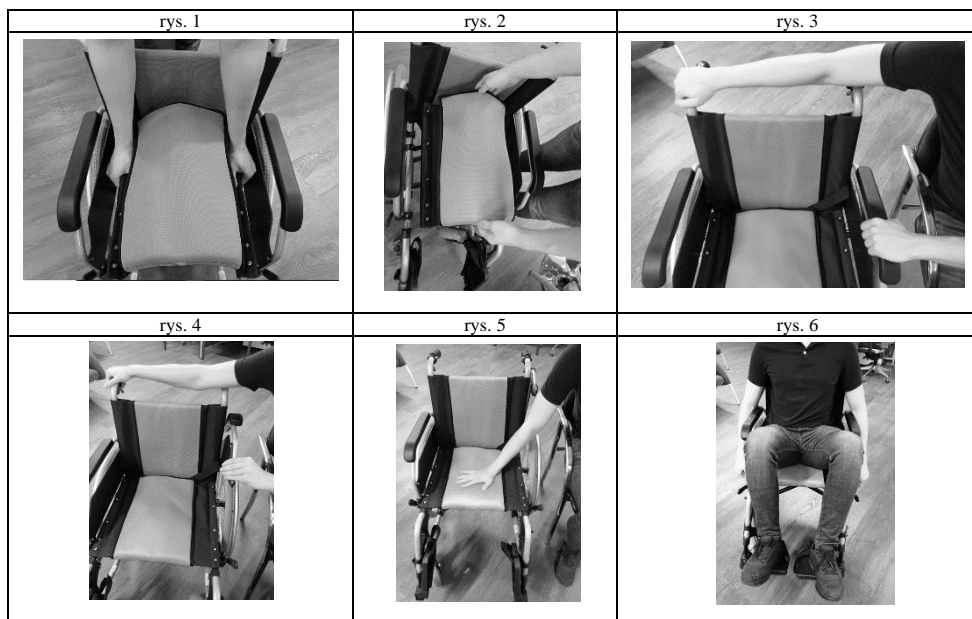

## ZSIADANIE Z WÓZKA

1. Ustawić wózek blisko miejsca, na którym chce się usiąść, tak aby znajdował się do niego bokiem.
2. Zaciśnąć blokady kół i uchylić podłokietnik od strony miejsca siedzącego, zdjęć nogi z podnóżków i odchylić podnóżki, tak aby nie przeszkadzały.
3. Zaprzeć się jedną ręką o powierzchnię, na której chce się usiąść, drugą zaś o siedzisko wózka i przesunąć miednicę nad kołem wózka na powierzchnię, na której chce się usiąść. Jeżeli trzeba, należy powtórzyć czynność, by poprawić pozycję.
4. Złożyć wózek i odstawić go obok, tak aby nie przeszkadzał.



**UWAGA!** Przed przeniesieniem ciężaru ciała na wózek lub z wózka najpierw upewnij się, że stoi stabilnie a blokady kół są zaciśnięte. Nie należy również stawać na platformach podnóżków, ponieważ grozi to ich urwaniem lub wywróceniem się wózka. Jeżeli to możliwe przy powyższych czynnościach wózek powinien być oparty tyłem o stabilną podporę np. ścianę. W razie potrzeby należy skorzystać z pomocy asystenta.



**UWAGA!** Osoby o ograniczonej zdolności ruchowej lub nie mogące chodzić powinny siedzieć/zsiadać z wózka przy pomocy osoby towarzyszącej.

## 7. REGULACJA I DOPASOWANIE WÓZKA

### BLOKADY HAMULCÓW

Wózek posiada dwie niezależne blokady kół tylnych. Aby zablokować koło, należy pchnąć dźwignię do przodu, aby odblokować koło należy pociągnąć dźwignię do siebie. Docisk hamulca można również regulować za pomocą śrubek odpowiednio przesuwając mechanizm zaciskowy blokady kół bliżej lub dalej koła (rys. 7).


### PODNÓŻKI

Podnóżki należy wyregulować dostosowując ich długość do długości podudzia użytkownika. Dla ułatwienia siadania i wysiadania z wózka można wyjąć podnóżki.

Aby wyregulować podnóżki, należy:

1. Odkręcić i wyjąć śrubę mocującą (rys. 8).
2. Ustawić podnóżek na odpowiednią wysokość, tak aby otwory podnóżka i ramy podnóżka pokryły się (rys. 9).
3. Włożyć i zakręcić śrubę mocującą.

4. Upewnić się, że śruba jest dobrze zakręcona a podnóżek odpowiednio zabezpieczony.

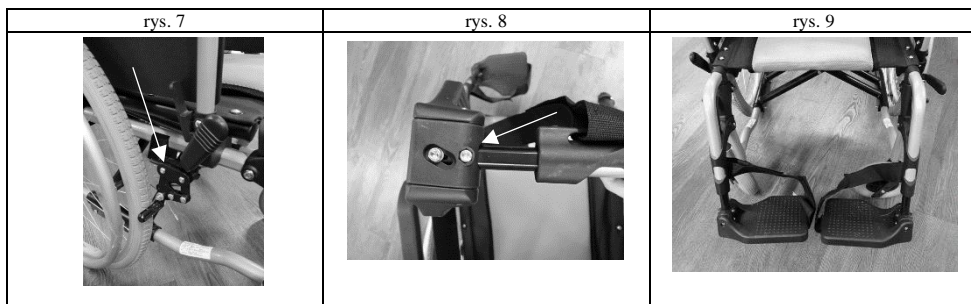

**UWAGA! Zachować minimalny odstęp podnóżków od podłogi.**


Aby zdjąć podnóżek, należy:

1. Znaleźć dźwignię zwalniającą (rys. 10).
2. Pociągnąć za dźwignię zwalniającą (rys 11).
3. Odchylić podnóżek na zewnątrz (rys. 12).
4. Wyciągnąć podnóżek do góry zdejmując z bolców zabezpieczających (rys. 13).

Podnóżki składają się zarówno na zewnątrz (rys. 14) wózka nie utrudniając swobodnej jazdy.

#### PLATFORMY PODNÓŻKÓW

Platformy podnóżków każdorazowo przy składaniu wózka inwalidzkiego należy złożyć. Przy rozkładaniu należy pamiętać, aby platformy podnóżków były rozłożone do końca, a paski zabezpieczające stopę nie były pozwijane (rys. 15).

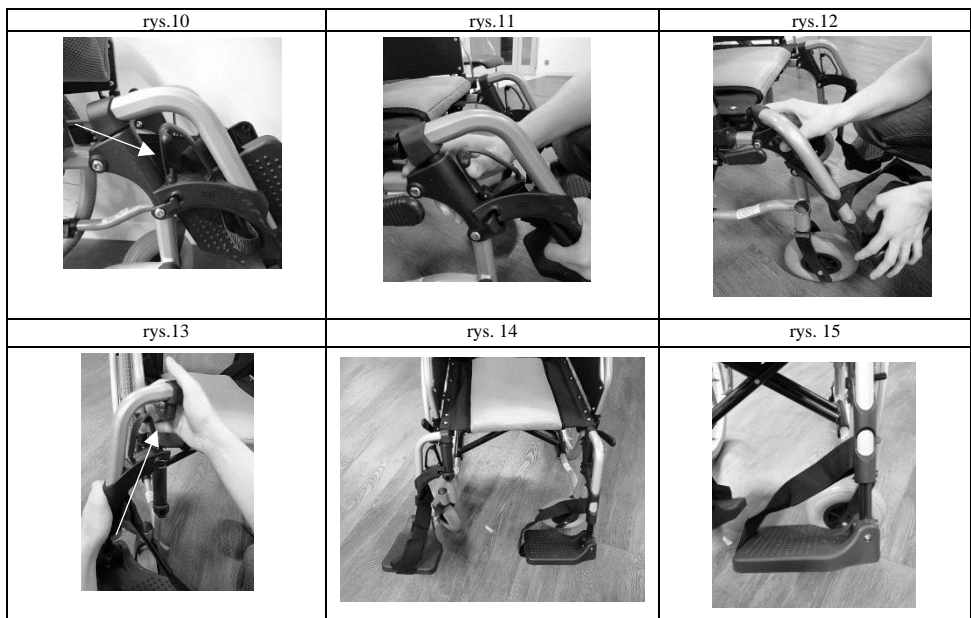

## ODCHYLANIE BOCZKA

Aby odchylić boczki, należy:

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk zabezpieczający (rys. 16).
2. Odchylić podłokietnik drugą ręką.



**UWAGA!** Przy przywracaniu boczka na właściwe miejsce należy zwrócić uwagę, aby jego przód dobrze osiadł w gniazdku, a blokada zatrzasnęła się. Nie należy używać boczka lub podłokietnika do podnoszenia wózka.

## MONTAŻ KÓŁ TYLNYCH

Aby zamontować tylne koło, należy:

1. Chwycić tylne koło i nacisnąć przycisk szybkozłącza (rys. 17).
2. Przytrzymując wciśnięty przycisk nałożyć oś tylnego koła, aż do zablokowania.
3. Zwolnić przycisk.
4. Sprawdzić, czy koło jest bezpiecznie zamocowane.

## HAMULCE DLA ASYSTENTA

Aby odblokować hamulec, należy (rys. 18):

1. Wcisnąć przycisk blokady, tak aby zwolnił zapadkę.
2. Trzymając przycisk blokady puścić hamulec.

Aby zablokować hamulec, należy (rys. 19):

1. Przyciągnąć dźwignię hamulca do siebie.
2. Upewnić się że hamulec jest odpowiednio zaciśnięty i zablokowany.




**UWAGA!** Siłę zacisku hamulca reguluje się po przez ustawienie w jednej z trzech zapadek blokady hamulca. Najwyższa pozycja zapadki jest równoznaczna z największą siłą zacisku hamulca. Zapadka blokady hamulca ustawia się samoistnie w zależności od siły nacisku na dźwignię hamulca.

## KÓŁA ANTYWYWROTNE

Wózek ma możliwość dodatkowego wyposażenia w koła antywywrotne (rys. 20). Koła antywywrotne stanowią zabezpieczenie przed przewróceniem się wózka. Należy je stosować, gdy środek ciężkości jest przesunięty np. u pacjentów po pojedynczej lub podwójnej amputacji kończyn dolnych.


## PAS BIODROWY

Wózek jest wyposażony w ochronny pas biodrowy (rys. 21), który stanowi dodatkowe zabezpieczenie użytkownika przed zsuwaniem się z wózka. Pas wspomaga utrzymanie prawidłowej postawy.

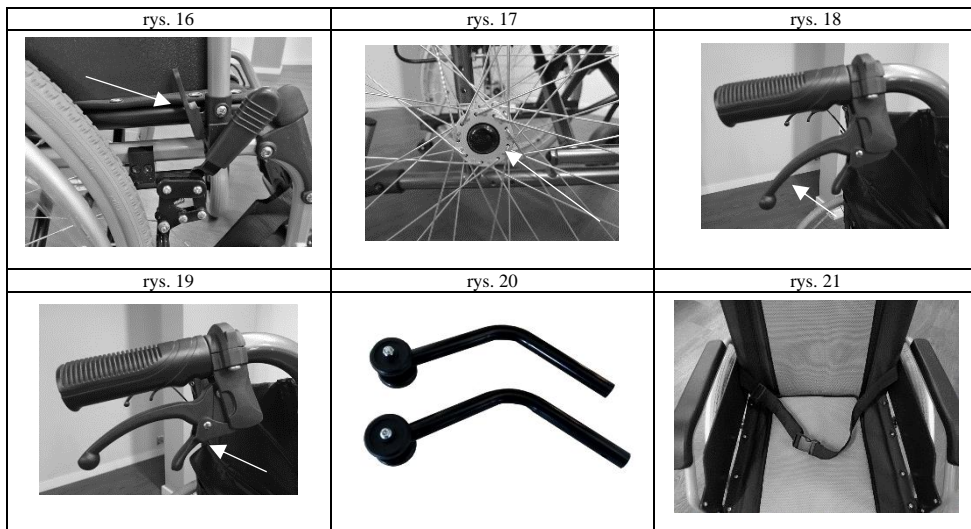


## 8. OZNAKOWANIE

Etykieta jest umieszczona na ramie lub krzyżaku wózka.

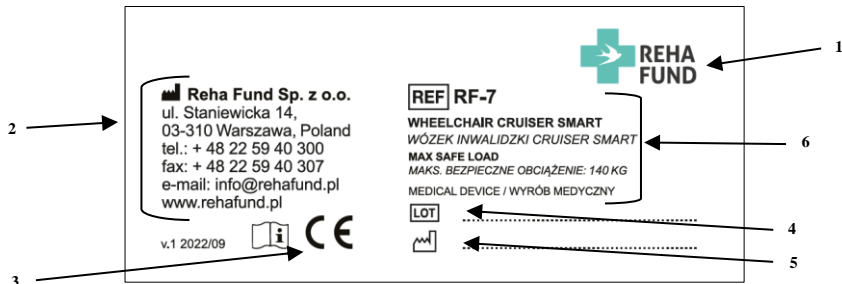

- |                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| 4. Nazwa wytwórcy;           | 1. Numer serii;            |
| 5. Dane kontaktowe wytwórcy; | 2. Data produkcji;         |
| 6. Oznakowanie CE;           | 3. Informacje o produkcji. |

Naklejka identyfikacyjna jest umieszczona na kartoncie wózka.

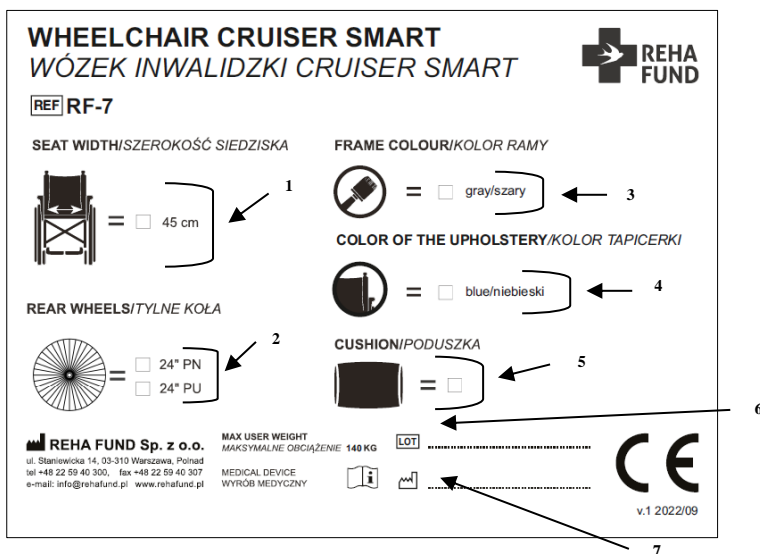

1. Rozmiar siedziska;
2. Opcje kół tylnych;
3. Opcje koloru ramy;
4. Opcje koloru tapicerki;
5. Poduszka;
6. Numer serii;
7. Data produkcji.

## 9. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

### CZYSZCZENIE WÓZKA

Aby wózek służył użytkownikowi jak najdłużej, należy regularnie go czyścić i konserwować, a także kontrolować stan techniczny poszczególnych podzespołów.

Tapicerkę wózka należy czyścić gąbką nasączoną wodą z mydłem lub łagodnym detergentem piorącym, a następnie spłukać ciepłą wodą. Zabrudzenia należy wycierać zgodnie z kierunkiem włókien tapicerki. Po usunięciu zabrudzeń tapicerkę należy zostawić w ciepłym i suchym miejscu do wyschnięcia. Jeżeli zabrudzenie mocno przylega do powierzchni tapicerki, należy je zeszkrobać miękką szczotką.



**UWAGA! Nie wolno wkładać tapicerki do suszarki ani suszyć jej w wysokiej temperaturze.**

Ramę wózka należy czyścić regularnie za pomocą wody z mydłem lub łagodnym detergentem do czyszczenia. Po wyczyszczeniu ramy należy ją dokładnie opłukać ciepłą wodą i wytrzeć do sucha.



**UWAGA! Nie wolno do czyszczenia ramy wózka używać środków ścierających, żrących, zawierających benzynę lub na bazie rozpuszczalników oraz chloru.**

### KONTROLA STANU TECHNICZNEGO WÓZKA

- Przed każdym użyciem:
  - oczyszczyć i sprawdzić stan techniczny opony i bieżnika;
  - sprawdzić, czy wszystkie śruby zabezpieczające są dokręcone;
  - sprawdzić, czy hamulce działają prawidłowo i w razie potrzeby je wyreguluj;
  - sprawdzić stan wózka (czystość, pęknięcia, uszkodzenia części strukturalnych, osadzenie szybkozłącza).
- Co 3 miesiące należy dokonać kontroli i ewentualnego smarowania lub regulacji:
  - podłokietników;
  - podnóżków;
  - blokady kół;
  - szybkozłącza kół;
  - ciśnienia w oponach.
- Co 6 miesięcy lub dla każdego nowego użytkownika należy dokonać:
  - samodzielnego przeglądu;
  - dezynfekcji (jeżeli zachodzi potrzeba).
- Co 12 miesięcy należy dokonać kontroli:
  - elementów ramy i rurek na zawiasach pod kątem deformacji elementów plastikowych;
  - pęknięć i ograniczonej funkcjonalności;
  - uszkodzeń powierzchni malowanej (zagrożenie korozją);
  - pracy kół (swobodny obrót, wyzważenie, praca osi, opony, profil, stan ciągów, ciśnienie w przypadku ogumienia pompowanego, luzu na osiach itp.);
  - solidności i dokręcenia wszystkich śrub, a także nasmarowania łączy metalowych w częściach ruchomych;
  - stanu i bezpieczeństwa osi kół przednich;
  - części z tworzywa sztucznego pod kątem pęknięć;
  - działania podłokietników i podnóżków (blokowanie, obciążenie, odkształcenie, zużycie spowodowane obciążeniem).













**UWAGA! Przeglądy serwisowe należy wykonywać tylko u autoryzowanych serwisantów firmy REHA FUND Sp. z o.o.**

### LISTA UŻYTYCH MATERIAŁÓW

Rączki do popychania	guma kauczukowa
Koło tylne	PU (poliuretan) lub guma kauczukowa
Ciągi	aluminium
Szybkozłącze	stal
Blokada kół (hamulec)	stal
Krzyżak	aluminium

Rama	aluminium
Widelec	aluminium
Koło przednie 8"	PU (poliuretan) + ABS (terpolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy)
Platforma podnóżka	ABS (terpolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy)
Pasek zabezpieczający stopę	poliester
Regulowany podnóżek	aluminium
Tapicerka siedziska	poliester
Tapicerka oparcia	poliester
Hamulce dla asystenta	ABS (terpolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy)
Podłokietnik	PU (poliuretan)

## 10. WYJAŚNIENIE SYMBOLI

	Producent
	Oznakowanie CE
	Numer referencyjny
	Data produkcji
	Zajrzyj do instrukcji używania
	Ostrzeżenie
	Numer serii
	Góra, nie przewracać
	Przechowywać w suchym miejscu
	Delikatne, obchodzić się ostrożnie



**REHA FUND Sp. z o.o.**

ul. Staniewicka 14, 03-310 Warszawa, Polska  
tel.: +48 22 594 03 00, fax.: +48 22 594 03 07  
e-mail: info@rehafund.pl www.rehafund.pl



Wer. 1.1  
Wydano: 10/2022

## NOTATKI

**KARTA GWARANCYJNA  
WÓZEK INWALIDZKI CRUISER SMART**

Model:	Numer seryjny:	Data sprzedaży:	Podpis i pieczętka sprzedawcy:

**WARUNKI GWARANCJI**

1. Producent zapewnia klienta, że przedmiot sprzedaży, na który jest wydana niniejsza karta gwarancyjna jest fabrycznie nowy oraz bez wad.
2. Rama wózka jest objęta 60 miesięcznym okresem gwarancji, pozostałe części są objęte 36 miesięcznym okresem gwarancji od daty sprzedaży w karcie gwarancyjnej.
3. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji gwarancyjnej jest dostarczenie poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej wraz z dołączonym dowodem zakupu.
4. Ewentualne wady sprzętu zostaną usunięte przez firmę REHA FUND Sp. z o.o. lub autoryzowanych serwisantów pod warunkiem, że wózek był wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami w instrukcji użytkowania.
5. Naprawa zostanie wykonana w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni, od daty przyjęcia sprzętu do punktu serwisowego. W przypadku potrzeby sprowadzenia części zamiennych czas naprawy może ulec wydłużeniu o czym klient zostanie poinformowany.
6. Gwarancją nie są objęte:
  - czynności związane z konserwacją, czyszczeniem i regulacją wózka inwalidzkiego opisane w instrukcji użytkowania;
  - części ulegające zużyciu podczas normalnego użytkowania np. elementy gumowe, sprężyny, plastikowe wykończenia, tapicerka, łożyska itp.;
  - mechaniczne i termiczne uszkodzenia wózka inwalidzkiego np. wygięcia, zarysowania, połamania itp.;
  - uszkodzenia powstałe wskutek używania sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi, zamiedbania, dokonania samodzielnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
7. Przed oddaniem sprzętu do autoryzowanych serwisantów należy go wyczyścić zgodnie z instrukcją użytkowania, tak aby nadawał się do wykonania przeglądu serwisowego.
8. Naprawy i wymiany części zamiennych powinny być wykonane przez autoryzowanych serwisantów firmy Reha Fund Sp. z o.o.
9. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego klient będzie obciążony kosztami rozpatrzenia reklamacji.
10. Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
11. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień klienta wynikających z niezgodności towaru z umową.

**WYKAZ NAPRAW SERWISOWYCH** *(wypełnia serwis)*

Lp.	Data zgłoszenia	Nr zlecenia	Opis wady/ Zakres naprawy	Data wykonania naprawy	Pieczęć i podpis serwisu
1.					
2.					