

**INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA  
PRZYRZĄD DO REHABILITACJI KOŃCZYN GÓRNYCH 881**

Nr katalogowy.: RF-881

Waga: 0,75 kg



**UWAGA!** Przed rozpoczęciem korzystania z przyrządu, należy uważnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami.


**PRZEZNACZENIE**

Przyrząd przeznaczony jest do ćwiczeń kończyn górnych, barków i górnej części tułowia. Pomaga w odbudowie zakresu ruchów i zwiększania ruchliwości w stawach kończyn górnych i górnej części tułowia. Opór dla jednej kończyny stanowi ciężar drugiej kończyny.

**ZASADY BEZPIECZEŃSTWA**

Dla zachowania bezpieczeństwa należy przestrzegać poniższych zaleceń:

1. Przed korzystaniem z przyrządu upewnić się, że:
  - a. wiązania na linie są ciasne;
  - b. linka nie jest wystrzępiona;
  - c. linka znajduje się w rowkach bloczka i porusza się swobodnie;
  - d. linka nie znajduje się pomiędzy bloczkiem a wieszakiem w kształcie litery V.
2. Korzystać wyłącznie z oryginalnych akcesoriów. Używanie nieoryginalnych części może spowodować nieodpowiednie przystosowanie przyrządu w wyniku czego powstaje ryzyko upadku.
3. Nie przechować w temperaturze poniżej 0°C.

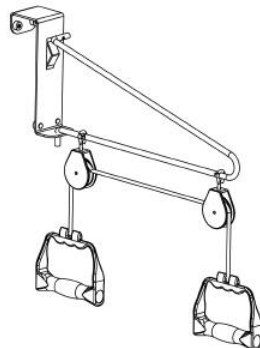

**UWAGA!** Nieprzestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa może doprowadzić do poważnych wypadków.

**CZĘŚCI PRZYRZĄDU**

Przyrząd składa się z:

1. wieszaka w kształcie litery V;
2. wspornika drzwi;
3. dwóch bloczków;
4. linki;
5. dwóch uchwytów.

**MONTAŻ**

1. Zamontuj bloczki na wieszak w kształcie litery V na jego dwóch przeciwnych końcach.
2. Końcówki wieszaka włóż do wspornika drzwi.
3. Przeciągnij linkę przez bloczki.
4. Końcówki linki przeciągnij przez otwory w uchwytach i mocno zawiąż.
5. Zamontuj przyrząd na drzwiach za pomocą wspornika drzwi.
6. Upewnij się, że można bezpiecznie korzystać z przyrządu.



**UWAGA!** Montaż tego urządzenia jest znacznie łatwiejszy i bezpieczniejszy z pomocą drugiej osoby.











#### CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Zaleca się regularną kontrolę przyrządu pod kątem wszelkich uszkodzeń czy widocznych oznak zużycia.
2. Zaleca się regularne czyszczenie przyrządu miękką szmatką i wodą z mydłem.
3. Przyrząd po wyczyszczeniu należy osuszyć miękką szmatką.



**UWAGA!** Do czyszczenia przyrządu nie wolno używać rozpuszczalników, wybielaczy czy środków ściernych.
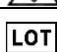
#### WYJAŚNIENIE SYMBOLI

	Wytwórca
	Oznakowanie CE
	Numer referencyjny
	Data produkcji
	Zajrzyj do instrukcji używania
	Ostrzeżenie
	Numer serii
	Góra, nie przewracać
	Przechowywać w suchym miejscu
	Delikatne, obchodzić się ostrożnie



**REHA FUND Sp. z o.o.**

ul. Staniewicka 14, 03-310 Warszawa, Polska  
tel.: +48 22 594 03 00, fax.: +48 22 594 03 07  
e-mail: info@rehafund.pl www.rehafund.pl



Ver. 1.2  
Wydano: 01/2021

**KARTA GWARANCYJNA  
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ KOŃCZYN GÓRNYCH 881**

Model:	Numer seryjny:	Data sprzedaży:	Podpis i pieczęć sprzedawcy:

**WARUNKI GWARANCJI**

1. Producent zapewnia klienta, że przedmiot sprzedaży, na który jest wydana niniejsza karta gwarancyjna jest fabrycznie nowy oraz wysokiej jakości.
2. Przyrząd jest objęty 24 miesięcznym okresem gwarancji od daty sprzedaży w karcie gwarancyjnej.
3. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji gwarancyjnej jest dostarczenie poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej wraz z dołączonym dowodem zakupu.
4. Ewentualne wady sprzętu zostaną usunięte przez firmę REHA FUND Sp. z o.o. lub autoryzowanych serwisantów pod warunkiem, że przyrząd był wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami w instrukcji użytkownika.
5. Naprawa zostanie wykonana w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni, od daty przyjęcia sprzętu do punktu serwisowego.
6. Gwarancja nie są objęte:
  - czynności związane z konserwacją, czyszczeniem i regulacją przyrządu opisane w instrukcji użytkownika;
  - części ulegające zużyciu podczas normalnego użytkownika;
  - mechaniczne i termiczne uszkodzenia przyrządu np. wygięcia, zarysowania, połamania itp.;
  - uszkodzenia powstałe wskutek używania sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi, zaniedbania, dokonania samodzielnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
7. Przed oddaniem sprzętu do autoryzowanych serwisantów należy go wyczyścić zgodnie z instrukcją użytkownika, tak aby nadawał się do wykonania przeglądu serwisowego.
8. Naprawy i wymiany części zamiennych powinny być wykonane przez autoryzowanych serwisantów firmy Reha Fund Sp. z o.o.
9. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego klient będzie obciążony kosztami przesyłki.
10. Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
11. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień klienta wynikających z niezgodności towaru z umową.

**WYKAZ NAPRAW SERWISOWYCH** (wypełnia serwis)

Lp.	Data zgłoszenia	Nr zlecenia	Opis wady/ Zakres naprawy	Data wykonania naprawy	Pieczęć i podpis serwisu
1.					
2.					

## NOTATKI