

INSTRUKCJA UŻYWANIA UCHWYT ŁAZIENKOWY NA WANNĘ DENNIS 900

I. WPROWADZENIE

Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy REHA FUND Sp. z o.o., czołowego dostawcy materiałów zaopatrzenia medycznego i artykułów rehabilitacyjnych na rynku polskim.

Instrukcja używania zawiera wskazówki i sugestie, których znajomość jest niezbędna do prawidłowego korzystania z wyrobu.



UWAGA! Przed użyciem wyrobu należy zapoznać się z instrukcją używania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z wyrobu, nieprzestrzeganie zasad bezpiecznego używania oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.




II. CHARAKTERYSTYKA

Nr katalogowy: **RF-900**
Max. bezpieczne obciążenie: 180 kg
Waga: 2,82 kg
Całkowita wysokość: 48,5 cm
Regulacja szerokości: 8,2 ~ 17,2 cm

LISTA UŻYTYCH MATERIAŁÓW

Rama	żelazo
Pokrętło	PP (polipropylen) + stal nierdzewna
Podkładka	Guma bez lateksu

ELEMENTY UCHWYTU

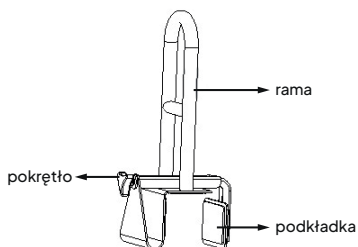

III. PRZEZNACZENIE I ZASTOSOWANIE

Uchwyt pomaga w utrzymaniu równowagi oraz przemieszczaniu się osobom z ograniczoną sprawnością ruchową, zwiększa bezpieczeństwo osób korzystających z urządzeń sanitarnych, nadaje się do zamontowania przy umywalce, toalecie lub w innym pożądanym miejscu w łazience. Uchwyt przeznaczony jest do użytkowania w mieszkaniach, domach opieki, placówkach zajmowanych przez osoby niepełnosprawne.

IV. PRZECIWWSKAZANIA

Przeciwwskazania do pionizacji, urazy i dysfunkcje kończyn górnych uniemożliwiające oparcie się, urazy kończyn dolnych uniemożliwiające utrzymanie równowagi, niestabilność kręgosłupa.

V. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYWANIA

1. Po zamontowaniu uchwytu upewnić się, że jest dobrze przymocowany do podłoża i nie grozi odpadnięciem. Zbyt słabe zamocowanie grozi upadkiem i urazem użytkownika.
2. Należy zwracać szczególną uwagę na mocne i pewne złapanie uchwytu (szczególnie, jeśli jest on mokry), przed pełnym oparciem ciężaru ciała na uchwycie. Zbyt słabe złapanie uchwytu może doprowadzić do przewrócenia się użytkownika i urazu.
3. Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.
4. Nie przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia uchwytu.
5. Korzystać wyłącznie z oryginalnych akcesoriów. Używanie nieoryginalnych części może spowodować nieodpowiednie przystosowanie uchwytu w wyniku czego powstaje ryzyko upadku.
6. Nie przechować uchwytu w temperaturze poniżej 0°C.



UWAGA! Nieprzestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa może doprowadzić do poważnych wypadków.



UWAGA! Skonsultuj się ze swoim lekarzem lub rehabilitantem w celu ustalenia odpowiedniego sposobu korzystania z uchwytu, zgodnie z Twoimi możliwościami funkcjonalnymi i czynnościami dnia codziennego.

VI. SPOSÓB UŻYCIA

MONTAŻ

1. Obróć trójkątne pokrętko, aby wyregulować zacisk płyty wspornika.
2. Przed użyciem upewnij się, że poręcz uchwytu jest prawidłowo i solidnie zamontowana.

SPOSÓB UŻYTKOWANIA

1. Złapać mocno ręką za uchwyt. Upewnić się, że ręka nie ślizga się na uchwycie, szczególnie jeżeli uchwyt jest wilgotny.
2. Podciągnąć się na uchwycie i wykonać zamierzoną czynność, np. wstać.
3. Przed puszczeniem uchwytu upewnij się, że możliwe będzie bezpieczne utrzymanie przyjętej pozycji bez podparcia uchwytami.

VII. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- W trakcie użytkowania uchwytu należy cyklicznie sprawdzać czy kołki mocujące nie zostały obłuzowane. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek luzów należy sprawdzić ich przyczynę i dokręcić wkręty lub wymienić na nowe wraz z korpusami łącznikowymi.
- Zaleca się regularne czyszczenie podpórki miękką szmatką i wodą z mydłem. Podpórkę po wyczyszczeniu należy osuszyć miękką szmatką.



UWAGA! Do czyszczenia uchwytu nie wolno używać rozpuszczalników, wybielaczy czy środków ściernych.



UWAGA! Regularnie sprawdzaj mocowanie uchwytu, aby upewnić się, że jest bezpieczny.

VIII. KONIEC UŻYWANIA

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas kontroli wyrobu zgodnie z zaleceniami producenta. Patrz punkt instrukcji: Czyszczenie i Konserwacja - należy niezwłocznie zaprzestać korzystania z wyrobu. Po zakończeniu używania należy poddać wyrób utylizacji zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.

IX. IX. PRZEWIDZIANY OKRES UŻYWANIA

Przewidziany okres używania wyrobu to 3 lata. Ten czas może być dłuższy lub krótszy, zależnie od częstotliwości korzystania i konserwacji wyrób.

X. GWARANCJA

Producent zapewnia klienta, że przedmiot sprzedaży jest fabrycznie nowy oraz wysokiej jakości.

Wyrób objęty jest gwarancją (szczegółowe warunki gwarancji znajdują się na stronie internetowej Producenta).

Wyrób powinien być wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami w instrukcji używania.

XI. GLOSARIUSZ SYMBOLI

	Producent		Ostrzeżenie
	Oznakowanie CE		Kod partii
	Numer katalogowy		Ilość
	Data produkcji		Góra, nie przewracać
	Zajrzyj do instrukcji używania		Chronić przed wilgocią
	Wyrób medyczny		Kruchy, obchodzić się ostrożnie
	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu		Przechowywać z dala od światła słonecznego

